

Balenia



Set GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Zircon (Vrstvenie na zirkón)

Obsah:
7 x Light Reflective Liners 3 g (1-6, BL), Liner Thinner na riedenie, 5 x IQ/L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), modelovacia tekutina, technický manuál



Set GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal (Vrstvenie na kov)

Obsah:
5 x pastový opak na metalokeramiku 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), modelovacia tekutina, sklená podložka, štetec, technický manuál



Set GC Initial IQ - One Body, Press-over-Zircon (Lisovanie na zirkón)

Obsah:
4 x modifikátor konštrukcie Power Framer Modifier (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x ingoty Effect Press (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), 10 x korekčné prášky (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), modelovacia tekutina, Ring-Base System Medium (200 g) + silikónový krúžok, 10 x plunžre One Way Press Plungers pre 2 g palety



Set GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal (Lisovanie na kov)

Obsah:
Kryštály Fluo Crystals, IQ/Effect ingoty: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Effect ingoty Bleach: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/korekčné prášky: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korekčné prášky Bleach: AOM, BO-M, BOO-M, LF/modelovacia tekutina, Ring Base System Medium, silikónový krúžok, plunžre One Way Press Plungers pre 2 g palety



Set GC Initial IQ - Lustre Pastes Set NF

Obsah:
1 x neutrálny (4 g), 1 x svetlosť (4 g), 4 x telové odtiene „Body“ (4 x 4 g), 8 x sklovinné odtiene Enamel efekt (8 x 4 g), riediacia tekutina (8 ml), obnovujúca tekutina (8 ml), 1 miešacia podložka, 2 štetce, obrázkový návod na použitie

Pre ďalšie informácie o tejto širokej rodine dentálnych materiálov kontaktujte ešte dnes svojho zástupcu GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Czech R. & Slovakia
V Olšínách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
slovakia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

Vytvorte si vlastný svet
s **Initial** od **GC**,

komplexným keramickým systémom pre každú indikáciu.



Vitajte v rodine Initial
„One Body“



Initial IQ -
„One Body“ od GC.

Vrstvenie na zirkón
Vrstvenie na kov
Lisovanie na zirkón
Lisovanie na kov

Trvale vysoká kvalita,
reprodukateľné estetické
vlastnosti a úspora práce.

GC

GC Initial IQ - One Body

Layering-over-Metal a Layering-over-Zircon (Vrstvenie na kov a Vrstvenie na zirkón)
Press-over-Metal a Press-over-Zircon (Lisovanie na kov a Lisovanie na zirkón)

Vďaka novému konceptu Initial IQ - One Body vám spoločnosť GC teraz môže ponúknuť kompaktné keramické systémy pre rýchlu a jednoduchú reprodukciu štandardných odtieňov Vita®. Nové postupy umožňujú zubným technikom sústrediť sa na tvar a funkčnosť a na záver vytvoriť vitálny a prirodzený vzhľad pomocou Initial IQ Lustre Pastes NF, novo vyvinutých trojzrnmých keramických pigmentov. S GC Initial IQ - One Body budete znova a znova dosahovať konzistentne kvalitné a estetické výsledky, a to s menším množstvom materiálu.

Koncept „One Body“ znamená jednoduchý a úsporný postup vytvorenia kontúry pomocou jediného „body“ odtieňa.

- Kompatibilný s bežnými porcelánovými zliatinami i technológiami na báze zirkónu.
- K dispozícii ako systém na vrstvenie alebo lisovanie.
- Rýchly a jednoduchý sa naučiť.
- Konzistencia a predvídateľnosť kvality práce bez ohľadu na použitú techniku alebo materiál.

Krok 1: Príprava podľa typu konštrukcie

Zirkón

Layering-over-Zircon (Vrstvenie na zirkón)



Konštrukcie z oxidu zirkoničitého

Press-over-Zircon (Lisovanie na zirkón)



Na zirkónovú konštrukciu naneste vrstvu GC Initial IQ Light Reflective Liner.



Naneste tenkú wash vrstvu modifikátora konštrukcie Power Frame Modifiers.

Kov

Layering-over-Metal (Vrstvenie na kov)




Kovové konštrukcie vyrobené litím alebo pomocou CAD/CAM technológie.

Press-over-Metal (Lisovanie na kov)



Plochým štetcom naneste tenkú opakerovú vrstvu (wash) za použitia jedného z bežných opakerových odtieňov GC Initial MC Paste Opaque. Pred vypálením naneste na vrstvu opakeru Fluo crystals.

CTE

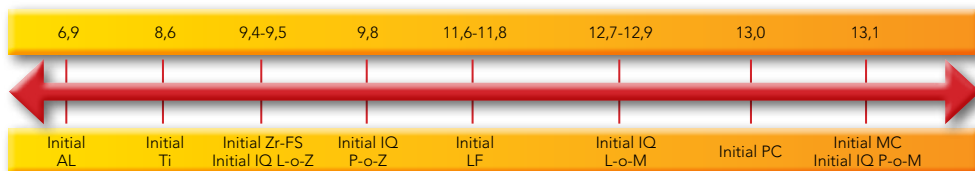

Viac informácií nájdete v technických príručkách GC Initial.
Fotografie dodal: ZTM Michael Brüsch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Nemecko
*Vita® je registrovanou obchodnou známkou Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Nemecko.

Krok 2: Dostavba podľa vybranej techniky

Layering-over (Vrstvenie)

- Jednoduchá dostavba tela náhrady pomocou jediného prášku.
- Jednoduchá a úsporná alternatíva pre estetické keramické korunky a mostíky.
- Netreba investovať do špeciálneho vybavenia.

Layering-over-Zircon (Vrstvenie na zirkón)



Naneseť telového „body“ prášku na celú kontúru.

Layering-over-Metal (Vrstvenie na kov)



Výsledok po prvom vypálení.



Press-over (Lisovanie)

- Vosková modelácia celej kontúry je jednoduchá.
- Široká paleta systémov prefabrikovaných voskových faziet dostupných na trhu šetrí váš čas pri dostavbe tela náhrady.
- Len naneste vosk na okraj a pritlačte pre dokonalú adaptáciu okrajov.
- Unikátne predmiešané ingoty umožňujú opakovateľnosť v odtieňoch a znižujú tak počet opráv.

Press-over-Zircon (Lisovanie na zirkón)



Po vypálení opakerovej vrstvy vymodelujte úplnú voskovú dostavbu pomocou prefabrikovaného voskovacieho systému. Hrúbka 0,8 mm umožňuje dosiahnuť prijateľného estetického konečného výsledku.

Press-over-Metal (Lisovanie na kov)



Výsledok po vylisovaní.



Krok 3: Dokončenie s GC Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF sú trojzrnmé keramické farby, vyvinuté na dodanie farebnej hĺbky a prirodzenej translucencie systémom určeným na lisovanie a vrstvenie. Teraz môžete svoje lisované a vrstvené korunky a mostíky skutočne oživiť pomocou Lustre Pastes NF, ktoré sú optimálne prispôbené keramike s „nízkym“ aj „vysokým“ CTE. Lustre Pastes NF, ktoré sú k dostaniu vo flaštičkách na okamžité použitie, sú vyrobené na báze jemných keramických častíc a môžu sa nanášať v hrubších vrstvách - pre neprekonateľnú životnosť a prirodzený lesk vašich náhrad.

