

## Pakiranja



### GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Zircon set

Vsebina:  
7 x svetlobno reflektirajoči liner, 3 g (1-6, BL), korektor linerja, 5 x IQ/L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), modelirna tekočina, tehnična navodila



### GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal set

Vsebina:  
5 x MC/Paste Opaque 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), modelirna tekočina, steklena ploščica, čopič, tehnična navodila



### GC Initial IQ - One Body, Press-over-Zircon set

Vsebina:  
4 x Power Frame Modifier (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x Effect Press Ingots (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), 10 x korekturni praški (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), modelirna tekočina, kiveta srednja (200 g) + silikonska kiveta, 10 x potisni bat za 2 g ingote



### GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal set

Vsebina:  
Fluo Crystals, IQ/Effect Ingots: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Effect Ingots Bleach: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/korekturni praški: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korekturni prašek Bleach: AOM, BO-M, BOO-M, LF/modelirna tekočina, kiveta srednja, silikonska kiveta, potisni bat za 2 g ingote



### GC Initial IQ - Lustre Pastes Set NF

Vsebina:  
1x nevtralna (4 g), 1 x svetla (4 g), 4 x Body odtenki (4 x 4 g), 8 x skleninski odtenki (8 x 4 g), dilucijska tekočina (8 ml), Refresh Liquid (tekočina za osveževanje) (8 ml), 1 mešalna posoda, 2 čopiča, Slikovna navodila IFU

Če želite izvedeti več o tej napredni skupini dentalnih materialov, se obrnite na vašega GC predstavnika še danes.

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Slovenia  
Šlandrov trg 40  
SLO - 3310 Žalec  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax. +386.3.710.32.71  
slovenia@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

GC

## Ustvarite svoj svet z GC Initial,

celovitim keramičnim sistemom za vsako indikacijo.



## Dobrodošli pri Initial „One Body“ družini



### GC Initial IQ - „One Body“.

Layering-over-Zircon  
(slojevanje-na-cirkon)  
Layering-over-Metal  
(slojevanje-na-kovino)  
Press-over-Zircon (press-na-cirkon)  
Press-over-Metal (press-na-kovino)

Stalno visoka kvaliteta,  
ponovljiva estetika in  
gospodarno delo.

GC

# GC Initial IQ - One Body

Layering-over-Zircon in Layering-over-Metal  
Press-over-Zircon in Press-over-Metal

Skrozi razvoj Initial IQ - One Body - Concept lahko GC sedaj ponudi kompakten keramični sistem za hitro in enostavno reprodukcijo standardnih Vita® odtenkov. Pristop omogoča tehnikom, da se osredotočijo na obliko in funkcijo ter da ustvarijo vitalnost in naravni izgled z Initial IQ Lustre Pastes NF, novo razvitimi 3-dimenzionalnimi keramičnimi barvami v končni fazi. GC Initial IQ - One Body pristop je za stalno kakovost in estetske rezultate z vedno manj materiali.

'One Body' koncept je enostaven in ekonomičen postopek, kjer se oblika izdelava z enim body odtenkom.

- Združljiv je z standardnim porcelanskimi zlitinami kot tudi s tehnologijo na osnovi Zr.
- Na voljo 'layering' ali 'press' sistem.
- Hitro in enostavno učenje.
- Konsistenca in predvidljivost v kvaliteti dela, ne glede na tehniko ali material.

## Korak 1: Priprava glede na ogrodje

### Cirkon

Slojevanje-na-cirkon (Layering-over-Zircon)



Cirkon dioksidno ogrodje.

Press-na-cirkon (Press-over-Zircon)



Nanesite sloj GC Initial IQ Light Reflective Liner, da zakrijete cirkonijevo ogrodje.



Nanesite tanek sloj Power Frame Modifiers.

### Kovina

Slojevanje-na-kovino (Layering-over-Metal)




Kovinsko ogrodje, ulito ali izdelano z CAD/CAM.

Press-na-kovino (Press-over-Metal)



S pomočjo ploščatega čopiča nanesite tanek sloj opakra (wash) GC Initial MC Paste Opaques. Pred pečenjem na površino opakra nanesite Fluo kristale.

## CTE

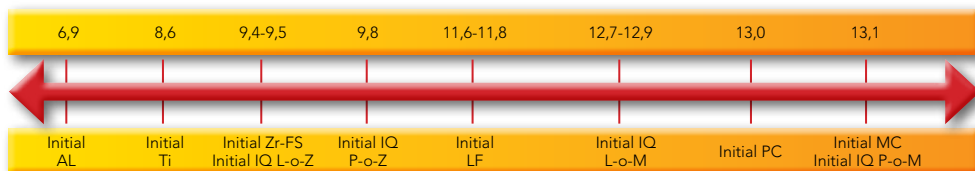

Za dodatne informacije pogledajte v GC Initial Tehnična navodila.  
Fotografija: ZTM Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Nemčija\*  
\*Vita® je zaščitena blagovna znamka podjetja Vita® - Zahrfabrik Bad Säckingen, Nemčija.

## Korak 2: Oblikovanje protetične konstrukcije glede na izbrano tehniko

### Layering-over

- Enostavno oblikovanje s samo enim praškom.
- Hitra in ekonomična alternativa za estetske keramične prevleke in mostičke.
- Ni potrebe po vlaganju v specializirani opremi.

### Press-over

- Oblikovanje v vosku je zelo enostavno.
- Zahvaljujoč široki izbiri tovarniško izdelanih sistemov voščenih veneerjev na tržišču, vam izdelava prevleke prihrani veliko časa.
- Z voskom oblikujete le rob in s press tehniko dosežete odlično marginalno prilagajanje.
- Edinstveni predhodno mešani ingoti vam ponujajo ponovljivost odtenkov, kar pomeni manj ponovitev.

Layering-over-Zircon



Nanos body prahu do dokončne oblike.

Layering-over-Metal



Rezultat po enem pečenju.



Press-over-Zircon



Po pečenju opakra, se končna oblika izdelava s pomočjo pre-fabriciranih voščenih sistemov. Za doseg sprejemljivega estetskega končnega rezultata je potrebno 0,8 mm debeline.

Press-over-Metal



Rezultat po tlačenju (press) keramike.

## Korak 3: Končna obdelava z GC Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF so 3-dimenzionalni keramični odtenki, ki so razviti zato, da dajo barvno globino in naravno translucenco Initial Press-over in Layering-over sistemom. Sedaj lahko res oživite vaše Press-over ali Layer-over prevleke in mostičke z Lustre Pastes NF, z optimalnim ujemanjem z obema 'nizko' in 'visoko' CTE keramiko. Lustre Pastes NF so na voljo v pripravnih kozarčkih in so izdelane na osnovi finih keramičnih delcev. Lahko se nanašajo v debelejših plasteh, kjer se želi doseči neprekosljivo vitalnost in vam pomagajo doseči naravni sijaj vaših restavracij.

