

Initial LiSi Block™

Directrices paso a paso para CEREC SpeedFire



MAQUILLANDO con Initial Lustre Pastes ONE



Escanee la preparación y diseñe su restauración.



Coloque Initial LiSi Block en el dispositivo de fresado.



Frese su restauración de Initial LiSi Block.



Pinte con Lustre Pastes ONE NFL para dar brillo y fluorescencia.



Pinte con Lustre Pastes ONE shade A para el croma.
¡Lo que ve es lo que obtiene!



Coloque un pin y Firing Foam y posicione la restauración en la placa SpeedFire central.



Seleccione el programa Initial LiSi Block.
Elija la cantidad de unidades en el display (hasta 2).



Seleccione la opción "Glaseado" en el software.



Observe el tiempo de acabado y presione la flecha azul para comenzar.



¡En menos de 12 minutos, su restauración estará LISTA!

Cortesía de la Dra. Gertrud Fabel, Alemania

*Initial es una marca registrada de GC Corporation
Tenga en cuenta: la cerámica micro capas Initial IQ ONE SQIN no se puede cocer en el horno SpeedFire.

Escanee para obtener una guía paso a paso del maquillaje



Initial LiSi Block™

Consejos y trucos para trabajar con SpeedFire



Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar SpeedFire (Dentsply Sirona) para cocer Initial LiSi Block:

- No use el spray SpeedFire Glaze, así que si esto se menciona en el programa, por favor, ignórela.
- Para obtener los mejores resultados en sus restauraciones, no utilice ningún material de maquillaje que no sea de la gama de productos de GC (Initial Lustre Pastes ONE, Initial Spectrum Stains). Si elige un material de maquillaje diferente para el programa de Initial LiSi Block, el resultado estético de su restauración se verá afectado debido a las diferencias en los parámetros de cocción.
- El número máximo de restauraciones de Initial LiSi Block por ciclo de cocción no debe superar las 2.
- Al diseñar, seleccione la translucidez adecuada del color que se va a utilizar.
- No utilice bandejas ni pines diferentes a los Soportes de glaseado (Dentsply Sirona).



Para obtener más información, lea la información y las instrucciones de funcionamiento del SpeedFire (Dentsply Sirona) y consulte el Manual Técnico de Initial LiSi Block.

Escanee para obtener el manual técnico completo.

