

Initial LiSi Block™

Linee guida dettagliate per CEREC SpeedFire



VERNICIATURA con Initial Lustre Pastes ONE



Effettuare la scansione della preparazione e progettare il restauro.



Posizionare Initial LiSi Block™ nel dispositivo di fresatura.



Fresare il restauro di Initial LiSi Block.



Verniciare con Lustre Pastes ONE NFL per ottenere lucentezza e fluorescenza.



Verniciare con Lustre Pastes ONE colore A per raggiungere la cromaticità. Ottieni ciò che vedi!



Prendere un perno e Firing Foam e posizionare il restauro nella piastra centrale SpeedFire.



Selezionare Initial LiSi Block come programma. Selezionare tutte le unità che si desidera attivare sul display (fino a 2).



Selezionare l'opzione "Glasura" del programma.



Annotare l'ora di fine e premere la freccia blu per iniziare.



In meno di 12 minuti il restauro è PRONTO!

Per gentile concessione della Dott.ssa Gertrud Fabel, Germania

*Initial è un marchio registrato di GC Corporation
Si noti quanto segue: la ceramica per microstratificazione Initial IQ ONE SQIN non può essere utilizzata con il forno SpeedFire

Scansiona il QR Code
per una verniciatura
passo dopo passo →



Initial LiSi Block™

Consigli e suggerimenti per utilizzare SpeedFire



Quando si utilizza SpeedFire (Dentsply Sirona) per la cottura di Initial LiSi Block, tenere presente quanto segue:

- Non utilizzare lo spray SpeedFire Glaze e, se questo viene menzionato nel programma, ignorarlo.
- Per ottenere risultati ottimali nei restauri, non utilizzare materiali di verniciatura diversi dalla gamma di prodotti GC (Initial Lustre Pastes ONE, Initial Spectrum Stains). Scegliendo un materiale di verniciatura diverso per Initial LiSi Block, il risultato estetico del restauro sarà influenzato dalle diverse impostazioni di cottura.
- Il numero massimo di restauri Initial LiSi Block per ciclo di cottura non deve essere superiore a 2.
- In fase di progettazione, selezionare la giusta traslucenza del colore da utilizzare.
- Non utilizzare altri vassoi e perni ad eccezione dei supporti per glasura (Dentsply Sirona).



Per ulteriori dettagli, leggere le informazioni e le istruzioni contenute nelle Istruzioni per l'uso di SpeedFire (Dentsply Sirona) e consultare il Manuale tecnico Initial LiSi Block

*Scansiona il QR Code
per il manuale
manuale tecnico completo* →

