

Umenie dofarbovania keramiky



*initial*TM

Riešenia pre
dofarbenie

Lustre Pastes ONE
Spectrum Stains

GC

Zvládnite všetky svoje estetické úlohy s Initial™ od GC

Spoločnosť GC ponúka používateľom produktov Initial najmodernejšie a vysoko estetické riešenia pre dofarbovanie keramiky. V závislosti od prípadu a od požadovaných vlastností Vám dva produktové rady Initial Lustre Pastes ONE a Initial Spectrum Stains poskytnú očakávané výsledky. Sú vhodné pre široký rozsah koeficientu tepelnej rozťažnosti (CTE), vďaka čomu môžete pracovať s kompletnou škálou keramiky GC Initial a s takmer všetkými ostatnými druhmi keramiky.


Initial Lustre Pastes ONE, jedinečná 3D dofarbovacia glazúrovacia keramika od GC, prináša fluorescenciu hĺbku a autenticitu všetkým Vaším dokonalým náhradám ... a to len nanesením farbičky. Už nepotrebujete zložité vrstvenie alebo ďalšie vypaľovacie cykly k tomu, aby ste získali neprekonateľnú živosť a prirodzený lesk pre všetky Vaše náhrady.

Initial Lustre Pastes GUM sú výsledkom špeciálneho výberu nefluorescenčných, ružovo zafarbených keramických častí, ktoré dokonale napodobňujú vzhľad prirodzeného ďasna. Je možné jednoducho dosiahnuť celkom prirodzený prechod medzi okrajom korunky a gingívou.

Initial Spectrum Stains ponúkajú 2D dofarbovací efekt a je možné ich použiť pre vnútorné ako aj pre vonkajšie dofarbenie keramiky. Zabezpečia veľmi prepracovaný konečný výsledok s lesklým povrchom a zachovaním textúry.

Oba tieto produkty sa navzájom dopĺňajú... V niektorých prípadoch sa môžu použiť obidva; napríklad, Spectrum Stains sa môžu pridať do Lustre Pastes NF alebo do keramických práškov na vrstvenie keramickej náhrady.

Kompatibilita farbičiek Lustre Pastes a Spectrum Stains s keramickou líniou Initial

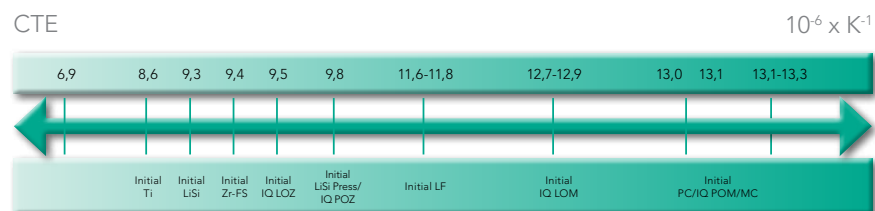


Lustre Pastes ONE V-Shades

S odtieňmi "Body A-D" dosiahnete veľmi ľahko a rýchlo požadovaný odtieň podľa VITA kľúča. S ďalšími dostupnými odtieňmi môžete náhrady ďalej charakterizovať pre dokonale prispôbený konečný výsledok.



Optimálna úroveň fluorescence.
Zaisťuje vzhľad prirodzených zubov za každých svetelných okolností.

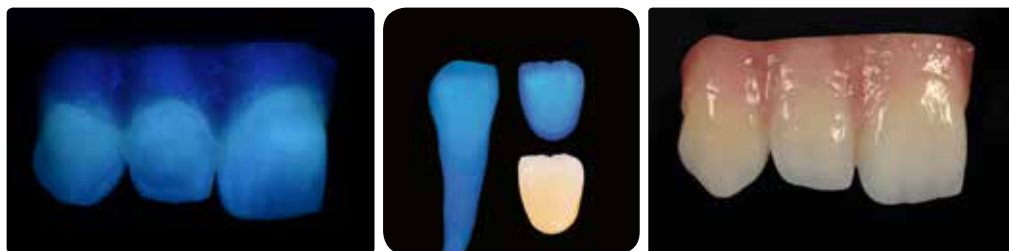


Lustre Pastes NF Gum

5 jedinečných ružových pást Lustre Pastes, ktoré umožňujú individuálne napodobenie ďasna v prirodzenej harmónii. Pre neobmedzenú kreativitu môžete navyše použiť 4 miešateľné modifikátory Gum Modifiers, a tak bez problémov reprodukovat najkomplikovanejšie prípady s imitáciou ďasien.



Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains sú práškové glazúrovacie farbičky, ktoré sú k dispozícii v ponuke 20 odtieňov pre dosiahnutie estetického výsledku Vašich náhrad. Bez ohľadu na spôsob aplikácie sa dosiahne veľmi decentný konečný výsledok so zachovaním povrchovej textúry a zaistením optimálnej úrovne lesku.

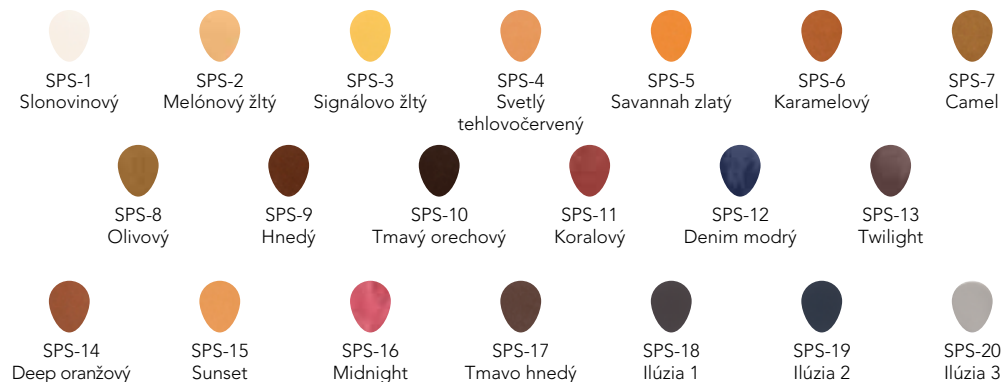

Estetická krása vďaka Initial Lustre Pastes ONE

Dokonalá konečná úprava Vašich náhrad

Už viac nepotrebujete zložité vrstvenie alebo ďalšie vypaľovacie cykly k tomu, aby ste získali neprekonateľnú živosť a prirodzený lesk pre všetky Vaše náhrady.

S Initial Lustre Pastes ONE môžete získať hĺbku farby a prirodzenú translucenciu ... a to len nanesením farbičky.

Initial Lustre Pastes ONE sú založené na špeciálnej zmesi jemných keramických častí. Postupy pre dokončenie Vašej práce zostávajú rovnaké bez ohľadu na techniku použitú pri vrstvení.

Použitím riediacej tekutiny sa do konca zachová optimálna konzistencia.

Požadovaný odtieň podľa VITA kľúča sa vytvorí nanesením pasty Lustre Pastes ONE v rozmedzí "Body A-D". Tento postup zahŕňa všetko potrebné pre rýchle vytvorenie odtieňa podľa VITA kľúča.

K dosiahnutiu vysoko estetických výsledkov pre zdokonalenú charakterizáciu jednoducho použite ďalšie dostupné odtiene.



Báza



Aplikácia LP ONE Neutral Fluor



Aplikácia odtieňov Body Shades



Finálna náhrada vrátane farby a lesku

Jednoduché modifikácie

S pastami Initial Lustre Pastes ONE môžete jednoducho zmeniť bežnú keramickú korunku a mostík.

Zmeniť farbu, jas a svetlosť alebo pridať dodatočný povrchový lesk nikdy nebolo tak jednoduché!



Jas





Farba



Intenzita šedej

Dofarbovanie keramiky umožňuje konkrétne vyjadrenie tých najnenápadnejších emócií

Luster Pastes ONE s vylepšenou fluorescenciou sú špeciálne vyvinuté na zvýšenie intenzity fluorescence Vašich monolitických náhrad a zaisťujú vzhľad prirodzených zubov za každých svetelných okolností.

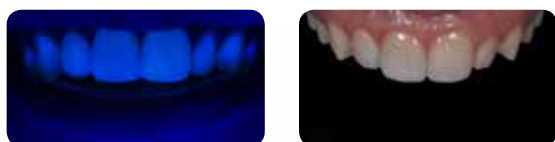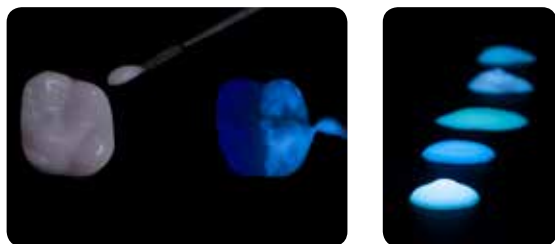

Lustre Enamel Effect - Opal
Vysoko opalescentná základná pasta na použitie v incízálnej oblasti.




Pridajte charakter svojim „one body“ náhradám ...

Jedinečná konzistencia umožňuje homogénne modifikácie a vzhľad. Požadovanú povrchovú textúru/hladkosť vrstvy Lustre Pastes ONE je možné dosiahnuť jemným vibrovaním alebo kondenzovaním náhrady. Nie je potrebné žiadne zložité vrstvenie alebo ďalšie vypaľovacie cykly. Je to rýchle, jednoduché a bezpečné. Pasty sú pripravené na použitie s jemnými tixotropnými vlastnosťami pre jednoduchú a presnú aplikáciu.



Plne anatomické konštrukcie z lítium disilikátu ako napr. LiSi Press je možné individualizovať s Lustre Pastes ONE.

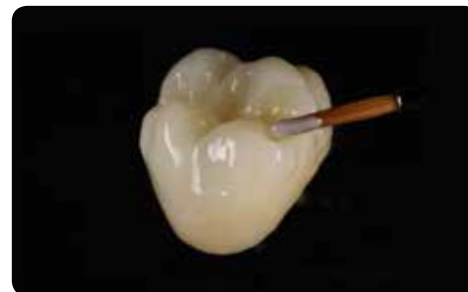

Hľadáte spôsob, ako dodať ďalšiu živosť Vaším monolitickým prácam na báze zirkónu vytvoreným pomocou CAD/CAM, ako napr. s diskom Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes ONE sú riešením v každom prípade.



... alebo ich upravte po vrstvách pre dosiahnutie efektov hĺbky.



Cut back technika



Použitie Lustré Pastes ONE (+ vypaľovanie)



Použitie opáľovej/Incižálnej hmoty (+ vypaľovanie)



Konečný výsledok

Použitím pást Initial Lustré Pastes ONE pri technike cut-back docielite pri svojich lisovaných alebo vrstvených prácach tie najlepšie estetické výsledky. Po dofarbení pastami Lustré Pastes ONE sa dokončenie realizuje pomocou špeciálnej fazetovacej keramiky GC Initial: CL-F pre vysokú translucenciu a pomocou opáľových a sklovinových hmôt pre incižálne efekty.



Domaľujte červenú a bielu estetiku ...

Dva systémy, jeden prístup.



Východisková situácia



Použitie rôznych odtieňov ďasien Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades



Charakterizácia pomocou odtieňov podľa VITA kľúča



Konečný výsledok



... s prirodzenými prechodmi, dokonca aj na zirkónovej konštrukcii.



Optimálna úroveň fluorescencie pást Lustre Pastes ONE zaisťuje prirodzený vzhľad Vašich náhrad pod všetkými svetelnými podmienkami a používajú sa aj ako farebná vrstva pre charakterizáciu v kombinácii s keramikou SQIN pri technike mikrovrstvenia.

Z dôvodu zvyšujúcej sa popularity zirkónových náhrad a náhrad vytvorených pomocou CAD/CAM spoločnosť GC ponúka riešenia pre zachovanie rovnakých estetických štandardov. Vaša práca bude vyzeráť prirodzene a pekne vďaka Initial Lustre Paste ONE. Jedinečné zloženie tohto produktu ponúka lepšie prispôbenie základnému keramickému materiálu a opticky pôsobí ako vrstvená keramika, čím sa zvyšuje 3D efekt Vašej náhrady. V jednoduchosti je krása!



Rozšírte svoje možnosti dofarbenia s Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains obsahujú pigmenty, ktoré sú sintrované vo vnútri živcovej matrice pre stabilitu a pre umožnenie konzistentných reprodukovateľných výsledkov. Môžete sa pohrať s farbami a získať neobmedzené farebné možnosti vďaka Initial Spectrum Stains. Použite ich pre vnútorné ako aj vonkajšie dofarbenie. Môžu sa tiež pridať do keramickej hmoty alebo do pást Initial Lustre Pastes ONE pre získanie ďalších možností dofarbenia!

Dve konzistencie so zachovaním textúry

Initial Spectrum Stains je možné aplikovať v preferovanej konzistencii používateľa, ako pastu alebo tekutejšiu hmotu. Bez ohľadu na použitú konzistenciu bude konečný výsledok rovnaký: veľmi decentné zafarbenie a lesk so zachovaním povrchovej textúry náhrady; sú 2D variantom pást Initial Lustre Pastes ONE.



Korunka s jemnou textúrou pripravená na glazovanie



Glazovanie s tekutou alebo pastovou konzistenciou



Po vypaľovaní: dofarbené a glazované so zachovaním jemnej textúry



Vnútorné dofarbenie ...



... alebo vonkajšie



2D a 3D riešenia pre dofarbovanie keramiky... od spoločnosti GC

GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V-Shades

- 4 odtiene Body Shades a 1 neutrálny odtieň pre získanie náhrady v odtieňoch VITA tou najjednoduchšou cestou
- 9 odtieňov Effect Shades pre uplatnenie Vašich umeleckých schopností a vytvorenie bielych škvŕn, dekalifikácie, vlasových čiar a prasklín

Zloženie setu:

- 1 x Neutral (4 g)
- 1 x Neutral Fluo (4 g)
- 1 x Value (4 g)
- 4 x odtiene Body (4 x 4 g)
- 8 x odtiene Enamel Effect (8 x 4 g)
- 1 x riediacia tekutina (8 ml)
- 1 x obnovovacia tekutina (8 ml)
- 1 miešacia podložka
- 2 štetce, Vzorkovník
- Technický manuál



GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 pripravených pást v odtieni ďasien s ideálnymi tixotropnými vlastnosťami pre jednoduchú a presnú aplikáciu
- 4 miešateľné Gum Modifiers umožňujúce nekonečnú kreativitu ku kopírovaniu prirodzeného gingiválneho prechodu

Zloženie setu:

- 5 x odtiene Gum (5 x 4 g)
- 4 x Stain Modifier pre LP NF (4 x 3 g)
- Riediacia tekutina (8 ml)
- Obnovovacia tekutina (8 ml)
- 1 miešacia podložka
- 2 štetce, Vzorkovník
- Technický manuál



GC Initial Spectrum Stains

- 16 odtieňov v prášku umožňujúcich estetické doladenie
- dve konzistencie s decentným konečným výsledkom, so zachovaním textúry a získaním optimálnej úrovne lesku

Zloženie setu:

- 16 x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze prášok GL (10 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze tekutina (25 ml)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Paste tekutina (8 ml)
- 1 x Initial Spectrum Stains Vzorkovník
- Technický manuál

Náhradné balenia:

- GC Initial Spectrum Glaze prášok GL-FLUO (10 g)
- GC Initial Spectrum Stains SPS-17 - SPS-20 (3 g)



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://europe.gc.dental/sk-SK>

The logo for GC, featuring the letters 'GC' in a bold, italicized, sans-serif font with a white outline and a slight shadow effect.

Since 1921
100 years of Quality in Dental