

Опаковки



GC Initial IQ - One Body, комплект Layering-over-Zircon

Съдържание:
7 x Light Reflective Liners 3 гр
(1-6, BL), Liner Thinner,
5 x IQ/L-O-Z Body 50 гр
(A, B, C, D, BL), Течност за моделиране, Техническо Ръководство



GC Initial IQ - One Body, комплект Layering-over-Metal

Съдържание:
5 x MC/Paste Opaque 3 гр (A2, A3, B2, C2, D2),
4 x IQ/L-O-M Body 50 гр (A, B, C, D), Течност за моделиране, Стъклена Паничка, Четка, Техническо Ръководство



GC Initial IQ - One Body, комплект Press-over-Zircon

Съдържание:
4 x Модификатори за келето (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x Оцветени Прес Блокчета (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Избелени), 10 x Прах за Корекции (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Избелени), Течност за моделиране, Пръстенова Система Средна (200 гр) + Силиконов Пръстен, 10 x Еднократни Прес Бутала за 2 гр Блокчета

GC Initial IQ - комплект Lustre Pastes NF

Съдържание:
1 x Neutral (4 гр),
1 x Value (4 гр),
4 x Основни Цвята (4 x 4 гр),
8 x цветове с Емайлов ефект (8 x 4 гр), Разреждаща Течност (8 мл), Освежаваща Течност (8 мл), 1 Смесително Легенче, 2 Четки, Илюстрирани инструкции за употреба



GC Initial IQ - One Body, комплект Press-over-Metal

Съдържание:
Fluo Crystals, IQ/Блокчета за Ефект: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Избелени Ефект Блокчета: AO-M, BO-M, VOO-M, IQ/Прах за Корекция: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Избелена Прах за Корекция: AO-M, BO-M, VOO-M, LF/Течност за моделиране, Пръстенова Система Средна (200 гр) + Силиконов Пръстен, 10 x Еднократни Прес Бутала за 2 гр Блокчета



За да научите повече за тези модерни дентални материали, свържете се с вашия представител на GC днес.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Naasrode-Leuven 1240
Interleuveniaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com


GC

Създайте свой СВЯТ с Initial от GC,

цялостна керамична система за всяка индикация.



Добре дошли в семейството на Initial „One Body”

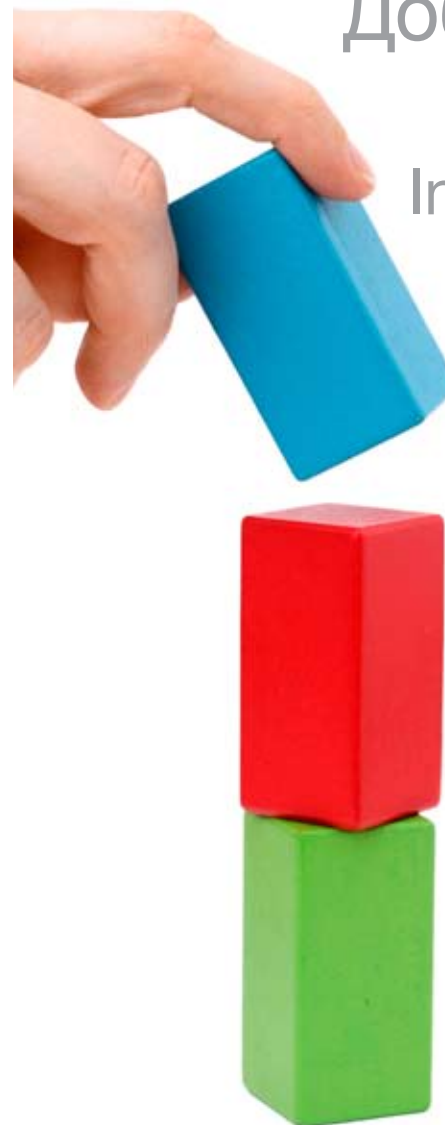

Initial IQ -
„One Body” от GC.

Наслявяване върху
Циркон
Наслявяване върху Метал
Пресоване върху Циркон
Пресоване върху Метал

Постоянно високо качество,
възпроизводима естетика
и икономична работа.

GC

GC Initial IQ - One Body

Наслявяване-върху-Метал и Наслявяване-върху-Циркон
Пресоване-върху-Метал и Пресоване-върху-Циркон

Чрез разработването на концепцията Initial IQ - One Body, GC ви предлага компактни керамични системи за бързо и лесно пресъздаване на стандартните цветове по Vita®*. Този метод позволява на зъботехниците да се концентрират върху формата и функцията, и да създадат жив и естествен външен вид използвайки като последна стъпка Initial IQ Lustre Pastes NF - 3-измерни керамични бои. Подходът GC Initial IQ - One Body осигурява постоянно високо качество и естетични резултати отново и отново с по-малко материали.

Концепцията за 'One Body' е лесна и икономична процедура, при която контурът се създава с един основен цвят.

- Съвместима със стандартните порцеланови сплави, както и с всички циркониеви технологии.
- Налична като послойна и прес система.
- Лесно и бързо усвоима.
- Последователно и предвидимо качество на работата, независимо от техниката или материала.

Стъпка 1: Изпиляване според материала на кепето

Циркон

Наслявяване
върху Циркон



Кепета от Циркониев диоксид.

Пресоване
върху Циркон



Нанесете слой от GC Initial IQ Light Reflective Liner, за да маскирате циркониевата структура.

Нанесете тънък слой от Power Frame Modifiers.

Метал

Наслявяване
върху Метал




Метално кепе, изработено чрез леене или CAD/CAM технология.

Пресоване
върху Метал



Нанесете тънък слой опакер (wash) от нормалните пастовидни опакери на GC Initial MC, използвайки плоска четка. Преди изпичането се нанасят Fluor crystals върху повърхността на опакера.

KTP

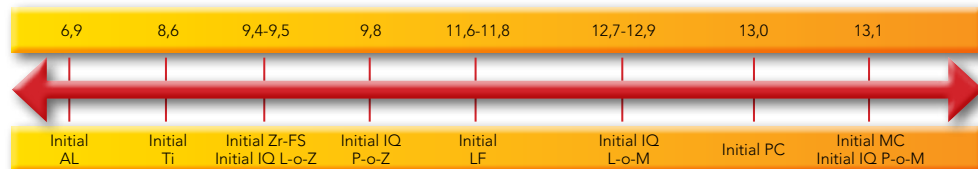

За повече информация проверете в Техническото Ръководство на GC Initial. Фотографи: ZTM Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germany. *Vita® е регистрирана търговска марка на Vita® Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

Стъпка 2: Изграждане, базирано според избраната техника

Послойно нанасяне

- Лесно изграждане на основата само с един прах.
- Бърза и икономична алтернатива за естетични керамични корони и мостове.
- Без необходимост от инвестиции в специално оборудване.

Наслявяване
върху Циркон



Нанасяне на основния прах до окончателния контур.

Наслявяване
върху Метал



Резултат след едно изпичане.



Пресоване

- Пълното контуриране с восък е лесно осъществимо.
- Благодарение на богатата гама от готови восъчни фасети на пазара, изграждането на основата Ви спестява време.
- Просто нанесете восък върху ръба и пресовайте, за да постигнете перфектна маргинална адаптация.
- Уникалните предварително смесени блокове предлагат повтаряемост на цветовете, което означава по малко поправки.

Пресоване
върху Циркон



След изпичането на опакера, се изработва пълно изградена с восък с помощта на готова восъчна система. Необходима е дебелина от 0.8 мм за достигане на приемлива естетика на крайния резултат.

Пресоване
върху Метал



Резултат след пресоване.



Стъпка 3: Завършване с Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF са 3-измерни керамични оцветители, разработени да придадат дълбочина на цвета и естествена транспарентност на Initial системите за пресоване или нанасяне. Сега наистина можете да съживите своите пресовани или послойно изградени корони и мостове с помощта на комплектите Lustre Pastes NF с оптимална съвместимост към керамичните системи с "нисък" и "висок" KTP. Налични в готови за употреба бурканчета Lustre Pastes NF са базирани на фини керамични частици и могат да се нанасят в по-дебел слой, при което ще придадат ненадмината жизненост и естествен блясък на вашите възстановявания.

