


Initial LiSi Block -vastaavuus VITA® Classic -sävyjen kanssa*

initial[™]
LiSi Block


initial
LiSi Block

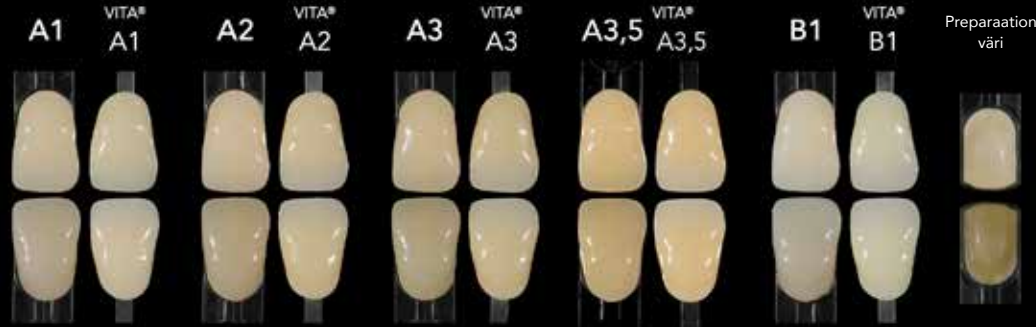

✓ Normaali preparaation väri
HT-sävyllä antaa hyvän
väriavastavuuden

✗ Tumma preparaation väri
HT-sävyllä antaa liian tumman,
harmahtavan sävyn

initial
LiSi Block

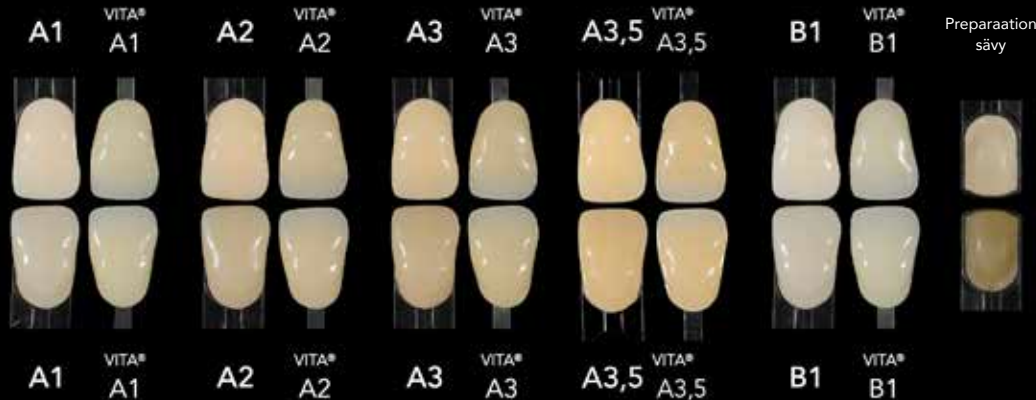

✗ Normaali preparaation väri
LT-sävyllä antaa liian kirkkaan,
valkean sävyn

✓ Tumma preparaation väri
LT-sävyllä antaa hyvän värien
yhteensopivuuden**

* Tämän kaavion sävymallit ovat vain kiillotettuja eikä poltettuja. VITA on VITA® Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co:n tavaramerkki.

**Voimakkaasti värjäytyneet hampaat on värjättävä etukäteen tai sementoitava erittäin opaakilla sementillä.

Vinkkejä hyvään sävyjen hallintaan

initial[™]
LiSi Block

Kiillota ennen kokeilua

Kiillota työt ennen kokeilua varmistaaksesi, että pinnan karheus ei heikennä valonläpäisyyttä.

Kokeile restaurointia try-in-pastalla

Kokeile aina töitä, käyttämällä try-in-pastaa tai glyseriinigeeliä. Kuivakokeilua tulee välttää, koska ilma katkaisee valonläpäisyn, mikä lisää työn kirkkautta jota ei esiinny lopullisessa sementoidussa työssä.

Sävyt voivat muuttua, jos ne värjätään / poltetaan

Kun restauroinnit poltetaan, väri voi poiketa alkuperäisestä sävystä tahrojen ja/tai kiillon lisäämisen vuoksi.



Bleach shade

Käytä Initial LiSi Block Bleach -sävyä äärimmäisen valkaisuvaikutuksen saamiseksi tai pohjana mikroerostamiseen Initial IQ ONE SQIN -järjestelmällä.



Initial LiSi Block -lataukset

Skannaa QR-koodi saadaksesi lisätietoja, mukaan lukien valmistusohjeet, kiillotusvaiheet, värjäystekniikat ja sementointiprotokolla.

