


Initial LiSi Block atbilstība VITA® Classic krāsām*

initial[™]
LiSi Block


initial[™]
LiSi Block

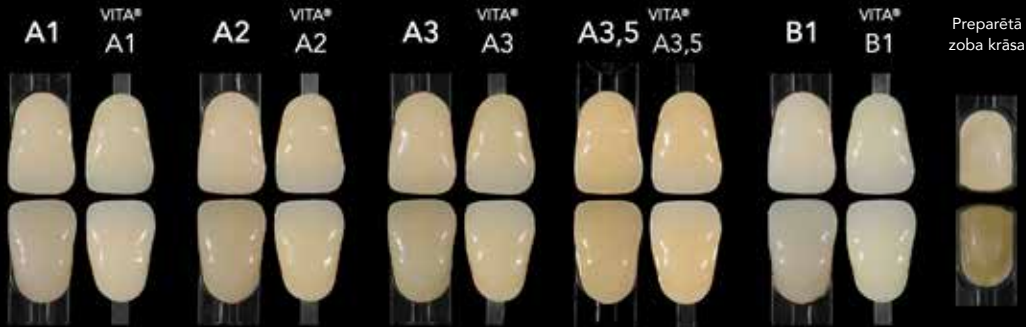

✓ Normāla preparētā zoba krāsa
ar HT krāsu nodrošina labu krāsas
saderību

✗ Tumša preparētā zoba krāsa
ar HT krāsu iegūs zemu vērtību,
pelēcīgu nokrāsu

initial[™]
LiSi Block

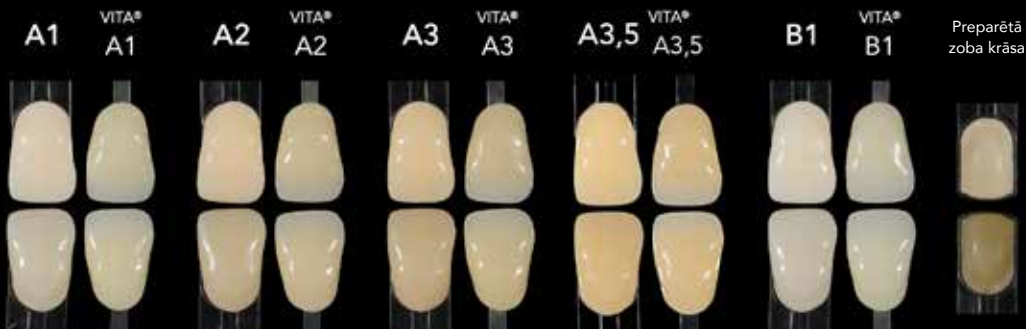

✗ Normāla preparētā zoba krāsa
ar LT krāsu nodrošina augstu
vērtību, baltāku krāsu

✓ Tumša preparētā zoba krāsa
ar LT krāsu nodrošina labu krāsas
saderību**

A1 VITA® A1 A2 VITA® A2 A3 VITA® A3 A3,5 VITA® A3,5 B1 VITA® B1

* Krāsu paraugi šajā kartē ir populēti un nav glazēti. VITA® ir VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. reģistrēta preču zīme.

**Stipri pārkrāsoti zobi vispirms ir jānomaskē vai cementējot jāizmanto ļoti opakains cements.

Padomi optimālai krāsas iegūšanai

initial[™]
LiSi Block

Restaurāciju pirms pielaikošanas nopolējiet

Pirms restaurācijas pielaikošanas nopolējiet to, lai virsmas negludums neietekmē gaismas transmisiju.

Pielaikojiet , izmantojot pielaikošanas pastas

Pielaikojiet, izmantojot optisko savienojumu ar preparēto zobu- pielaikošanas pastas vai glicerīna gēlu. Sausā pielaikošana nav piemērota, jo gaiss neveda gaismu, kā rezultātā krāsa ir redzama gaišāka nekā tā būs pēc cementēšanas.

Krāsa var mainīties, ja izmantoti pigmenti vai glazūra

Ja restaurācija ir glazēta, tās krāsa, atkarībā no izmantotiem pigmentiem un glazūras, var atšķirties no oriģinālās krāsas.



Balinātā krāsa

Izmantojiet Initial LiSi Block Bleach krāsu, ja nepieciešams izteikts balināšanas efekts vai arī kā bāzi vēlākai mikroslāņošanai ar Initial IQ ONE SQIN sistēmu.



Pielaikošana ar caurspīdīgu pielaikošanas pastu

Sausā pielaikošana, bez pielaikošanas pastas



Preparētā zoba krāsa

Initial LiSi Block lejupielādes

Lai iegūtu papildus informāciju, tostarp preparēšanas vadlīnijas, pulēšanas ieteikumus, krāsošanas un cementēšanas protokolus, noskenējiet QR.kodu.

