

Initial LiSi Block™ CEREC SpeedFire -ohjeet vaihe vaiheelta



MAALAUUS Initial Lustre Pastes ONE -tuotteilla



Skannaa preparointi ja suunnittele työ.



Aseta Initial LiSi Block jyrsimeen.



Jyrsi LiSi Blockista restauraatioksi.



Maalaa Lustre Pastes ONE NFL-pastoilla saadaksesi kiiltoa ja läpikuultavuutta.



Maalaa Lustre Pastes ONE A-sävyllä kromaattisuuden saavuttamiseksi. Mitä näet sen saat!



Täytä työ Firing Foam:lla ja laita se pidikkeeseen. Aseta työ keskelle SpeedFire-levyä.



Valitse ohjelmaksi Initial LiSi Block. Valitse näytöstä niin monta yksikköä kuin haluat polttaa (enintään 2).



Valitse ohjelmasta vaihtoehto "Glazing" (Kiiltopoltto).



Huomaa lopetus aika ja aloita painamalla sinistä nuolta.



Työsi on alle 12 minuutissa VALMIS!

Luvan antaja: tri Gertrud Fabel, Saksa

*Initial on GC Corporationin rekisteröimä tavaramerkki
Huomaathan: Initial IQ ONE SQIN -mikrokerroskeramiikkaa ei voi polttaa SpeedFire-uunissa

Skannaa kaikkien vaiheiden ohjeet



Initial LiSi Block™

SpeedFiren käyttöön liittyviä vinkkejä



Kun käytät SpeedFire uunia (Dentsply Sirona) Initial LiSi Blockin polttamiseen, muista seuraavat seikat:

- Älä käytä SpeedFire Glaze -suihketta, joten jos se mainitaan ohjelmassa, jätä se huomiotta.
- Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi restauroitioihin saa käyttää maalausmateriaalia vain GC:n tuotevalikoimasta (Initial Lustre Pastes ONE, Initial Spectrum Stains). Jos Initial LiSi Block -ohjelmaan valitaan eri maalausmateriaali, erilaiset polttoarvot vaikuttavat paikan esteettiseen lopputulokseen.
- LiSi Block -täytteiden enimmäismäärä polttosykliä kohden saa olla enintään 2.
- Valitse oikea läpikuultavuus käytettävälle sävyllle.
- Älä käytä muita alustoja ja nastoja Glaze Supports (Dentsply Sirona) -tukien lisäksi.



Lisätietoja saat SpeedFiren (Dentsply Sirona) käyttöohjeista. Tutustu lisäksi Initial LiSi Blockin tekniseen käsikirjaan.

Skannaa koko tekninen käsikirja

