

Initial LiSi Block™

Instructions étape par étape pour utiliser le four dentaire CEREC SpeedFire



MAQUILLAGE avec Initial Lustre Pastes ONE



Scannez la préparation et concevez votre restauration.



Placez Initial LiSi Block dans le dispositif de fraisage.



Fraisez votre restauration Initial LiSi Block.



Maquillez avec Lustre Pastes ONE NFL pour obtenir le degré de brillance et de fluorescence souhaité.



Maquillez avec la teinte A Lustre Pastes ONE pour plus d'intensité. Vous obtenez un résultat identique à ce que vous voyez !



Prenez une broche et la céramique Firing Foam et positionnez la restauration sur le plateau central du four SpeedFire.



Sélectionnez le programme Initial LiSi Block. Choisissez à l'écran toutes les unités que vous souhaitez cuire (2 maxi.).



Sélectionnez l'option « Glazing » (glaçage) dans le logiciel.



Notez l'heure de fin et appuyez sur la flèche bleue pour commencer.



En moins de 12 minutes, votre restauration est PRÊTE !

Avec l'aimable autorisation de la Dre Gertrud Fabel, Allemagne

*Initial est une marque commerciale déposée par GC Corporation
Remarque : la céramique en microcouche Initial IQ ONE SQIN ne peut pas être cuite dans le four SpeedFire

Scanner pour
un maquillage
étape par étape



Initial LiSi Block™

Trucs et astuces pour travailler avec SpeedFire

Attention, quand vous utilisez le four SpeedFire (Dentsply Sirona) pour cuire Initial LiSi Block :

- N'utilisez pas le spray SpeedFire Glaze, même si le programme le mentionne (veuillez ignorer cette option).
- Pour obtenir les meilleurs résultats sur vos restaurations, utilisez exclusivement un matériau de maquillage de la gamme de produits GC (Initial Lustre Pastes ONE, Initial Spectrum Stains). Si vous choisissez un matériau de maquillage différent pour le programme Initial LiSi Block, cela aura un impact sur le résultat esthétique de votre restauration, en raison des différences de paramètres de cuisson.
- Ne dépassez jamais deux restaurations Initial LiSi Block par cycle de cuisson.
- Lors de la conception, veuillez sélectionner la bonne translucidité de la teinte à utiliser.
- Utilisez exclusivement des plateaux et broches Glaze Supports (Dentsply Sirona).

Pour plus d'informations, veuillez lire le mode d'emploi du four SpeedFire (Dentsply Sirona) et consulter le manuel technique Initial LiSi Block



*Scanner pour obtenir
le manuel technique
complet* →

