


# Одна система - Два подхода:

## Базовое комбинирование

Для получения оттенка, соответствующего шкале Vita® Classic, за 2 минуты


**Базовые оттенки:** простейший способ получить оттенок, соответствующий шкале Vitapan® Classic

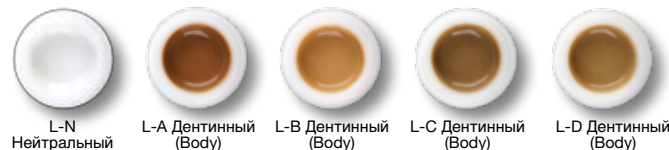

L-N Нейтральный L-A Дентинный (Body) L-B Дентинный (Body) L-C Дентинный (Body) L-D Дентинный (Body)

## Дополнительные оттенки: откройте в себе художника

Произведите индивидуализацию изготовленных коронок и мостовидных протезов - нанесите на них области меловых пятен, декальцинации, линии растрескивания эмали и прочие детали. Пасты Lustre Pastes NF можно использовать даже для характеристики искусственных фарфоровых зубов.

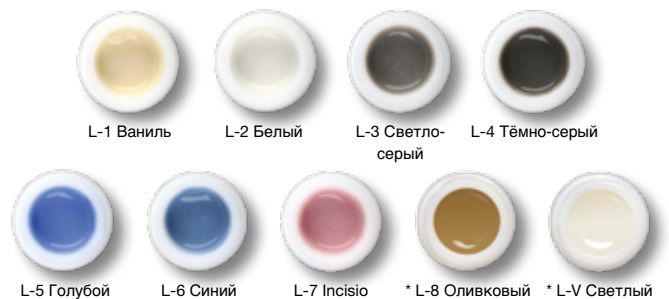

L-1 Ваниль L-2 Белый L-3 Светло-серый L-4 Тёмно-серый L-5 Голубой L-6 Синий L-7 Incisio \* L-8 Оливковый \* L-V Светлый

Благодаря высокой флуоресценции эти оттенки обеспечивают максимально естественный вид реставрации.


## Технические характеристики

- 'GC.'** Всего один набор совместим со всеми системами керамики GC Initial
- 'GC.'** Широкий диапазон КТР - от 6.9 до 13.3, для работы практически со всеми типами керамики
- 'GC.'** Пасты с улучшенными тиксотропными свойствами, которые наносятся легко и точно
- 'GC.'** Выпускаются в баночках готовыми к применению - просто и удобно
- 'GC.'** Разбавитель и Восстановитель помогают поддерживать оптимальную консистенцию паст в течение длительного срока

\* Добавлены 2 дополнительных оттенка: Оливковый, для воспроизведения эффектов в зелёном спектре, и Светлый, для коррекции светлоты

# Оптимальные параметры КТР паст GC Initial IQ - Lustre Pastes NF

КТР

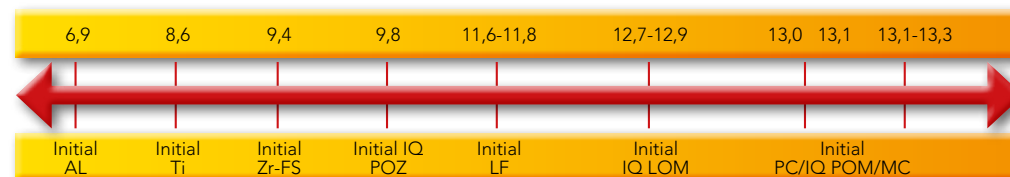

Набор паст GC Initial IQ -  
Lustre Pastes NF

## Упаковка

Содержание набора:

- 1 x Нейтральный (4 г),
- 1 x Светлый (4 г),
- 4 x Дентинных (Body) оттенка (4 x 4 г),
- 8 x Оттенков эмалевых эффектов (8 x 4 г),
- Разбавитель (Diluting Liquid) (8 мл),
- Восстановитель (Refreshing Liquid) (8 мл),
- 1 палитра для замешивания,
- 2 кисти,
- 1 стеклянный шпатель для замешивания,
- Иллюстрированная инструкция



\*Vita является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.  
Иллюстрации предоставлены: Michael Brüsch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germany

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Russia  
129626 г. Москва  
Кулаков переулок, д. 13,  
офис 316  
Тел. /926/ 007-21-31  
info@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

Создайте свой мир  
с Initial от GC.

Полная керамическая система для любых современных показаний.

# Нарисуйте свою эстетику



Универсальные 3-мерные пастообразные красители, разработанные для придания глубокого цвета и естественной светопрозрачности конструкциям при работе со всеми системами керамики Initial.

**Initial IQ -  
Lustre Pastes NF**  
от GC.

**'GC.'**

**'GC.'**

z L LF RU 7 55 04/10

# Одна паста, МНОЖЕСТВО возможностей

Пасты для глянца Lustre Pastes NF - это 3-мерные керамические красители, разработанные для придания глубокого цвета и естественной светопрозрачности конструкциям при работе со всеми системами керамики GC Initial.

Хотя Lustre Pastes NF были первоначально разработаны для систем Initial IQ Press-over и Layering, их можно использовать также и со всеми остальными системами керамики GC Initial, поскольку они совместимы с керамикой как с "высоким", так и с "низким" КТР.

Пасты Lustre Pastes NF выпускаются готовыми к применению и расфасованными в баночки; оптимальная консистенция паст всегда гарантирована благодаря наличию в наборе специальных жидкостей - разбавителя и восстановителя.

Lustre Pastes NF состоят из мельчайших керамических частиц, благодаря чему их можно наносить более толстым слоем, а это, в свою очередь, обеспечивает непревзойденную естественность и натуральный блеск изготовленных реставраций.

**Хотите работать быстро и сконцентрироваться на моделировании тела коронки с помощью Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal?** Используя пасты Lustre Pastes NF, Вы можете произвести характеристику работы всего за 2 минуты.

**Вам отлично удается моделирование воском мостовидных протезов?** Используйте системы для работы методом прессования, Initial IQ - One Body, Press-over-Metal или Press-over-Zircon, для создания коронки или мостовидного протеза. Произвести характеристику работы с помощью паст Lustre Pastes NF Вы можете и на более позднем этапе.

**Вы предпочитаете послойно моделировать коронки и мостовидные протезы, следуя традиционным методам?**

При необходимости Вы можете воспользоваться пастами Lustre Pastes NF позднее, чтобы изменить цвет, светлоту или насыщенность серых оттенков Вашей работы - вместо того, чтобы с нуля послойно моделировать новую коронку.

# Великолепное завершение Ваших работ

Независимо от того, какую керамическую систему Вы выбрали для работы - GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal, Press-over-Zircon или Layering-over-Metal - завершающие этапы моделирования коронок и мостовидных протезов, включающие использование паст GC Initial - Lustre Pastes NF будут одинаковыми.

**Press-over-Metal**      **Press-over-Zircon**      **Layering-over-Metal**

Перед нанесением слоя паст Lustre Pastes NF производится окончательная обработка и оконтуривание реставрации с помощью соответствующих мелкозернистых алмазных боров, а также предварительная полировка керамической полировочной пастой.

Затем коронки и мостовидные протезы подвергаются пескоструйной обработке оксидом алюминия с размером частиц 50 микрон под давлением 1,5 бар.

Паста наносится более толстым слоем, чем обычно наносится материалы для глазури обжига.

После пескоструйной обработки на всю подготовленную поверхность реставрации наносится паста Lustre Pastes NF Нейтральный.

Требуемый оттенок по шкале Vitapan Classic® достигается путём нанесения паст Lustre Pastes NF оттенков "Дентинный (Body) A-D". Этот процесс занимает всего лишь 2 минуты, и их достаточно, чтобы добиться полного соответствия выбранного оттенка шкале Vitapan Classic®. Для получения более эстетичных результатов и воспроизведения деталей используйте остальные имеющиеся оттенки паст.

GC Initial IQ - Lustre Pastes NF "Разбавитель":

Разбавитель - это специальная жидкость, позволяющая получить необходимую для нанесения пастоподобную консистенцию материала.

GC Initial IQ - Lustre Pastes NF "Восстановитель":

Восстановитель используется для сохранения тиксотропических свойств паст. С помощью этой жидкости пересохшим пастам возвращается оптимальная гелеобразная консистенция, при этом не происходит изменения физических свойств пасты.

**Основа**      **LP Нейтральный**      **Цвет**      **LP Светлый, L3, LA**

**Насыщенность серого**

С помощью паст Lustre Pastes NF Вы можете легко модифицировать керамические коронки и мостовидные протезы, изготовленные традиционными методами. Теперь поменять светлоту, насыщенность и цвет работы - проще простого!

**Реставрация после пескоструйной обработки**      **Моделирование по технике Cut back**      **Нанесение Lustre Pastes**

**Окончательный вид реставрации**

**Окончательный вид**

**C-LF**      **Опаловые/резцовые массы**

