



Creați-vă propriul univers cu **Initial** de la **GC.**



Sistemul ceramic total fizionomic indicat în orice situație clinică

Nuanțe pentru dinți albiți - Bleach Shades

**GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr**



initial

www.gcinitial.gceurope.com

Sistemul GC Initial este o linie de 6 ceramici speciale ce pot fi utilizate pentru a obține restaurări metalo-ceramice și integral ceramice în orice situație clinică, indiferent de procesul de fabricare sau substratul utilizat. Pentru mai multe informații consultați broșura.

Pentru a extinde sistemul unic de nuanțe armonizate ale GC Initial și pentru a fi în ton cu tendințele spre culori foarte deschise, GC a introdus nuanțele GC Initial pentru dinți albiți - GC Initial Bleach Shades, un set unic de culori care permite obținerea celor mai deschise nuanțe indiferent de tipul de restaurare ceramică utilizat.



GC

GC Initial Bleach Shades

Cum să utilizați GC Initial Bleach Shades

Smalțul natural reacționează diferențiat la tratamentele de albire, astfel încât o evaluare a translučenței ar trebui făcută la 6 săptămâni de la finalizarea albirii pentru a fi siguri de stabilitatea culorii. GC Initial Bleach Shades au fost special create pentru a fi utilizate cu cele 5 sisteme ceramice GC Initial (vezi tabelul de mai jos). De notat este faptul că în cazul restaurărilor estetice (de culoarea dintelui), stratul de dentină opacă trebuie aplicat doar în cazul în care este posibilă obținerea unei grosimi minime a stratului ce permite respectarea nuanței originale a dintelui.

Un sistem modular

GC Initial Bleach Shades sunt parte a unui sistem ceramic modular GC Initial și sunt disponibile și ca seturi separate. Fiecare set GC Initial Bleach Shades conține diferite componente și combinându-le se pot obține restaurări deosebit de estetice.

Pentru informații detaliate despre diferitele combinații vă rugăm consultați broșura.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opac Liner Modificarea structurii metalice	OM-1 Pulbere opacă pentru a masca componentele metalice și poate fi utilizată singură sau în combinație cu opacifianți standard	BL-Lin Liner pentru schelet din oxid de aluminiu. Are un grad crescut de fluorescență și umectabilitate crescută pentru o aplicare ușoară.	BL-FM Modifică componenta metalică pentru scheletul din oxid de zirconiu. Are un grad crescut de fluorescență și umectabilitate crescută pentru o aplicare ușoară
Dentină	BLD - 1 Bleach dentin light (mai albă decât culoarea clasică A1 din cheia Vita).		
	BLD - 2 Bleach dentin white (mai alb decât culoarea clasică B1 din cheia Vita).		
	BLD - 3 Bleach dentin X-white, alb extrem.		
	FD-91 Alb, dentină opacă înalt fluorescentă. Pentru a împiedica reflexia luminii de către straturile subiacente / aplicare în straturi succesive. Este indicată pentru structuri lobulare alb strălucitoare.		
Smalț	BL-E Nuanță standard de smalț. Bază albă luminoasă cu un nivel mediu de translučență.		
	EOP-1 Smalț foarte strălucitor, intens opalescent cu efect de alb-rece. O culoare frecvent apărută după tratamente de albire repetate și / sau intensive.		
Lichide	Lichid de modelare 2 x 25 ml		
	Lichid opac 1 x 25 ml		
Pentru individualizarea culorii, Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 pot fi amestecate cu toate tipurile de pulberi. Pentru sistemul asortat GC Initial, mai jos câteva recomandări. Sunt disponibile în toate tipurile de sisteme ceramice GC Initial ca refuluri sau ca parte a seturilor modulare.			
ODM1	Dentină opacă albă		
EOP-2	milky white Opal Enamel - smalț opalescent alb lăptos		
EOP-3	light bluish Opal Enamel - smalț opalescent albastrui deschis		
EOP-4	light grey Opal Enamel - smalț opalescent gri deschis		
EO-15/16	yellowish white Opaque Enamel - smalț opac alb gălbui		
TO	opalescent Translucent Ceramic - ceramică translucentă opalescentă		
CLF	fluorescent Translucent Ceramic - ceramică translucentă fluorescentă		
ST-30	white, Translucent Shoulder Material - material translucid, alb pentru prag		
SO-37	white, Opaque Shoulder Material - material pentru prag alb, opac		
Toate nuanțele pentru dinți albiți sunt disponibile în flacoane de 20 de g.			

GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

East European Office - Romania
BD. N. Balcescu no.33B
Ap. 52, floor V, sect.1
Bucuresti, Romania
Tel. +40.21.31.44.339
Fax. +40.21.31.44.339
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com