



LABORATÓRIUMI MUNKAFOLYAMAT

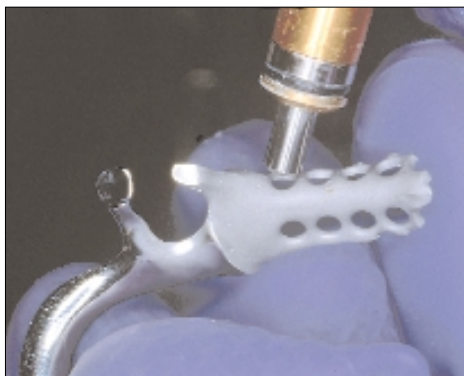

1. A fémfelület homokfúvása.



2. A GC Metalprimer II felvitele a polír-kefével letisztított fémfelületre. Hagyjuk megszáradni (néhány másodperc).

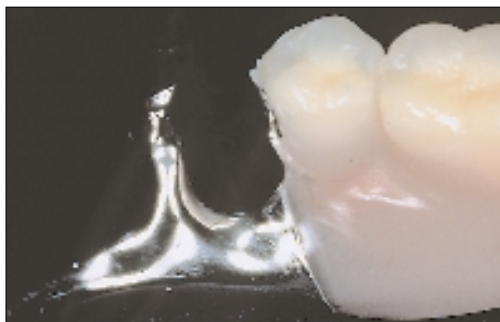

3. Vigyük fel a műanyag réteget (vagy az opáker réteget).

AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI

A GC Metalprimer II KÖTÉSI EREJE (MPa)

nem nemesfém (Ni-Cr-Mo fémkerámia ötvözet)	48
nem nemesfém (Co-Cr-Mo ötvözet)	44
fél-nemesfém (Au-Ag ötvözet)	30
nemesfém (Au ötvözet)	33

KISZERELÉS



● 5 ml-es flakon, ecsettel

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14
E-mail: info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.
East European Office
Aleja Pomoraca 19
10020 Zagreb, Croatia
Tel. +385.1.46.77.251
Fax +385.1.46.77.251
E-mail: info@eoo.gceurope.com
<http://eoo.gceurope.com>

GC
FIRST IS QUALITY

GC Metalprimer II

AKRILÁTOKAT FÉMHEZ RAGASZTÓ ANYAG



FORRADALOM A RAGASZTÁSBAN

A GC Metalprimer II tartós kötést létesít a kompozíciós leplező anyagok és a fémek között szélmenti résképződés nélkül.

- Könnyen és gyorsan polírozható
- Nem igényel különösebb műszerezettséget
- Megbízható tapadás
- Nincs zárási hiba
- Nedvességnek ellenálló
- Nincs hőtermelődé
- Szájban történő javítások céljára, kofferdam használata mellett
- Használható minden fajta fogászati ötvözethez és műanyaghoz

Code z L L F HU 8 30 - 04/00

GC Metalprimer II - A TERMÉK ELŐNYEIRŐL RÖVIDEN

A **GC Metalprimer II** egy forradalmian új készítmény, mely egy fémragasztó monomert tartalmaz (MEPS: tiofoszfor-metakrilát). A monomer erős kötést létesít a műanyag és minden fém között anélkül, hogy kezelni kellene a fémek felületét ónbevonattal vagy oxidálással. A **GC Metalprimer II** hatalmas marginális gátként jellemezhető, így széles skálájú alkalmazást tesz lehetővé. Ennek eredményeképpen készülhetnek olyan kiváló protézisek, amelyek nem fognak befertőződni, amelyen nem lesznek zárási hibák és anyagelválás a fém és a műanyag között.


Tapadása erős

A **GC Metalprimer II** egy fémragasztó monomert tartalmaz (MEPS: tiofoszfor-metakrilát). Ez erőteljesen reagál minden fémmel, és kopolimerizátumot alkot a műanyagokkal is. Ez eredményezi a fém és a műanyag közti erős kötést.

Használata könnyű, előkezelésre nincs szükség

A **GC Metalprimer II** nem igényli a komplikált ónbevonatos vagy oxidációs előkezelést a fémfelületen. A primer alig egy rétege könnyen felvihető az alumínium szemcsés homokfúvóval kezelt fémfelületre.

Klinikai kísérletek igazolják, hogy a **GC Metalprimer II** nagymértékben javítja a fém / műanyag kötéseket és fokozza a kötés stabilitását nedves környezetben.

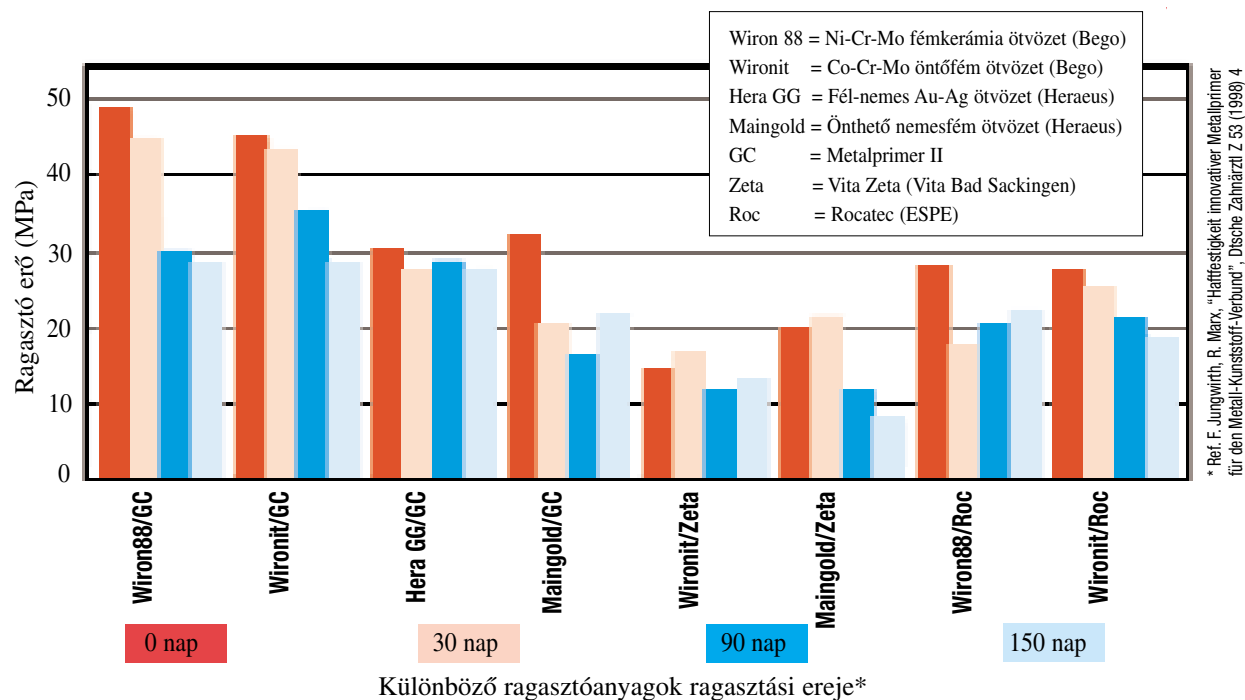

Azáltal, hogy nedvességtűrő és hidegen használható, a **GC Metalprimer II** a lepattant lepezések szájon



belüli direkt javításának és a Maryland hidak kompozíciós cementtel való beragasztásának ideális ragasztóanyaga.

INDIKÁCIÓI

- Kemény műanyaggal lepezett fém koronák esetében opálos anyag beragasztására
- A fogsor műanyag alaplemeznék a fémlemezhez, kapcsolokhoz, finommechanikai rögzítő eszközökhöz, mágneses rögzítő eszközökhöz történő ragasztására
- Fogsor javítás (műanyag ragasztása a fémlemezhez, kapcsolokhoz, stb.)
- Fogszabályzásban a műanyagok ragasztása a bracketekhez illetve az ívek fémjéhez