

## LABORATORIJSKI POSTOPEK



1. Peskanje kovinske površine.



2. Nanesite **GC Metalprimer II** na čisto kovinsko površino s čopičem. Pustite da se posuši (nekaj sekund).



3. Nanesite akrilat (ali sloj opakra).

## LASTNOSTI PROIZVODA

### VEZNA MOČ (MPa) GC Metalprimer-ja II

ne-žlahtne (Ni-Cr-Mo zlitine za keramiko)	48
ne-žlahtne (Co-Cr-Mo zlitine za wisil)	44
pol-žlahtne (Au-Ag zlitine)	30
žlahtne (Au zlitine)	33

## PAKIRANJE



- 5 ml steklenička s čopičem

Code z L LF SE 8 30 - 02/01

### GC EUROPE N.V. Head Office

Interleuvenlaan 13  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.39.80.50  
Fax + 32.16.40.02.14  
E-mail: [info@gceurope.com](mailto:info@gceurope.com)  
<http://www.gceurope.com>

### GC EUROPE N.V. East European Office - Slovenia

Heroja Staneta 6  
3310 Žalec, Slovenia  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax +386.3.710.32.71  
E-mail: [slovenia@eoe.gceurope.com](mailto:slovenia@eoe.gceurope.com)  
[www.eoe.gceurope.com](http://www.eoe.gceurope.com)

• Prodent Dental Medical, Jurčkova pot 69, 1000 Ljubljana, Tel. (01) 42 74 356; Fax. (01) 42 77 425 • [prodent@siol.net](mailto:prodent@siol.net)  
• KT-PREZENT, Celovška 136, 1000 Ljubljana, Tel. (01) 515 26 50; Fax. (01) 505 6781

**GC**  
FIRST IS QUALITY

# GC Metalprimer II

ADHEZIV ZA LEPLJENJE ZOBNIH AKRILATOV S KOVINO



ADHEZIVNA REVOLUCIJA

GC Metalprimer II proizvaja dolgotrajno vez med kompozitno faseto in kovinsko strukturo, brez robne razpoke.

- Enostavna, hitra tehnika
- Ni potrebna posebna oprema
- Zanesljiva adhezija
- Brez razpok
- Odporen na vlago
- Ne ustvarja toplote
- Primeren za popravke v ustih pod zaščitno gumo (koferdamom)
- Lahko se uporablja z vsemi zobnimi zlitinami in akrilati

## GC Metalprimer II - POGLED NA PREDNOSTI PROIZVODA

Klinični poskusi dokazujejo, da **GC Metalprimer II** zelo izboljša moč vezi med kovino in akrilatom ter poveča njeno stabilnost v vlažnem okolju.


**GC Metalprimer II** je revolucionaren primer, ki vsebuje kovinski adhezivni monomer (MEPS: thiophosphoric methacrylate). Ta monomer zagotavlja močno vez med akrilatom in vsemi kovinami, brez obdelave kovinske površine s cinkanjem ali oksidacijo. **GC Metalprimer II** predstavlja odlično robne zapore in dopušča široko vrsto uporab. To se kaže v izdelavi odličnih protez, ki ne bodo inficirane z bakterijami, robni zapori in povezavi med kovino in akrilatom.

### Močna adhezija

**GC Metalprimer II** vsebuje kovinski monomer (MEPS: thiophosphoric methacrylate). Ta medsebojno močno vpliva na kovine in tudi ko-polimerizira z akrilatom. To se kaže v trdni vezi med kovino in akrilatom.

### Enostavno delo brez pred postopka

**GC Metalprimer II** ne zahteva zapletenega pred postopka kovinske površine s cinkanjem ali oksidacijo. Je enostaven za nanašanje v samo enem sloju primerja na površino kovine peskane z aluminijevem oksidom.

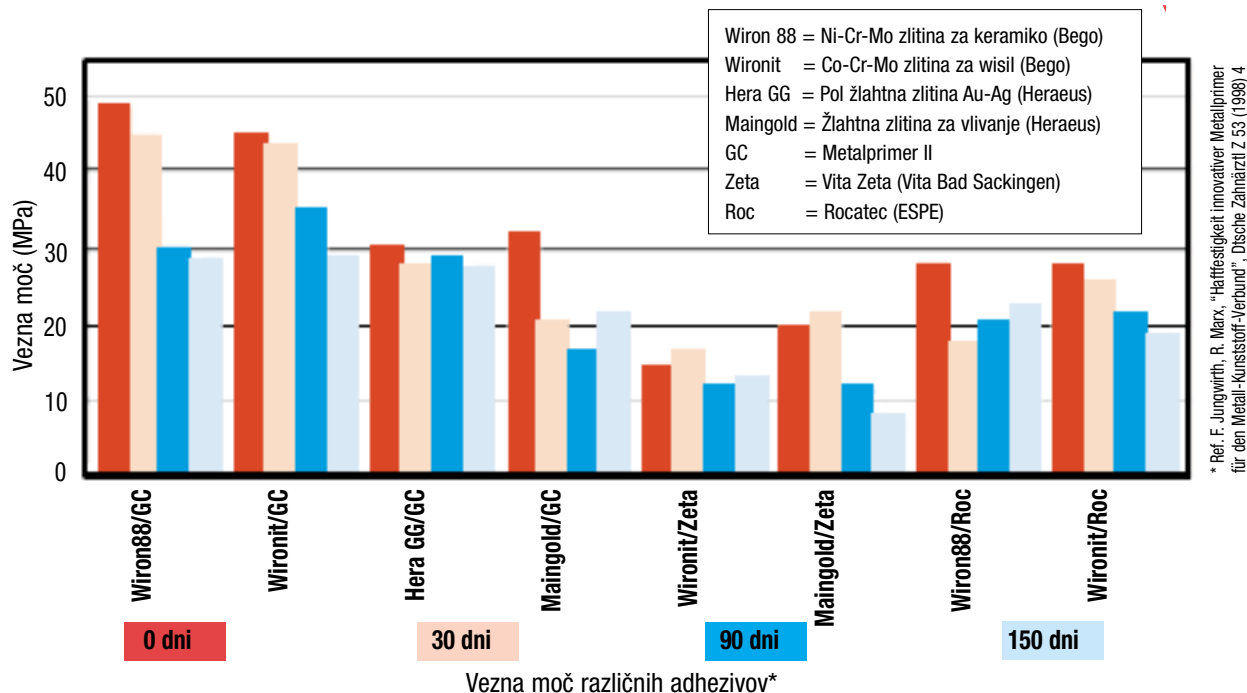

Prav zaradi njegove odpornosti na vlago in metode hladne izvedbe, je **GC Metalprimer II** idealen adheziv



za popravilo prevlek direktno v ustih ali za vezavo kompozitnih cementov z Maryland mostički.

### INDIKACIJA

- Vezni opakni material za kovinski ogrodni del proteze za trde akrilatne prevleke in krone
- Vezanje akrilatne baze proteze s kovinsko bazo, zaponko, etečmentom in magnetnim etečmentom
- Popravilo proteze (vezava akrilata s kovinsko bazo, zaponko, itd.)
- Vezavo ortodontskega akrilata s kovinskim ortodontskim breketom, ortodontsko žico