

Izbeljivanje zuba sa diskoloracijama

Beljenje zuba, poznato kao izbeljivanje, danas je opšte prihvaćeno kao način kozmetičkog poboljšanja boje zuba. Nažalost, ova vrsta tretmana ima određene nedostatke.

Zašto se izbeljuju zubi?

Životne navike poput pušenja, konzumiranja vina ili kafe te biološki faktori poput starenja zuba mogu potamniti zube. **Za lepši osmeh** mnogi biraju izbeljivanje zuba.

Koji su problemi povezani sa izbeljivanjem zuba?

Izbeljivanje će posvetliti boju zuba, ali može takođe da demineralizuje zube. To znači da se tokom procesa izbeljivanja neki minerali skidaju iz spoljašnjeg sloja zubne površine, što može da izazove **preosetljivost**. Javlja se osećaj osetljivosti na toplu ili hladna pića ili hranu, što može biti vrlo neugodno kroz duže vreme.

Kako pomažu Tooth Mousse ili MI Paste Plus?

Tooth Mousse i **MI Paste Plus** izrađeni su od prirodnog mlečnog proteina koji remineralizuje zube, vraćajući minerale u zube. To znači da se jača gleđ i zube čini manje osetljivim.

Taj je učinak moguć, jer **Tooth Mousse** i **MI Paste Plus** sadrže aktivni sastojak pod nazivom RECALDENT™, posebni prirodni sastojak koji veže kalcijum i fosfat za zubnu površinu kako bi obnovio i ojačao zube.



Tretman belih mrlja ili lezija



Bele mrlje na zubima mogu pokvariti osmeh. Možda čak želite da sakrijete zube pri osmehu.

Šta su bele mrlje?

Bele mrlje su vidljivi znakovi promene u spoljašnjem sastavu gleđi, koja se takođe naziva **dekalcifikacija** ili **demineralizacija**. U nekim je slučajevima to prvi znak zubnog karijesa. Glavni uzroci belih mrlja su: fluoroza, loša zubna higijena te hipomineralizacija gleđi.

Šta je fluoroza i može li oštetiti zube?

Uzrok fluoroze može biti **prekomerni unos fluorida**. To može biti posledica visoko fluoridirane vode, fluoridnih dodataka u kombinaciji sa trajnom upotrebom zubne paste sa fluoridima. Fizički izgled fluoroze vidljiv je na zubima u obliku malih, belih, neprozirnih tačkica.

Mogu li ortodontske bravice da izazovu bele mrlje?

Svako ko je nosio fiksni ortodontski aparat zna kako je teško održavati čistoću zuba, budući da se komadi hrane često zarobe oko žica. Kao rezultat toga stvara se plak, bakterijski fermenti, što izaziva smanjenje pH vrednosti u ustima te dovodi do **uništenja gleđi**. To izaziva stvaranje belih mrlja na zubima.

Šta je hipomineralizacija gleđi i kako deluje na zube?

Do hipomineralizacije gleđi dolazi kada postoje **promene u ćelijama koje stvaraju zubnu gleđ** u ranom detinjstvu. Ako se poremeti aktivnost tih ćelija, trajni zubi koji izniknu verovatno će imati bele mrlje.


Kako bi se rešio problem belih mrlja, stomatolog može preporučiti svakodnevni program oralne higijene koji uključuje upotrebu **Tooth Mousse** ili **MI Paste Plus**.

Kisela pića

Cosmetic

Uzroci demineralizacije zubnog tkiva, poznate kao zubne erozije, mogu biti:

1. Smanjeni tok sline
2. Unutarnji čimbenici (gastrointestinalne bolesti)
3. Vanjski čimbenici (kisela pića poput voćnih sokova ili napitaka)

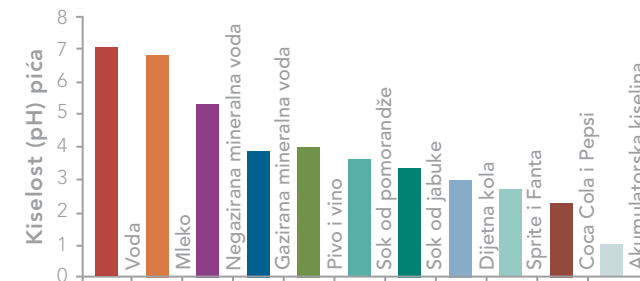

Zašto bezalkoholna pića izazivaju eroziju zuba te može li konzumiranje bezalkoholnih pića da izazove karijes?

Bezalkoholna pića sadrže **visok nivo kiseline (H⁺)** (i šećera) koja smanjuje pH u oralnom okruženju. To može izazvati eroziju zuba pri čemu je zubna gleđ oslabljena. Iz zuba se oslobađaju kalcijum (Ca²⁺) i fosfat (PO₄³⁻).

Kisela pića, poput gaziranih pića, voćnih sokova, energetskih pića i pića za sportiste, mogu oslabiti strukturu gleđi i ubrzati **trošenje zuba** te povećati rizik od nastajanja kaviteta i osetljivosti.

Tooth Mousse i **MI Paste Plus** poboljšavaju otpornost zuba na kiselinu remineralizacijom oslabljenih zuba.



Poznato je da izgled zuba utiče na ukupnu lepotu.

Zato se mnogi odlučuju na kozmetičke tretmane kao što su izbeljivanje i ortodoncija. Ti zahvati poboljšavaju osmeh, no nažalost imaju ograničenja. Npr. bele mrlje, preosetljivost, erodirana gled.

Kako bi rešila problem navedenih 'nuspojava', firma **GC** razvila je proizvode **Tooth Mousse** i **MI Paste Plus**; dve paste za učvršćivanje zuba, raspoložive u pet prijatnih ukusa...

U tablici su navedene indikacije za **Tooth Mousse** i **MI Paste Plus**:

Upotreba Tooth Mousse i MI Paste Plus :	Specifične indikacije za Tooth Mousse za pacijente:	Specifične indikacije za MI Paste Plus za pacijente:
Za desenzibilizaciju zuba	Koji imaju nizak do srednji rizik od karijesa	Koji trebaju dodatnu zaštitu zbog srednje ili visoke podložnosti karijesu
Za sprečavanje i zastavljanje početnog karijesa	Koji su mlađi od šest godina	Koji imaju kiselo oralno okruženje
Na lezijama bele mrlje	Koji će se podvrgi izbeljivanju zuba ili su izbelili zube	Koji imaju eroziju i želučani refluks
Tokom i/ili posle ortodontske terapije		Koji trebaju pomoć zbog vrlo loše kontrole plaka
Za trudnice		
Kao dodatna zaštita za zube		

Kada i kako koristiti **Tooth Mousse** i **MI Paste Plus**?

Obe su paste idealne za kućnu upotrebu. Jednostavno se nanose na sve zahvaćene ili visokorizične površine posle pranja zuba te neposredno pre odlaska na počinak.

Osmeh sa samopouzdanjem!

Tooth Mousse i **MI Paste Plus** dva su proizvoda iz **GC** svetski poznate palete proizvoda za minimalnu intervenciju, koji pomažu u otklanjanju osetljivosti zuba, bele mrlje i zubnu eroziju, stanja koja su često povezana sa kozmetičkim zahvatima kao što su izbeljivanje zuba i ortodontska terapija.



Od svog stomatologa zatražite dodatne informacije i savete vezano uz tačan izbor paste za zube. Pronađite omiljenu aromu između arome pepermint, vanile, mešanog voća, jagode i dinje te uživajte u ukusnom načinu jačanja zuba.



CPP-ACP razvijen je na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Melbourneu, Victoria / Australija. RECALDENT™ se koristi pod licencom RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP dobija se iz mlečnog kazeina i ne sme da se koristi kod pacijenta alergičnih na mlečne proteine i/ili hidrosibenzoate.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Serbia
Cvijičeva 82
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.20.88.033
Fax. +381.11.20.88.033
serbia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Kozmetička
stomatologija
osmeh čini
mnogo lepšim;
ne dozvolite da izbledi.

GC Tooth Mousse i **MI Paste Plus** pomažu otkloniti neprijatnost koja može da se javi posle kozmetičkog stomatološkog tretmana, kao što je npr. beljenje zuba. Takođe mogu pomoći u sprečavanju pojave belih mrlja na zubima, održavajući usta čistim i zdravim.



Deo GC programa
Minimalne intervencije.



z O LF RS 12 18 01/10

