


# MI Varnish претставува дел од стратегијата за **КОМПЛЕТЕН третман на Минимална Интервенција**

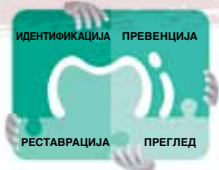

GC им ги нуди на стоматолозите сите неопходни алатки со кои ќе обезбедат континуирана грижа во минималната интервенција, со потполно прилагодени производи, почнувајќи од дијагностика до превенција и третман. Додека MI Varnish обезбедува високо ниво на заштита и ја намалува сензитивноста на забите во ординација, MI Paste пациентите може да ја користат како дополнителен третман во домашната грижа за забите, продолжувајќи го ефектот на реминерализација.



Во ординација



Во домашни услови

**Професионално нанесување** на MI Varnish на интервали, одредено според индикацијата и потребите на пациентот.

**Секојдневно нанесување** на Tooth Mousse или MI Paste Plus обезбедува континуирана реминерализација и заштита од кариес.

Recaldent™ се користи под лиценцата на Recaldent™ Pty. Limited. Recaldent™ CPP-ACP е дериват на млечниот казеин и не смее да се употребува кај пациенти кои имаат алергија на млечните протеини и/или на хидроксисензоати.

## Пакување

GC MI Varnish Интро пакување	
900727	GC MI Varnish Интро пакување, 10 поединечни дози GC MI Varnish (5 Јагода + 5 Нане), 0.50 ml во секоја поединечна доза и 20 четкички
GC MI Varnish Поединечно пакување, 35 поединечни дози, 0.50 ml во секоја поединечна доза и 50 четкички	
900728	Јагода
900729	Нане
GC MI Varnish Клиничко пакување, 100 поединечни дози, GC MI Varnish 0.50 ml во секоја поединечна доза и 100 четкички	
900730	Јагода
900731	Нане

GC MI Paste Plus			
900466	GC MI Paste Plus, Промотивно 5-Пакување Кутија со 5 туби, 40 g (35 ml) по туба, по 1 од секој вкус (Диња, Јагода, Тути-Фрути, Нане, Ванила)		
003310	GC MI Paste Plus, Асортиманско 10-пакување Кутија со 10 туби, 40 g (35 ml) по туба, по 2 од секој вкус (Јагода, Ванила, Тути-Фрути, Нане, Диња)		
GC MI Paste Plus, 10-Пакување Кутија со 10 туби од само еден вкус, 40 g (35 ml) по туба			
003311	Нане	003313	Диња
003312	Јагода	003314	Ванила
003315	Тути-Фрути		
GC Tooth Mousse			
900467	GC Tooth Mousse, Промотивно 5-Пакување Кутија со 5 туби, 40 g (35 ml) по туба, по 1 од секој вкус (Диња, Јагода, Тути-Фрути, Нане, Ванила)		
003299	GC Tooth Mousse, Асортиманско 10-пакување Кутија со 10 туби, 40 g (35 ml) по туба, по 2 од секој вкус (Диња, Јагода, Тути-Фрути, Нане, Ванила)		
GC Tooth Mousse, 10-Пакување Кутија со 10 туби од само еден вкус, 40 g (35 ml) по туба			
003301	Јагода	003303	Нане
003302	Диња	003304	Тути-Фрути
003300	Ванила		

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax. +385.1.46.78.473  
info@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

Овластен дистрибутер  
за Македонија:  
**ДЕНТОМЕД-М**  
Ул. "Бојмија" бр. 2/2  
Пошт. факс. 182  
1000 Скопје  
Тел./Факс: 02/24.62.739  
Тел. 02/24.64.781  
dentomed@t-home.mk

## Поддршка, дополнување и **ЗАШТИТА** со силата на четката



MI Varnish од GC дејствува на хиперсензитивните заби и обезбедува долготрајна заштита попријатно и поефикасно од било кога



# Поддршка, дополнување и заштита со силата на четката

GC го претставува MI Varnish, последното дополнување на вашиот дентален арсенал за минимална интервентна стоматологија. Обезбедувајќи супериорна покривност на забните површини, MI Varnish во основа прави повеќе во однос на вашиот вообичаен лак со флуориди.

Со ослободување на моќна доза на флуориди, MI Varnish испорачува и **дополнителен генерирачки ефект** на калциумови и фосфатни јони преку неговите **Recaldent™** патентирани состојки.


## Како делува MI Varnish

Благодарение на светски познатиот Recaldent™, MI Varnish им овозможува на пациентите почетна предност во заштитата од кариес.

### Без MI Varnish

Во киселата средина на устата калциумовите, фосфатните и хидроксилните јони се раствораат и се одвојуваат од забите. Тоа ќе предизвика забот да биде послаб и подложен на оштетување.


Плунка, кисела средина во усната шуплина

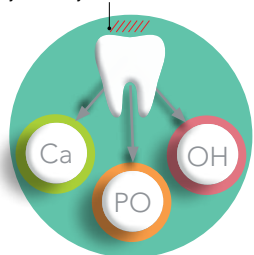

### Со MI Varnish

Флуорот, калциумот и фосфорот се комбинираат и формираат силен заштитен површински слој. Неутралниот рН фактор 6,6 ја зголемува киселинската резистенција на емајлот и ја оневозможува деминерализацијата.


Плунка, неутрална средина во усната шуплина

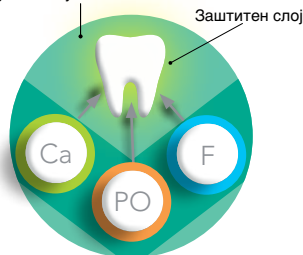

### Лак со депо-ефект

Во кисела средина, калциумот и флуоридите од површинскиот слој се раствораат. Како резултат на тоа, забите не се повеќе под директна опасност од киселините.

Плунка, кисела средина во усната шуплина

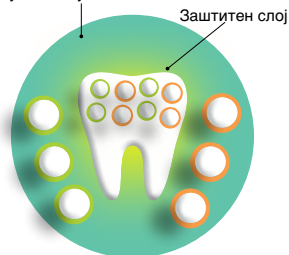

Флуоридните лакови може да заштитат од појава на хиперсензитивност во разни клинички ситуации:



Цервикални делови  
Извор: Prof. Ivana Miletić, Хрватска




После професионално механичко  
чистење на забите  
Извор: Prof. Ivana Miletić, Хрватска



Оклузална абразија  
Извор: José Zalba, Шпанија



MIH  
Извор: Patricia Gatón, Шпанија

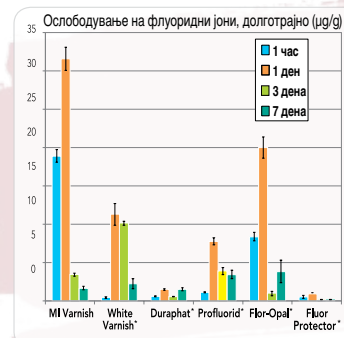

\* не е заштитна трговска марка на GC Europe



- MI Varnish навлегува во дентинските тубули и ги блокира, ослободувајќи ги забите од хиперсензитивност
- Високото почетно ослободување на флуориди ја намалува сензитивноста и го зајакнува емајлот



- ✓ Едноставна апликација без подготовка или профилакса
- ✓ Комфорна и брза процедура за неколку минути

- ✓ Добро адхерира за четкичката за апликација и лесно тече во тешко достапните места
- ✓ Ги покрива сите забни површини рамномерно и ефикасно



- ✓ MI Varnish почнува да дејствува во контакт со вода или плунка, без притоа да се згрутчува или да коагулира
- ✓ Со пријатна, кремаста конзистенција, комфорна мала дебелина на филмот, дури и при повеќе слоеви

- ✓ Достапен со 2 одлични вкуса, нане и јагода
- ✓ Со вкус кој е пријатен за пациентите



- ✓ Неутрална боја со природна транспарентност
- ✓ Кога е нанесен на забот не ја менува бојата

MI Varnish,  
постигнување на заеднички придобивки