

MI Varnish

zdravi preobčutljive zobe in daje povečano dolgotrajno zaščito, bolj pripraven in učinkovit kot kdajkoli prej

Podprite, obnovite
in zaščitite s
potegom čopiča



Podprite, obnovite in zaščitite s potegom čopiča

GC predstavlja MI Varnish, zadnji dodatek k vašemu orožju za minimalne posege v zobozdravstvu. MI Varnish ponuja vrhunsko prekritje zobnih površin, s čimer **naredi bistveno več** kot vaš povprečen fluoridni lak.

Z dodanim močnim odmerkom fluoridov, MI Varnish prinaša **dodan okrepljen učinek** kalcija in fosfatnih ionov preko svoje patentirane **RECALDENT™** sestavine.


Kako deluje MI Varnish

Zahvaljujoč svetovno znani RECALDENT™ MI Varnish nudi dodaten učinek pri zaščiti kariesa.

Brez MI Varnish

V kislem okolju ustne votline se kalcijevi, fosfatni in hidroksilni ioni raztapljajo z zob. To povzroči, da zob postane šibkejši in bolj občutljiv.


Slina, kislino okolje ustne votline

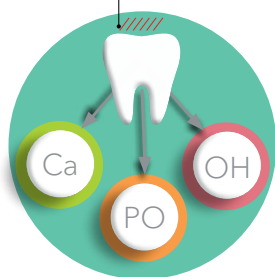

Z MI Varnish

Fluor, kalcij in fosfat so združeni in tvorijo močno zaščitno plast. Neutralni pH 6,6 poveča kislinsko odpornost in inhibira demineralizacijo.


Slina, nevtralnno okolje ustne votline

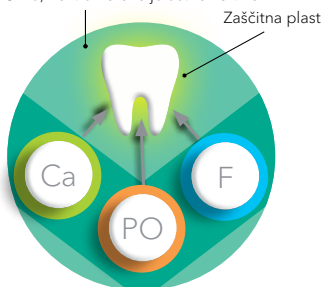

Premaz z učinkom depoja

V kislem okolju, se kalcij in fluorid raztapljata iz zaščitne plasti. Rezultat tega je, da zobje niso pod direktnim napadom kislin.

Slina, kislino okolje ustne votline

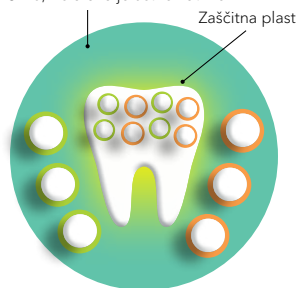

Fluoridni premazi lahko preprečijo preobčutljivost v raznolikih kliničnih primerih:



Vratni predeli
Vir: Prof. Ivana Miletić, Hrvaška




Po profesionalnem mehanskem
čiščenju zob
Vir: Prof. Ivana Miletić, Hrvaška



Obraba griznih ploskev
Vir: José Zalba, Španija



MIH
Vir: Patricia Gatón, Španija

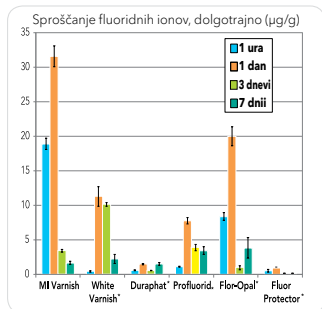

- MI Varnish prodre in blokira dentinske tubule, to daje olajšanje pred preobčutljivostjo zob
- Visoko začetno sproščanje fluoridov zminimalizira preobčutljivost in okrepi sklenino

* ni registrirana blagovna znamka GC Europe



- ✓ Enostaven nanos ne potrebuje preparacije ali profilakse
- ✓ Udoben in hiter postopek, ki je zaključen v minutah

- ✓ Hitro se oprime čopiča in preprosto izteče na težko dostopna mesta
- ✓ Enakomerno in učinkovito prekrije vse zobne površine



- ✓ MI Varnish se strdi ko pride v stik z vodo ali s slino, brez tvorbe grudic ali koaguliranja
- ✓ Prijetna kremna tekstura, udobna tanka plast, tudi pri nanosu v večih plasteh

- ✓ Na voljo v 2 prijetnih okusih meta in jagoda
- ✓ Prijeten okus za pacienta



- ✓ Neutralna barva z naravno prosojnostjo
- ✓ Ni spremembe barve ob nanosu na zob

MI Varnish, doseganje vzajemnih koristi

MI Varnish je del popolne strategije MI obravnave



GC ponuja zobozdravnikom potrebna orodja za upravljanje minimalno intervencijske nenehne oskrbe s celotno zbirko prilagojenih proizvodov, ki segajo od diagnostike do preprečevanje in zdravljenja. **Medtem ko MI Varnish zagotavlja visoko raven zaščite in manjšo občutljivost v ambulantni, se lahko MI Paste Plus uporablja kot nadaljevanje zdravljenja doma, s podaljšanjem remineralizacijskega učinka.**



V ambulantni

Strokoven nanos MI Varnish v intervalih, določenih z indikacijami in potrebami pacienta



Doma

Dnevna uporaba Tooth Mousse ali MI Paste Plus omogoča nenehno remineralizacijo in zaščito pred kariesom

RECALDENT™ in RECALDENT™ logo sta blagovni znamki družbe Mondelēz International group in se uporabljata pod licenco. RECALDENT™ je pridobljen iz mlečnega kazeina. Ne uporabljati pri osebah z alergijo na mleko. V primeru alergijske reakcije prenehajte z uporabo, sperite usta z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

MI Treatment Informacije za naročanje

MI Varnish Intro Pack (uvodno pakiranje)

10003389 GC MI Varnish uvodno pakiranje,
10 doz za enkratno uporabo GC MI Varnish
(5 jagoda + 5 meta), 0,40 ml na dozo in 20 čopičev

GC MI Varnish naknadno pakiranje, 35 doz za enkratno uporabo, 0,40 ml na dozo in 50 čopičev

10003390 Jagoda
10003391 Meta

GC MI Varnish klinično pakiranje, 100 doz za enkratno uporabo GC MI Varnish, 0,40 ml na dozo in 100 čopičev

10003392 Jagoda
10003393 Meta

GC MI Paste Plus

10003274 GC MI Paste Plus Promocijsko pakiranje po 5-tub, s 5 tubami, 40 g (35 ml) na tubo, 1 vsakega okusa (melona, jagoda, Tutti Frutti, meta, vanilija)
10001761 GC MI Paste Plus, pakiranje 10-tub z 10 tubami, 40 g (35 ml) na tubo, 2 vsakega okusa (jagoda, vanilija, Tutti Frutti, meta, melona) 40 g (35 ml) na enoto

GC MI Paste Plus, pakiranje po 10-tub z 10 tubami vsakega okusa, 40 g (35 ml) na tubo

10001762 Meta
10001763 Jagoda
10001764 Melona
10001765 Vanilija
10001766 Tutti Frutti

Tooth Mousse

10003275 GC Tooth Mousse, promocijsko 5-tub, s 5 tubami, 40 g (35 ml) na tubo, 1 vsakega okusa (melona, jagoda, Tutti Frutti, meta, vanilija)
10001755 GC Tooth Mousse, pakiranje po 10-tub, z 10 tubami, 40 g (35 ml) na tubo, 2 vsakega okusa (melona, jagoda, Tutti Frutti, meta, vanilija)

GC Tooth Mousse, pakiranje po 10-tub, z 10 tubami posameznega okusa, 40 g (35 ml) na tubo

10001757 Jagoda
10001758 Melona
10001759 Meta
10001760 Tutti Frutti
10001756 Vanilija

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sl-SI>