

## Pripremite se za lako slojevanje kompozita

pomoću GC Modeling Liquid i Gradia kistova



- 012244 - GC Modeling Liquid, nadopuna 6 ml EEP    900744 - GC Composite Modeling Kit EEP  
001533 - GC GRADIA, zaobljeni kist, n°1 x10    Uključuje GC Modeling Liquid,  
001534 - GC GRADIA, plosnati kist, n°1 x10    Gradia plosnati kist (x 5), Gradia zaobljeni kist (x 5),  
001535 - GC GRADIA, držač kista x2    Gradia držač kista (x 2) i podloge za miješanje.

## Otkrijte spoj izvrsnog rukovanja i estetike

s GC kompozitima u pasti



Gradia Direct Anterior / Posterior / X

G-aenial Anterior / Posterior

Essentia

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gceurope.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Bosnia and Herzegovina  
Carice Milice 11  
BA - 78000 Banja Luka  
Tel. +387.51.470.736  
Fax. +387.51.470.736  
info.bosniaherzegovina@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**GC**

z O LF 882 BA 12/18

Nanesi, oblikuj,  
zagladi,  
uživaj!

Kompoziti  
za slojevanje  
odsad  
jednostavniji

uz GC Modeling Liquid  
i GC kistove

**GC**

# Pojednostavite kompozitne radove tehnikom kista

Izrada direktnih kompozitnih radova može biti zahtjevna: ponekad se zalijepi na instrumente, ili se teško oblikuju i zaglađuju na način kako želite, a ponekad se završi s vidljivim rubnim linijama...

Nanošenje kompozita pomoću kista i tečnosti za modelovanje zaista čini razliku.



**Brzina i jednostavnost**  
nanošenje i oblikovanje

Korištenje **kista namočenog u tečnost za modelovanje** čini kompozite manje ljepljivima te omogućuje **lakše i brže nanošenje i oblikovanje**.



**Zaglađenost**  
za kraću završnu obradu

Nanošenje završnog sloja namočenim kistom također omogućuje **dobro zaglađivanje** i postizanje vrlo lijepe površine. **Pojednostavljuje završnu obradu** i štedi dragocjeno vrijeme.




**Nevidljivost**  
za najbolje estetske rezultate

Iako blago žučkast tokom nanošenja, GC Modeling Liquid postaje **potpuno transparentan nakon svjetlosne polimerizacije** - i garantuje **najbolje estetske rezultate**.



GC Modeling Liquid je savršeni akrilat za vlaženje za tehniku kistom:

- Optimalna **niska viskoznost**
- **Nevidljiv** nakon svjetlosne polimerizacije
- Jednostavan postupak, **koji štedi vrijeme**
  - 350 kapi u boci za **350 ispuna!**
- Kompatibilan sa **svim direktnim kompozitima**
- Čuvanje na **sobnoj temperaturi**

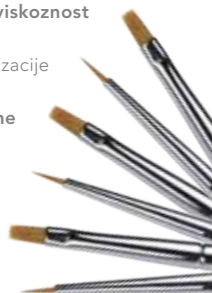

Slike ustupio dr. Javier Tapia Guadix (Španija) & prof. Marleen Peumans (Belgija); kompozit: Essentia (GC)

# Zbogom zahtjevnim kompozitima Nanesi, oblikuj, zagladi, uživaj!



Dozirati jednu kap GC Modeling Liquid na podlogu.



Koristiti je brzo i poklopcem zaštititi od svjetla.



Dodirnuti kap kistom i ovlažiti ga.



Viškove temeljito odstraniti papirnatom maramicom.



Koristiti plosnati kist za izradu palatinalne caklinske ljuske.



Zaobljeni kist može biti koristan za izradu aproksimalnog dijela.



Plosnatim kistom nanijeti dentinsku pastu.



Dentinske linije sazrijevanja modelovati zaobljenim kistom.



Dentinske linije sazrijevanja modelovati zaobljenim kistom. Zahvaljujući kistu, završni sloj imaće glatku površinu.

## Takođe optimalno za stražnja područja

Zaobljeni kist olakšava izradu kvržica i redefiniranje fisura.



Kist se lako može saviti za lakši pristup stražnjem području.



Kist se može koristiti za nanošenje materijala kvržicu po kvržicu.



Optimalno za redefiniranje fisura i fino anatomsko oblikovanje.