

Dobré věci potřebují
perfektní krytí:
Optiglaze od **GC.**



Světlem tuhnoucí ochranný lak plněný nanočásticemi
pro kompozitní a nepřímé náhrady z akrylátu.



Pomocí **Optiglaze**
GC nabízí **snadný**
a **hospodárný** způsob,
jak dosáhnout **estetického**
lesklého povrchu
podobnému finálnímu leštění.

Místo časově náročného
mechanického leštění
stačí **pouze dva kroky**
pro perfektní výsledek:
nanést lak – osvítit – hotovo!

Unikátní nová technologie
plnění nanočásticemi od GC
pro vysokou odolnost vůči otěru,
dlouhodobý lesk
a vysokou trvanlivost vazby!

GC



Indikace

Pro zjednodušení konečného opracování GC vyvinulo nový lak s názvem **Optiglaze**, který vytváří lesklý povrch umělých zubů, snímacích náhrad, provizorních korunek a individuálních lžic z akrylátu. Lze použít na místech, která se obtížně leští, jako jsou například fisury v postranních zubech nebo v interproximálních oblastech nepřímých kompozitních náhrad.

Místo mechanického leštění tedy zvolte jednodušší způsob a vytvořte kvalitnější konečný povrchový lesk pomocí **GC Optiglaze**.



- úspora času
- jednoduché zpracování
- perfektní estetika
- trvalý lesk
- nová technologie s nanoplňivem
- vysoká odolnost vůči otěru
- vysoká trvanlivost vazby
- velmi tenká vrstva laku (25 – 50µm)
- vysoká odolnost vůči diskoloraci
- bez vlivu na barvu náhrady


Obsahuje novou technologii – nanoplňivo!

■ Otěr ● Nanoplňivo □ Pryskyřičná matrice laku

Současná technologie




Bez plniva je otěr materiálu snadný.

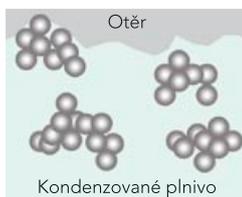

U konvenčního plnění se částice snadno shlukují a materiál bude i tak náchylný k otěru.

Technologie nanoplňiva

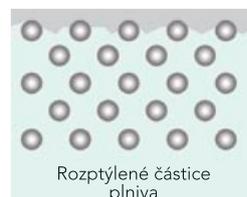

V důsledku nové technologie GC s nanoplňivem jsou částice rovnoměrně rozptýleny, což zajišťuje vysokou odolnost vůči otěru a diskoloraci, vysokou trvanlivost vazby a trvanlivý lesk!


Balení



Lahvička 15 ml

Pouhé dva kroky pro perfektní výsledek

Naneste lak (tekutinu) štětečkem a osvětíte ji polymerační lampou (např. GC Labolight LV-II/III) po dobu pouhých 3 minut.

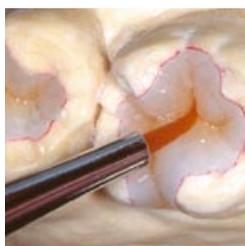

Aplikace



Polymerace světlem



Hotovo

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel.: +32.16.39.80.50
Fax: +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Czech Republic
Pod Lipami 41
CZ-130 00 Praha 3
Tel.: +420.266.007.190
Fax: +420.266.007.190
czech@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

