



Täydellistä istuvuutta
ja käyttömukavuutta
aktiiviseen elämäntapaan



RELINTM II Soft &
RELINTM II Extra Soft
GC:itä

Patruunaan pakattu pehmeä
silikoni pohjaukseen

GC

Istuvuutta, toimivuutta ja käyttömukavuutta,

Proteesia käyttävällä potilaalla kudosaärsytys, hampaanpoistot ja implanttien asennus aiheuttavat muutoksia kovissa ja pehmeissä kudoksissa.

Suuri osa potilaista elää yhä pidempään ja viettää yhä aktiivisempaa elämää. On tärkeää voida hymyillä huoletta, puhua mukavasti ja nauttia hyvästä ruoasta myös silloin, kun suussa on hammasproteesi.

GC:n Reline II Soft ja Extra Soft -pohjausaineet mukauttavat proteesit tehokkaasti uusiin paikallisiin olosuhteisiin, sillä ne luovat pehmeän kerroksen proteesin ja limakalvon väliin. Tämä edistää paranemista ja lisää mukavuutta ja toimivuutta viikkojen, jopa kuukausien ajan.



Kuvat on antanut käyttöömmme HLT D. Garcia-Baeza, Espanja

Patruunaan pakattu helppolevitteinen si-likonipohjausmateriaali

Materiaalin **ihanteellisen viskositeetin** ansiosta se on **paineen alaisena juoksevaa ja adaptoituu hienosti anatomisiin yksityiskohtiin.**

Sen **parempi trimmattavuus** tekee lopullisesta viimeistelystä entistä helpompaa.

Pitkäkestoista käyttömukavuutta ja hellävaraista helpotusta potilaan tilanteeseen

Reline II -pohjausainetta käytettäessä lämpötila ei työskenneltäessä nouse, ja siksi se on potilaalle mukavampi.

Materiaali **pysyy pehmeänä ja hajuttomana ja säilyttää mittasuhteensa ja elastisuutensa** viikkojen tai kuukausien ajan. Tuloksena **kestävä ja käytännöllinen ratkaisu** proteesipotilaille.

Voimakas kiinnitys, silti helppo ylläpitää ja mukauttaa paikoilleen

GC Reline II primer for resin -esikäsittelyaineen parannettu koostumus takaa **vahvan sidoksen proteesiin** ja pidemmäksi aikaa. Vahva sidos ei kuitenkaan vaikuta joustavuuteen.

Materiaalia voi lisätä kolme kuukautta ensimmäisestä levityksestä ja näin mukautua limakalvolla ja luustossa tapahtuneisiin muutoksiin. Uuden **Reline II remover for resin** -irrotusaineen avulla pohjaus on helppo poistaa ja korvata nopeasti.



Parempi trimmattavuus, paremmin viimeistellyt reunat.



Reunojen suojaaminen Reline II finishing material -tuotteella.



GC RELINE II
Primer
for resin
-esikäsittelyaine




GC RELINE II
Remover
for resin
-irrotusaine

jotka antavat syytä hymyyn

Kimmoisasta elastiseen: valitse tuote,
joka sopii parhaiten kuhunkin kliiniseen tilanteeseen

GC RELINE II Extra Soft on kovuusluokituksestaan luokkaa 32 (Shore A), ja siksi kimmoisa materiaali. Se sopii erityisen hyvin **normalisoimaan** ärtyneitä kudoksia ja **tukemaan kudosten paranemista** hampaanpoiston tai implanttiiin liittyvän leikkauksen jälkeen. Se voi pysyä paikoillaan **päiviä tai viikkoja**.

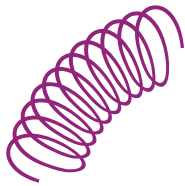

GC RELINE II Soft on kovuusluokituksestaan luokkaa 48 (Shore A). Se pitää elastisuutensa pitkän aikaa ja jakaa anatomisesti hankalissa tilanteissa **tyynyn tapaan kuormituksen aiheuttamaa painetta**. Paranemisvaiheen jälkeen **GC RELINE II Soft** sopii myös erinomaisesti pohjausmateriaaliksi implanttikiinnitteisiin proteeseihin. Se voi pysyä paikoillaan **viikkoja tai kuukausia**.



Suoraviivainen levitys ja käsittely, jokaisessa työvaiheessa



Pohjattava proteesi, kun 4 implanttia on asetettu paikalleen.



Kevennä pohjattava alue ja karhenna pinta.



Levitä GC RELINE II PRIMER reunustettavalle alueelle. Kuivaa varovasti ilmalla.



Annostele kätevästi patruunasta



Levitä GC RELINE II (Extra) Soft. Työskentelyaika on tasan kaksi minuuttia.



Sovita proteesi suuhun ja suorita lihastrimmaus. Pidä paikoillaan tasan viiden minuutin ajan.



Poista ylimäärä veitsellä tai saksilla. Trimmaa GC RELINE II -trimmauskärjellä.



Viimeistele GC RELINE II -viimeistelylaikalla.



Pohjattu proteesi.

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Täydellistä istuvuutta ja käyttömukavuutta aktiiviseen elämäntapaan

Koe GC:n koko monikäyttöinen pohjausmateriaalien sarja



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Materiaali	Akryylimuovi	A-silikoni	A-silikoni	Akryylimuovi (ei sis. MMA)
Käyttöindikaattorit	<ul style="list-style-type: none">PainokohtiinImplanttitoiden aikanaPehmeä materiaali proteesin pohjaukseenOnnettomuudessa/leikkauksessa vahingoittuneille kudoksilleToiminnallisiin jäljennöksiin	<ul style="list-style-type: none">Kudoksen muokkaukseenHerkille limakalvoillePainokohtiinÄrtyneiden kudosten normalisointiin	<ul style="list-style-type: none">ImplanttipotilaillePainokohtiinLuisiin allemenoihinKivun lievitykseen ja käyttömukavuuden parantamiseenPitkäikäinen pohjausmateriaali tukikudoksen puuttuessa	<ul style="list-style-type: none">Pitkäikäinen pohjausmateriaaliEpäsopivat hammasproteesit ehjissä kudoksissaViimeinen vaihe pehmeiden pohjausaineiden ja/tai kudoksen hoitoaineiden jälkeen
Aika suussa	päiviä/viikkoja/kuukausi	päiviä/viikkoja	viikkoja/kuukausia	kuukausia/vuosia

RELINE II Soft & Extra Soft -tuotteiden saatavilla olevat pakkaukset

Tutustumispakkaus

010259 **GC RELINE II Soft Intro Kit:**
1x GC RELINE II Soft Cartridge
1x GC RELINE II Primer for Resin
1x GC RELINE II trimmauskärki
1x GC RELINE II viimeistelylaikka
1x GC RELINE II Remover for Resins

010262 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:**
1x GC RELINE II Extra Soft Cartridge
1x GC RELINE II Primer for Resin
1x GC RELINE II trimmauskärki
1x GC RELINE II viimeistelylaikka
1x GC RELINE II Remover for Resins

Täyttöpakkaukset

010265 GC RELINE II Soft Cartridge, 48 ml
010268 GC RELINE II Extra Soft Cartridge, 48 ml
010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml
010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier), 1-1 pakkaus, 2x 9 ml
010275 GC RELINE II Remover for Resins, 5,5 ml
010277 GC RELINE II trimmauskärki (3 kpl)
010280 GC RELINE II viimeistelylaikka (12 kpl)
010283 GC RELINE II kertakäyttöinen sivellin (6 kpl)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Finnish Branch
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

