

# GC TEMPSMART DC

Gladka pot do vaše končne restavracije

## Izberite PAMETNO vožnjo

Kratek postopek zaradi možnosti udobne svetlobne polimerizacije



TEMPSMART DC, 48 ml kartuša, 16 mešalnih nastavkov EEP

Art.	12770	12771	12772	12773	12774	12775
Barva	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

## Izberite VARNO vožnjo

Visoka odpornost na frakture za provizorije, ki trajajo

## Izberite GLADKO vožnjo

Restavracije, ki se ne lepijo, za visok sijaj v nekaj korakih

## Izberite PRISRČNO vožnjo

Flourescenca in dolgotrajajoč sijaj za nasmejane paciente



TEMPSMART DC, 10 ml kartuša, 10 mešalnih nastavkov EEP

Art.	12776	12777	12778	12779
Barva	A1	A2	A3	B1

## Sorodni izdelki



Podlaganje

Unifast III



Popravki

G-aenial Universal Injectable



Karakterizacija

OPTIGLAZE color



Začasno cementiranje

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Odstranitev kron

GC PLIERS

FREEGENOL, Fuji TEMP LT, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color, PLIERS in UNIFAST III so blagovne znamke GC.  
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4, Structur 2 in Structur 3 niso blagovne znamke GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Slovenia  
Ulica Talcev 1a  
SLO - 3310 Žalec  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax. +386.3.710.32.71  
info.slovenia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**'GC.'**

ZOLF5108.86 - 01/19

# Gladka pot do vaše končne restavracije

GC  
TEMPSMART™ DC

Dvojno strjujoč kompozit za  
začasne prevleke in mostove

**'GC.'**



# GC TEMPSMART DC

Odkrijte edinstveno inovacijo: močen, hiter ... briljanten!


Začasne restavracije igrajo pomembno vlogo v restavrativnem zobozdravstvu. Ne samo, da zaščitijo preparirane zobe, nudijo tudi **udobje in estetiko** medtem ko pacient čaka na končno restavracijo. GC je predstavil novo tehnologijo z TEMPSMART DC in naredil začasne materiale pametnejše. TEMPSMART DC je **prvi material začasne restavracije brez plastifikatorja, dvojno-strjujoč, oblikovan zato, da naredi zobozdravnikovo delo enostavnejše in bolj prijetno.**

## Popeljite se na SMART vožnjo

TEMPSMART DC se lahko **svetlobno polimerizira**, kar ponuja veliko prednost: nadzorujete lahko trenutek, ko se material strdi in končna polimerizacija je tako optimizirana. To dovoljuje **preprost in bolj učinkovit** postopek, ki vam lahko **prihrani ogromno časa**. Svetlobna polimerizacija prav tako izboljša fizikalne lastnosti začnih zalivk, še posebej upogibno trdnost.




Svetlobna polimerizacija zunaj ust

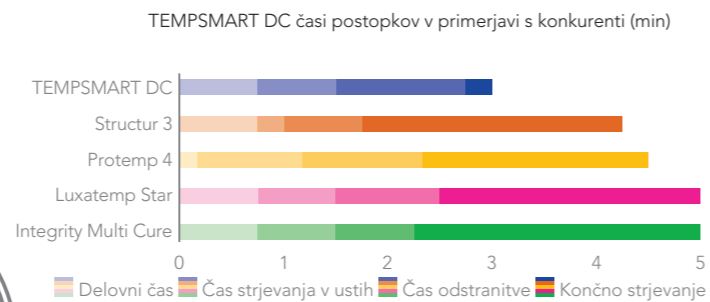


## Izberite VARNO vožnjo

Dolge polimerne verige tvorijo **zelo gosto polimerno mrežo**, ki ima za rezultat izjemno **visoko lomno odpornost**. Zaradi tega je idealno primeren za dolgotrajne provizorije.

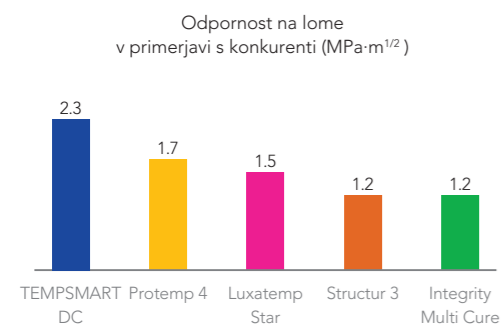

## Izberite GLADKO vožnjo

TEMPSMART DC je na voljo v **1:1 dispenzijskem sistemu** in ne vsebuje plastifikatorja v svoji sestavi. To zagotavlja odlično polimerizacijo za trdo, **gladko, ne-lepljivo površino** s praktično nič inhibicijske plasti. Zaradi tega se dlesen lahko bolje zaceli in plak lažje odstrani.

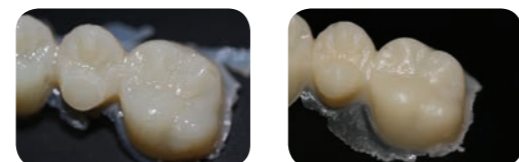

Primerjava tradicionalne 10:1 kartuše s plastifikatorjem (levo) z rezultati, ki smo jih dobili z 1:1 brizgo TEMPSMART DC brez plastifikatorja (desno).



Visoka odpornost na frakture naredi ta material idealen za mostove v posteriornem sektorju

1. Začetna situacija.
2. Vstavev TEMPSMART DC v odtis.
3. Odstranitev iz odtisa po 2-2,5 minutah po začetku mešanja. Svetlobna polimerizacija 5 s na površino po odstranitvi viškov
4. Po poliranju: cementiranje mostov z uporabo FREEGENOL ali Fuji TEMP LT.



Fotografije: v zahvalo Dr. C. Lampron, Nemčija

## Bodite ponosni na SREČNEGA pacienta!

Zaradi nelepljive površine se lahko dosežejo lepi rezultati po samo nekaj korakih poliranja

1. Začetna situacija.
2. Po vstavitvi TEMPSMART DC v odtis in v usta, se po 2,5 minute odstrani iz ust in svetlobno polimerizira.
3. Končno poliranje restavracije v nekaj korakih.
4. Končna začasna restavracija z visokim sijajem.



Fotografije: v zahvalo Dr. J. Tapia Guadix, Španija

## Pojdite na PRISRČNO vožnjo

TEMPSMART DC je na voljo v **6 barvah**, vse z **naravno fluorescenco**. Zaradi nove tehnologije polnil, ga je **enostavno polirati** do zavidljivo **visokega sijaja**.



Izberite med visokim sijajem z ročnim poliranjem ali karakterizacijo z OPTIGLAZE barvni nano-filni ojačan premaz (GC).

