



Prijatna vožnja do konačne nadoknade

GC
TEMPSMART™ DC

Dvostruko stvrdnjavajući kompozit
za privremene krunice i mostove

, 'GC.'

GC TEMPSMART DC

Otkrijte najnoviju inovaciju:
čvrst, brz ... sjajan!

Privremene nadoknade imaju važnu ulogu u restaurativnoj stomatologiji. Oni ne predstavljaju samo preparaciju zuba, već pružaju i **udobnost i estetiku** pacijentima dok čekaju konačne nadoknade.


GC nova tehnologija predstavljena kompozitom TEMPSMART DC čini privremene materijale pametnijim. TEMPSMART DC je **prvi dvostruko stvrdnjavajući kompozit bez plastifikatora, razvijen da olakša rad terapeuta i učini ga prijatnijim.**

TEMPSMART DC može da se **svetlosno polimerizuje**, što pruža izvrsne prednosti: može da se kontroliše trenutak stvrdnjavanja i da se optimizuje konačna polimerizacija. To omogućava **lakši i uspešniji** postupak, čime se **značajno štedi vreme**. Svetlosna polimerizacija takođe poboljšava fizička svojstva privremenih nadoknada, posebno savojnu čvrstinu.



Svetlosna polimerizacija
ekstraoralno


Vreme postupka za TEMPSMART DC u poređenju sa konkurenčnim proizvodima (min.).

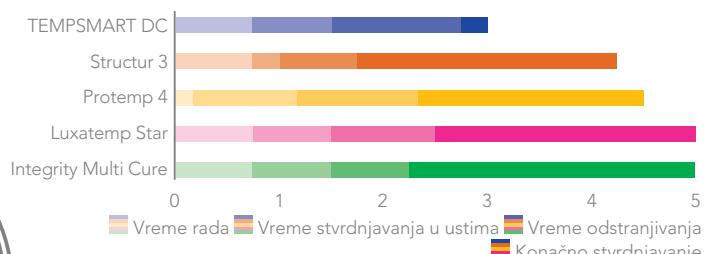

Izvor: GC istraživanje i razvoj, Japan 2018.
Podaci u arhivu.

Vozite se SIGURNO

Dugi lanci polimera stvaraju **polimernu mrežu visoke gustine**, što dovodi do izrazito **visoke otpornosti na lom**. To ga čini idealnim materijalom za dugoročne privremene nadoknade i mostove velikog raspona.

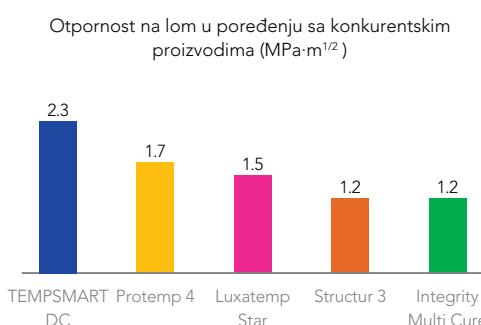

Izvor: GC istraživanje i razvoj, Japan 2018.
Podaci u arhivu.

Vozite se UDOBNO

TEMPSMART DC ima **1:1 sistem nanošenja** i ne sadrži plastifikatore. To osigurava izvrsnu polimerizaciju za tvrde, **glatke i nelepljive površine** gotovo bez ikakvog inhibicionog sloja. Zato gingiva može bolje da se zaceli, a plak se lakše odstranjuje.





Zbog visoke otpornosti na lom idealan je materijal za mostove u bočnom području

1. Početna situacija.
2. Ubrizgavanje materijala TEMPSMART DC u otisak.
3. Odstranjenje otiska 2 do 2,5 minuta od početka mešanja. Svetlosna polimerizacija 5 sekundi po površini nakon odstranjivanja viška.
4. Nakon poliranja: cementiranje mosta materijalom Freegenol ili Fuji TEMP LT.



Ustupio dr. C. Lampson, Nemačka

Ponosite se SREĆNIM pacijentom!

Zahvaljujući nelepljivoj površini, u nekoliko koraka poliranja mogu da se postignu lepi rezultati

1. Početna situacija.
2. Nakon ubrizgavanja materijala TEMPSMART DC i postavljanja u ustima, nadoknada je odstranjena kroz 2,5 minuta i svetlosno polimerizovana.
3. Završno poliranje nadoknade u nekoliko koraka.
4. Konačna privremena nadoknada visokog sjaja.



Ustupio dr. J. Tapia Guadix, Španjija

Vozite se LEPO

TEMPSMART DC je dostupan u **6 boja**, od kojih sve imaju **prirodnu fluorescenciju**. Zahvaljujući tehnologiji pametnih punilaca, može **lako da se polira** do izuzetno **visokog sjaja**.



Izbor između visokog sjaja ručnim poliranjem ili karakterizacije OPTIGLAZE color premazom ojačanim nano puniocem (GC).



GC TEMPSMART DC

Prijatna vožnja do konačne nadoknade

Vozite se PAMETNO

Kratko vreme postupka zahvaljujući pogodnoj opciji svetlosne polimerizacije



Vozite se SIGURNO

Visoka otpornost na lom za privremene nadoknade koje traju

Vozite se UDOBNO

Nelepljive nadoknade za visok sjaj u nekoliko koraka

Vozite se LEPO

Fluorescencija i dugotrajni sjaj za pacijente lepog osmeха



TEMPSMART DC, 48 ml patrona, 16 nastavaka za mešanje EEP

Oznaka	12770	12771	12772	12773	12774	12775
Boja	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 ml patrona, 10 nastavaka za mešanje EEP

Oznaka	12776	12777	12778	12779
Boja	A1	A2	A3	B1

Srođni proizvodi



Podlaganje



Popravka



Karakterizacija



Privremeno cementiranje



Crown Removal

FREEGENOL, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color i UNIFAST Trad su zaštitni znaci kompanije GC.
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 i Structur 3 nisu zaštitni znaci kompanije GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Serbia
Dimitrija Tucovića 119,
6th floor, ap.35
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.24.05.419
Fax. +381.11.24.05.419
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
<https://europe.gc.dental/sr-RS>

