

Izbjeljivanje zuba s diskoloracijama

Bijeljenje zuba, poznato kao izbjeljivanje, danas je opšte prihvaćeno kao način kozmetičkog poboljšanja boje zuba. Nažalost, ova vrsta tretmana ima određene nedostatke.

Zašto se izbjeljuju zubi?

Životne navike poput pušenja, konzumiranja vina ili kafe te biološki faktori poput starenja zuba mogu potamniiti zube.

Za ljepši osmijeh mnogi odabiru izbjeljivanje zuba.

Koji su problemi povezani s izbjeljivanjem zuba?

Izbjeljivanje će posvijetliti boju zuba, ali može također demineralizovati zube. To znači da se tokom procesa izbjeljivanja neki minerali skidaju iz vanjskog sloja zubne površine, što može uzrokovati **preosjetljivost**. Javlja se osjećaj osjetljivosti na toplu ili hladnu pića ili hranu, što može biti vrlo neugodno kroz duže vrijeme.

Kako pomažu Tooth Mousse ili MI Paste Plus?

Tooth Mousse i **MI Paste Plus** izrađeni su iz prirodnog mliječnog proteina koji remineralizuje zube, vraćajući minerale u zube. To znači da se **gled jača** i zube čini manje osjetljivima.

Taj je učinak moguć, jer **Tooth Mousse** i **MI Paste Plus** sadrže aktivni sastojak pod nazivom RECALDENT™, posebni prirodni sastojak koji veže kalcij i fosfat za zubnu površinu kako bi **obnovio i ojačao zube**.



Tretman bijelih mrlja ili lezija



Bijele mrlje na zubima mogu pokvariti osmijeh. Možda čak želite sakriti zube pri osmjehu.

Šta su bijele mrlje?

Bijele mrlje su vidljivi znakovi promjene u vanjskom sastavu gledi, koja se takođe naziva **dekalkifikacija** ili **demineralizacija**. U nekim je slučajevima to prvi znak zubnog karijesa. Glavni uzroci bijelih mrlja su: fluoroza, loša zubna higijena te hipomineralizacija gledi.

Šta je fluoroza i može li oštetiti zube?

Uzrok fluoroze može biti **prekomjerni unos fluorida**. To može biti posljedica visoko fluoridirane vode, fluoridnih dodataka u kombinaciji s trajnom upotrebom zubne paste s fluoridima. Fizički izgled fluoroze vidljiv je na zubima u obliku malih, bijelih, neprozirnih tačkica.

Mogu li ortodontske bravice uzrokovati bijele mrlje?

Svako ko je nosio fiksni ortodontski aparat zna kako je teško održavati čistoću zuba, budući da se komadi hrane često zarobe oko žica. Kao rezultat toga stvara se plak, bakterijski fermenti, što uzrokuje smanjenje pH vrijednosti u ustima te dovodi do **uništenja gledi**. To uzrokuje stvaranje bijelih mrlja na zubima.

Šta je hipomineralizacija gledi te kako djeluje na zube?

Do hipomineralizacije gledi dolazi kada postoje **promjene u ćelijama koje stvaraju zubnu gled** u ranom djetinjstvu. Ako se poremeti aktivnost tih ćelija, trajni zubi koji izniknu vjerovatno će imati bijele mrlje.


Kako bi se riješio problem bijelih mrlja, stomatolog može preporučiti svakodnevni program oralne higijene koji uključuje upotrebu **Tooth Mouse** ili **MI Paste Plus**.

Kisela pića

Cosmetic

Uzroci demineralizacije zubnog tkiva, poznate kao zubne erozije, mogu biti:

1. Smanjeni tok sline
2. Unutrašnji faktori (gastrointestinalne bolesti)
3. Vanjski faktori (kisela pića poput voćnih sokova ili napitaka)

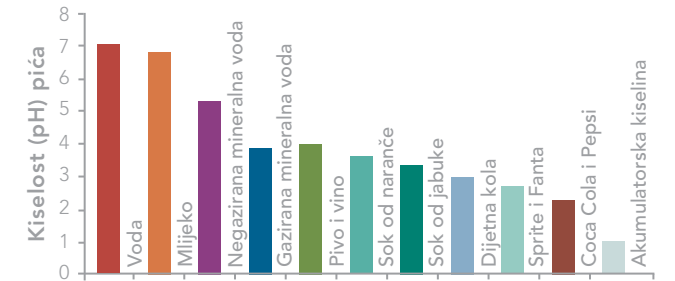

Zašto bezalkoholna pića uzrokuju eroziju zuba te može li konzumiranje bezalkoholnih pića uzrokovati karijes?

Bezalkoholna pića sadrže **visoki nivo kiseline (H⁺)** (i šećera) koja smanjuje pH u oralnom okruženju. To može uzrokovati eroziju zuba pri čemu je zubna gled oslabljena. Iz zuba se oslobađaju kalcij (Ca²⁺) i fosfat (PO₄³⁻).

Kisela pića, poput gaziranih pića, voćnih sokova, energetskih pića i pića za sportaše, mogu oslabiti strukturu gledi i ubrzati **trošenje zuba** te povećati rizik od nastajanja kaviteta i osjetljivosti.

Tooth Mousse i **MI Paste Plus** poboljšavaju otpornost zuba na kiselinu remineralizacijom oslabljenih zuba.



Osmijeh sa samopouzdanjem!

Poznato je da izgled zuba utiče na ukupnu ljepotu.

Zato se mnogi odlučuju na kozmetičke tretmane kao što su izbjeljivanje i ortodontija. Ti zahvati poboljšavaju osmijeh, ali nažalost imaju ograničenja. Npr. bijele mrlje, preosjetljivost, erodirana gleđ.

Kako bi riješila problem navedenih 'nuspojava', kompanija **GC** razvila je proizvode **Tooth Mousse i MI Paste Plus**; dvije paste za učvršćivanje zuba, raspoložive u pet finih aroma...

U tabeli su navedene indikacije za **Tooth Mouse i MI Paste Plus**:

Upotreba Tooth Mousse i MI Paste Plus :	Specifične indikacije za Tooth Mousse za pacijente:	Specifične indikacije za MI Paste Plus za pacijente:
Za desenzibilizaciju zuba	Koji imaju niski do srednji rizik od karijesa	Koji trebaju dodatnu zaštitu zbog srednje ili visoke podložnosti karijesu
Za sprječavanje i zastavljanje početnog karijesa	Koji su mlađi od šest godina	Koji imaju kiselo oralno okruženje
Na lezijama bijele mrlje	Koji će se podvrgnuti izbjeljivanju zuba ili su izbjelili zube	Koji imaju eroziju i želučani refluks
Tokom i/ili nakon ortodontske terapije		Koji trebaju potporu zbog vrlo loše kontrole plaka
Za trudnice		
Kao dodatna zaštita za zube		

Kada i kako koristiti **Tooth Mousse i MI Paste Plus**?

Obje su paste idealne za kućnu upotrebu. Jednostavno se nanose na sve zahvaćene ili visoko rizične površine nakon pranja zuba te neposredno prije odlaska na počinak.

Tooth Mousse i MI Paste Plus dva su proizvoda iz **GC** svjetski poznate palete proizvoda za minimalnu intervenciju, koji pomažu otkloniti osjetljivost zuba, bijele mrlje i zubnu eroziju, stanja koja su često povezana s kozmetičkim zahvatima kao što su izbjeljivanje zuba i ortodontska terapija.



Od svog stomatologa zatražite dodatne informacije i savjete vezano uz tačan odabir paste za zube. Pronađite omiljenu aromu između arome pepermint, vanilije, miješanog voća, jagode i dinje te uživajte u ukusnom načinu jačanja zuba.



CPP-ACP razvijen je na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Melbourneu, Victoria / Australija. RECALDENT™ se koristi pod licencom RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP dobija se iz mliječnog kazeina i ne smije se koristiti kod pacijenta alergičnih na mliječne proteine i/ili hidroksibenzoate.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bosnia and Herzegovina
Karadorđeva 81a
BIH - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.21.28.60
Fax. +387.51.21.28.60
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Kozmetička
stomatologija
osmijeh čini
mnogo ljepšim;
ne dozvolite da izbljedi.

GC Tooth Mousse i MI Paste Plus pomažu otkloniti neugodu koja se može javiti nakon kozmetičkog stomatološkog tretmana, kao što je npr. osjetljivost zuba. Takođe mogu pomoći spriječiti pojavu bijelih mrlja na zubima, održavajući usta čistima i zdravima.



Dio GC programa
Minimalne intervencije.

GC

z O LF BA 12 18 01/10

GC