



Pourquoi choisir GC Tooth Mousse™ / MI Paste Plus™ ?

GC Tooth Mousse™ et MI Paste Plus™ sont des crèmes au goût délicieux qui contribuent à la santé des dents et des gencives et aident à maintenir l'équilibre bucco-dentaire.

- ✓ Elles contiennent du calcium et du phosphate, les minéraux essentiels à la formation des dents, apportés par une protéine unique appelée RECALDENT™ (CPP-ACP). Elles aident à reconstituer ces minéraux perdus lors des attaques acides causées par les aliments et les boissons.
- ✓ Elles favorisent la croissance de bactéries bénéfiques pour la santé, maintenant ainsi un équilibre bucco-dentaire sain pour les dents et les gencives.
- ✓ GC Tooth Mousse™ est un excellent complément sans fluor à votre routine quotidienne de soins bucco-dentaires.

GC MI Paste Plus™ contient du fluor supplémentaire (900 ppm) qui agit en synergie avec RECALDENT™ pour reconstruire un émail encore plus résistant.

Elles contiennent du RECALDENT™ (CPP-ACP)

La nature a développé des systèmes protéiques très efficaces dans la salive, le sang et le lait qui stabilisent et transportent le calcium et le phosphate, éléments constitutifs fondamentaux de nos dents et de nos os. Des recherches approfondies menées au cours des 25 dernières années ont permis d'affiner la protéine spécifique du lait de vache qui transporte ces minéraux essentiels pour aider à protéger nos dents : le phosphopeptide de caséine et le phosphate de calcium amorphe, également connu sous le nom de RECALDENT™ (CPP-ACP).



GC Tooth Mousse™ et MI Paste Plus™ existent dans une variété d'arômes délicieux.



Menthe • Fraise • Vanille • Melon • Tutti Frutti

GC Tooth Mousse™

Crème topique avec calcium et phosphate

Sans fluorure

Indiquée pour tous les âges

GC MI Paste Plus™

Crème topique avec calcium, phosphate et fluorure

Plus 900 ppm de fluorure

Conseillée à partir de 6 ans

Nom du patient :

Fréquence d'application recommandée pour

- GC Tooth Mousse™ GC MI Paste Plus™:
- Une fois par jour - le soir après le brossage des dents
- Deux fois par jour - matin et soir après le brossage des dents
- _____

TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

RECALDENT™ et le logo RECALDENT™ sont des marques déposées du groupe Mondelez International utilisées sous licence.



GC EUROPE N.V. • Head Office
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240 • Interleuvenlaan 33 • B-3001 Leuven
 T. +32.16.74.10.00 • F. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe>
GC Europe NV • Benelux Sales Department
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240 • Interleuvenlaan 33 • B-3001 Leuven
 T. +32.16.74.18.60 • info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/fr-BE>
GC Austria GmbH-Swiss Office
 Zürichstrasse 31 • CH-6004 Luzern
 T. +41.41.520.01.78 • info.switzerland@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/fr-CH>

GC Tooth Mousse™ & MI Paste Plus™

Crèmes topiques pour renforcer l'émail et maintenir un équilibre bucco-dentaire sain



Brossage.
 Fil dentaire.
 Crème.



Protégez et illuminez votre sourire, chaque jour !

Avec le temps, les dents peuvent perdre des minéraux essentiels et s'affaiblir en raison d'une exposition fréquente à des aliments et boissons acides, à des traitements blanchissants ou au processus naturel de vieillissement.

GC Tooth Mousse™ et MI Paste Plus™ aident à restaurer les minéraux perdus, à renforcer les dents et à maintenir un environnement bucco-dentaire sain.



Utilisations



Protection quotidienne de la santé bucco-dentaire



Prévention des caries dentaires



Avant et après un blanchiment



Érosion, reflux et nausées



Hypersensibilité dentaire



Enfants et adolescents



Sécheresse buccale et xérostomie



Anomalies dentaires et dents de craies



Pendant et après un traitement orthodontique (appareils dentaires et aligners transparents)



Après un nettoyage dentaire professionnel



Personnes souffrant de maladies chroniques et sous traitement médicamenteux



Soins aux personnes âgées et besoins particuliers

Application

Demandez conseil à votre dentiste pour connaître la fréquence et la durée d'application du GC Tooth Mousse™ ou du MI Paste Plus™.

L'application doit se faire après le brossage des dents. Dans la plupart des cas, il est recommandé d'appliquer le produit matin et soir.



1 Déposez une noisette de GC Tooth Mousse™ ou MI Paste Plus™ sur un doigt propre ou un coton-tige.



2 Appliquez le produit sur toutes les dents et étalez-le uniformément avec votre langue.



3 Laissez agir GC Tooth Mousse™ ou MI Paste Plus™ sur les dents pendant au moins 3 minutes, en évitant de recracher et d'avaler. Plus le produit reste longtemps dans la bouche, mieux c'est.



4 Recrachez l'excédent. Vous pouvez laisser les résidus de GC Tooth Mousse™ ou MI Paste Plus™ sur la surface, ils seront dissous progressivement. Ne pas rincer. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.



**Protéger.
Prévenir.
Reminéraliser.**