

# Видите ли ще повярвате!



Уникален гел за  
оцветяване на плаката  
в три цвята, който  
различава нов, зрял и  
киселинно-продуциращ  
биофилм.

**Tri Plaque ID Gel**  
**от GC.**



Част от програмата на GC  
за Минимална Интервенция.

**,'GC,'**




# Хората често ТРЯБВА да видят нещо, за да ПОВЯРВАТ в него

GC Tri Plaque ID Gel не само може да различава стара и нова плака в няколко лесни стъпки, но този уникален гел може и да посочи къде точно бактериите са най-активни чрез разкриване на киселинното pH. Тази допълнителна информация е от голяма полза в ежедневната Ви практика, за да мотивирате пациентите си за подобряване на тяхната орална хигиена.

Tri Plaque ID Gel = Син пигмент    Червен пигмент    Захароза

Н Киселини    Бактерии

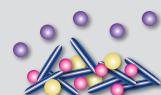


## НОВА ПЛАКА

Когато плаковият биофилм е осъкден, синият пигмент лесно се отмива, като оставя след себе си червен пигмент, показващ червен/розов резултат.




## ЗРЯЛА ПЛАКА (> 48 часа)

Когато плаковият биофилм е узръл, структурата му е гъста, така че двата пигмента син и червен се задържат, като образуват син/лилав слой.

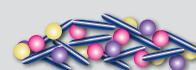

## ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО РИСКОВА ПЛАКА

Захарозата в GC Tri Plaque ID Gel ще се метаболизира от ацидогенните бактерии в рамките на високо рисковия плаков биофилм. В резултат на това произведената киселина понижава pH на плаката ( $< \text{pH } 4.5$ ) и това причинява изчезването на червения пигмент, като оставя светло син цвят.

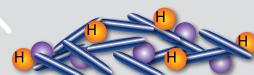

## ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО РИСКОВА ПЛАКА

Dr. G. Ghani, United Kingdom

## Три цвята, три лесни стъпки, за да осигурите съдействието на пациента

1

Нанесете гела с тампон, микро-апликатор или памучен тупфер.

2

Леко промийте областта с воден спрей и подсушете.  
Плаката се оцветява в три цвята:

- синьо/лилаво - зряла плака (повече от 48 часа)
- червено/розово - наскоро формирана плака
- светло синьо - високо рискова плака

3

След диагностицата, просто измийте зъбите и отстранете оцветяващия гел.

### Опаковка

004273 40 g Туба (36 ml)



В стремежа към превантивна стоматология Вие и Вашите пациенти имате нужда от възможно най-много инструменти, с цел постигане на оптимално орално здраве. GC Tri Plaque ID Gel може да стане безценна част от ежедневната Ви диагностична практика.

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Bulgaria  
BG - София 1202  
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3  
тел. +359.2.983.30.30  
факс. +359.2.858.31.37  
bulgaria@eo.gceurope.com  
http://www.eeo.gceurope.com

‘GC’