

# Pogledajte i uvjerite se!



Jedinstveni trobojni  
gel za otkrivanje  
svježeg, zrelog i  
acidogenog plaka.


**GC Tri Plaque  
ID Gel**



Dio GC programa  
Minimalne Intervencije.


**‘GC’**

# Često prvo trebamo vidjeti da bismo vjerovali

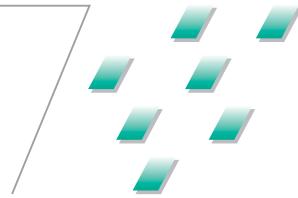

Pomoću GC Tri Plaque ID Gel može se ne samo razlikovati stari i novi plak u nekoliko jednostavnih koraka, već se ovim jedinstvenim gelom, otkrivanjem kiselog pH, može takođe tačno utvrditi mjesto gdje su bakterije najaktivnije. Ova dodatna informacija značajna je pomoći u svakodnevnom radu kao poticaj pacijentima za poboljšanje oralne higijene.

Tri Plaque ID Gel = Plavi pigment Crveni pigment Saharozu  
 Kiselina Bakterije

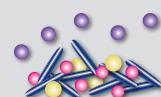


## SVJEŽI PLAK

Ako je biofilm plaka oskudan, plavi pigment lako se ispiri i ostavlja crveni pigment koji pokazuje crveni/roza rezultat.




## ZRELI PLAK (> 48 h)

Kada biofilm plaka sazrije, njegova je struktura gusta, pa su i plavi i crveni pigmenti uključeni, što stvara plavi/ljubičasti sloj.

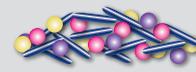

## VISOKORIZIČNI PLAK

Acidogene bakterije u biofilmu visokorizičnog plaka metabolisaće saharozu. Stvorena kiselina snižava pH plaka ( $< \text{pH } 4,5$ ), uslijed čega nestaje crveni pigment i ostavlja svijetloplavu boju.

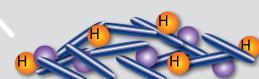

## VISOKORIZIČNI PLAK

Dr. G. Ghani, Velika Britanija

## Tri boje, tri jednostavna koraka za saradnju pacijenta

1

Gel nanijeti tupferom, mikro četkicom ili komadićem vate.

2

Područje blago isprati vodenim mlazom.

Plak se pokazuje u tri boje:

- plavo/ljubičasto - zreli plak (više od 48 sati)
- crvena/roza - novo stvoreni plak
- svijetlo plava - visokorizični plak

### Pakovanje

004273 Tuba od 40 g (36 ml)



3

Nakon dijagnoze zube oprati kako bi se odstranila boja gela za otkrivanje plaka.

Primjena preventivne stomatologije zahtijeva što više alata za postizanje optimalnog oralnog zdravlja. GC Tri Plaque ID Gel može biti izuzetno vrijedno sredstvo u svakodnevnom dijagnostičkom postupku.

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Bosnia and Herzegovina  
Skendera Kulenovića 30B  
BIH - 78000 Banja Luka  
Tel. +387.51.20.15.68  
Fax. +387.51.20.15.68  
bosniahertzegovina@eo.gceurope.com  
http://www.eeo.gceurope.com

‘GC’