




# Přesvědčte se na vlastní oči!



Jedinečný gelový  
indikátor plaku ve třech  
barevných odstínech  
k rozpoznání nového,  
zralého a kyselinotvorného  
biofilmu.

**Tri Plaque ID Gel**  
od **GC.**

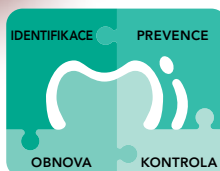






Součást programu  
Minimální Intervence od GC.

# GC

# Lidé se často musí na vlastní oči přesvědčit, aby uvěřili

GC Tri Plaque ID Gel dokáže nejen v několika snadných krocích **rozeřídit starý plak od nového**. Tento jedinečný gel rovněž dokáže **přesně vyznačit místa největšího působení bakterií**, a to odhalením kyselého pH. Tato doplňující informace Vám pomůže ve Vaší každodenní praxi motivovat pacienty ke zlepšení jejich ústní hygieny.

Tri Plaque ID Gel =  Modrý pigment  Červený pigment  Sacharóza  
 Kyselina  Bakterie




## NOVÝ PLAK

Když je biofilm plaku řídký, modrý pigment se snadno smyje. Na povrchu zůstane červený pigment, který se projeví červenou / růžovou výslednou barvou.




## STARÝ PLAK (> 48 h)

Zralý biofilm plaku má řídkou strukturu, takže oba pigmenty - modrý i červený - se smísí a vytvoří modrou / fialovou vrstvu.

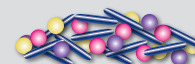

## MIMOŘÁDNĚ RIZIKOVÝ PLAK

Sacharóza v GC Tri Plaque ID Gelu se působením kyselinotvorných bakterií ve vysoce rizikovém biofilmu plaku přemění na kyselinu. Ta snižuje pH plaku (<pH 4,5), díky čemuž červený pigment zmizí a zůstane světle modrá barva.

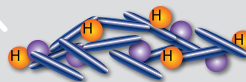

## MIMOŘÁDNĚ RIZIKOVÝ PLAK

Dr. G. Ghani, Velká Británie

## Tři odstíny - tři snadné kroky k zajištění pacientovy spolupráce

**1** Pomocí tamponu, mikroštetěčky nebo vatové pelety naneste gel

Dané místo jemně opláchněte vodním sprejem a odsajte odsávačkou. Objeví se plak ve třech odstínech:

- 2**
- modrá/fialová - starý plak (více než 48 hodin)
  - červená/růžová - čerstvě vytvořený plak
  - světle modrá - vysoce rizikový plak

## Balení

004273 40 g Tuba (36 ml)



**3** Po stanovení diagnózy jednoduše odstraňte kartáčkem gelového indikátoru

V rámci preventivní stomatologie potřebujete mít Vy i Vaši pacienti co nejvíce pomůček k dosažení optimálního ústního zdraví. GC Tri Plaque ID Gel se může stát neocenitelnou součástí Vaší každodenní diagnostické praxe.

GC EUROPE N.V.  
 GC EEO - Czech R. & Slovakia  
 V Olšínách 82  
 CZ - 100 00 Prague 10  
 Tel. +420.274.771.965  
 Fax. +420.274.771.965  
 czech@eoo.gceurope.com  
 http://www.eoo.gceurope.com

**GC**

z O LF CZ 12 22 12/11