

Pogledajte i uvjerite se!



Jedinstveni trobojni
gel za otkrivanje
svježeg, zrelog i
acidogenog plaka.

**GC Tri Plaque
ID Gel**



Dio GC programa
Minimalne Intervencije.

GC



Često prvo trebamo vidjeti da bismo vjerovali

Pomoću GC Tri Plaque ID Gel može se ne **samo razlikovati stari i novi plak** u nekoliko jednostavnih koraka, već se ovim jedinstvenim gelom, otkrivanjem kiselog pH, može također **točno utvrditi mjesto gdje su bakterije najaktivnije**. Ova dodatna informacija značajna je pomoć u svakodnevnom radu kao poticaj pacijentima za poboljšanje oralne higijene.

Tri Plaque ID Gel = Plavi pigment Crveni pigment Saharozna

Kiselina Bakterije




SVJEŽI PLAK

Ako je biofilm plaka oskudan, plavi pigment lako se ispiri i ostavlja crveni pigment koji pokazuje crveni/roza rezultat.




ZRELI PLAK (> 48 h)

Kada biofilm plaka sazrije, njegova je struktura gusta, pa su i plavi i crveni pigmenti uključeni, što stvara plavi/ljubičasti sloj.

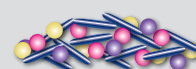

VISOKORIZIČNI PLAK

Acidogene bakterije u biofilm visokorizičnog plaka metaboliziraju šećer. Stvorena kiselina snižuje pH plaka (< pH 4,5), uslijed čega nestaje crveni pigment i ostavlja svijetloplavu boju.

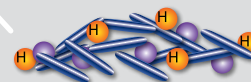

VISOKORIZIČNI PLAK

Dr. G. Ghani, Velika Britanija

Tri boje, tri jednostavna koraka za suradnju pacijenta

1 Gel nanijeti tupferom, mikro četkicom ili komadićem vate.

2 Područje blago isprati vodenim mlazom.
Plak se pokazuje u tri boje:

- plavo/ljubičasto - zreli plak (više od 48 sati)
- crvena/roza - novo stvoreni plak
- svijetlo plava - visokorizični plak

3 Nakon dijagnoze zube oprati kako bi se odstranila boja gela za otkrivanje plaka.

Pakiranje

004273 Tuba od 40 g (36 ml)



Primjena preventivne stomatologije zahtijeva što više alata za postizanje optimalnog oralnog zdravlja. GC Tri Plaque ID Gel može biti izuzetno vrijedno sredstvo u svakodnevnom dijagnostičkom postupku.

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
croatia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com



z O LF HR 12 22 12/11