

Hiszem, ha látom!



Egyedülálló háromszínű
plakkfestő gél,
mely azonosítja az új,
az érett és a savtermelő
biofilmet is

Tri Plaque ID Gel
a **GC-től**






A GC Minimális Beavatkozás
programjának része.

GC




Vannak dolgok, amiket látni kell ahhoz, hogy elhiggyük

A GC Tri Plaque ID Gel nem csak a **friss és az érett plakkot különbözteti meg** néhány egyszerű lépést követően, hanem ez az egyedülálló gél elszínezi a savas PH értékű területeket is, ezzel **pontosan kiemelve a helyet ahol a baktériumok a legaktívabbak**. Ez a plusz információ segít a páciensek motiválásában és szájhigiénájuk fejlesztésében.

Tri Plaque ID Gel =  Kék pigment  Piros pigment  Szacharóz

 Sav  Baktérium

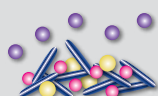


FRISS PLAKK

Amennyiben a plakk biofilm csak szórványosan van jelen, a kék pigment könnyen lemosható és maga után a piros pigmentet hagyja, mely piros / rózsaszín eredményt mutat.




ÉRÉTT PLAKK (> 48 óra)

Amennyiben a plakk biofilm érett, a szerkezete sűrű, így a kék és a piros pigmentek is megtapadnak rajta, mely egy kék / lila réteget eredményez.

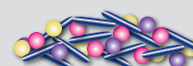

EXTRA MAGAS KOCKÁZATÚ PLAKK

A GC Tri Plaque ID Gel-ben lévő szacharózt lebontja a savtermelő baktérium a magas kockázatú plakk biofilmen belül. Az így termelt sav csökkenti a pH értéket (> pH 4.5), ezért a piros pigment eltűnik, hátrahagyva a világoskék színt.

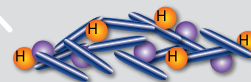

EXTRA MAGAS KOCKÁZATÚ PLAKK

Dr. G. Ghani, Egyesült Királyság

Három szín, három egyszerű lépés a páciens előzékenységének biztosítása érdekében

1 Applikálja a zselét vattapálcikával, mikrokefével vagy vattagombóccal

2 Óvatosan öblítse le a területet vízsugárral, elszívás mellett
A plakk három színben mutatkozik:

- kék/lila - érett plakk (több mint 48 óra)
- piros/rózsaszín - frissen lerakódott plakk
- világoskék - magas kockázatú plakk

Kiszerezés

004273 40 g tubus (36 ml)



A megelőzésre törekedve Önnek és páciensének a lehető legtöbb rendelkezésre álló eszköze szüksége lesz az optimális orális egészség elérése érdekében. A GC Tri Plaque ID Gel felbecsülhetetlen értékűvé válhat a mindennapi diagnosztikai rutin során.

3 A diagnózis után egyszerűen mossa meg a fogakat, hogy eltávolítsa a zselét

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Árok u. 10/B
H - 2040 Budaörs
Tel. +36.23.805.805
Fax. +36.23.805.806
hungary@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

'GC.'