



# Верувај

во она што го **гледаш!**



Единствен гел кој  
во три различни бои ги  
идентификува новите,  
зрелите и биофилмовите  
кои произведуваат  
киселини.

**GC Tri Plaque  
ID Gel**



Дел од програмата на GC  
за Минимална Интервенција.

**GC**



# Луѓето најчесто треба да видат за да ПОВЕРУВААТ во нешто

GC Tri Plaque ID Gel не само што може да ги диференцира стариот и новиот плак во неколку лесни чекори, овој единствен гел исто така може точно да означи каде се бактериите се најактивни, така што ја разоткрива киселата pH. Овие додатни информации ќе бидат голема помош во Вашата секојдневна работа, како да ги мотивирате пациентите да ја подобрат својата орална хигиена.

Tri Plaque ID Gel = Син пигмент Црвен пигмент Сукроза

Киселина Бактерии кои произведуваат киселини




## НОВ ПЛАК

Кога плакниот биофилм е редок, синиот пигмент лесно се испира и останува црвениот пигмент кој дава резултат на црвено/розево пребојување.




## СТАР ПЛАК (> 48 часа)

Кога плакниот биофилм е зрел, неговата структура е густа и двата пигмента и синиот и црвениот остануваат врзани за плакот, и така се добива син/виолетов слој.

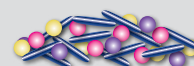

## ЕКСТРЕМНО ВИСОКО РИЗИЧЕН ПЛАК

Сукрозата од GC Tri Plaque ID Gel ќе ја метаболизираат ацидогените бактерии кои се наоѓаат во високоризичниот плак. Се добива киселина која го намалува pH на плакот (< pH 4.5) што овозможува црвениот пигмент да исчезне и да остане светло-сина боја.

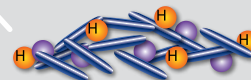

## ЕКСТРЕМНО ВИСОКО РИЗИЧЕН ПЛАК

Dr. G. Ghani, United Kingdom

## Три бои, три лесни чекори да се обезбеди сигурност кај пациентот

1 Нанесете го гелот со памучно стапче, микро-четка или памучна пелета

2 Нежно исплакнете го полето со воден спреј и вклучена аспирација. Плакот се разоткрива во три бои:

- сина/виолетова боја - стар плак (повеќе од 48 часа)
- црвена/розева боја - новоформиран плак
- светло сина боја - високо ризичен плак

## Пакување

004273 40 g во туба (36 ml)



3 После дијагностиката, едноставно исчеткајте ги забите за да го отстраните гелот.

Во спроведувањето на превентивната стоматологија, на Вас и Вашите пациенти ви се потребни колку што е можно повеќе алатки, со цел да се постигне оптимално орално здравје. GC Tri Plaque ID Gel може да биде непроценлив дел од Вашата секојдневна дијагностичка практика.

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Tel. +32.16.74.10.00  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

# GC

Овластен дистрибутер  
за Македонија:  
ДЕНТОМЕД-М  
Ул. "Бојмија" бр. 2/2,  
Пошт. фах. 182  
1000 Скопје  
Тел./Факс: 02/24.62.739  
Тел. 02/24.64.781  
dentomed@t-home.mk

z O LF MK 12 22 12/11