


A vedea înseamnă a crede!



Gel revelator unic
pentru placa bacteriană,
în trei nuanțe, care
identifică biofilmele noi,
mature și pe cele acide.

Tri Plaque ID Gel
de la **GC**.

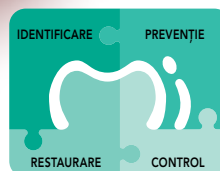

Parte a programului GC
de Minimă Intervenție.

GC



Oamenii au adeseori nevoie să vadă pentru a putea crede

Pe lângă faptul că GC Tri Plaque ID Gel **face diferența între placa bacteriană veche și cea nouă** în doar câteva etape simple, acest gel unic **poate să și evidențieze locul exact în care există cele mai active bacterii** prin relevarea pH-ului acid. Această informație adițională vă va ajuta în practica dumneavoastră zilnică pentru a motiva pacienții să își îmbunătățească igiena orală.

Tri Plaque ID Gel = ● Pigment albastru ● Pigment roșu ● Sucroză

● Acidă ● Bacterie




PLACĂ BACTERIANĂ NOUĂ

Atunci când biofilmul plăcii bacteriene se regăsește în cantitate mică, pigmentul albastru este spălat ușor și lasă în urmă pigmentul roșu care oferă un rezultat roșu/roz.




PLACĂ BACTERIANĂ VECHĂ (> 48hr)

Atunci când biofilmul plăcii bacteriene s-a maturizat, structura sa este densă, și prin urmare va reține atât pigmentul albastru, cât și pe cel roșu, formându-se astfel un strat albastru/mov.

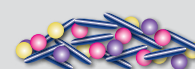

PLACĂ BACTERIANĂ CU RISC EXTREM DE RIDICAT

În cazul biofilmului plăcii bacteriene cu risc ridicat sucroza conținută de GC Tri Plaque ID Gel va fi metabolizată de bacteriile acidogenice. Acidul rezultat va determina scăderea pH-ului plăcii bacteriene (<pH 4.5) fapt ce va duce la dispariția pigmentului roșu, rezultatul fiind o nuanță albastru deschis.

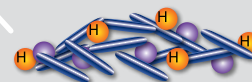

PLACĂ BACTERIANĂ CU RISC EXTREM DE RIDICAT

Trei nuanțe, trei etape simple pentru a asigura cooperarea pacientului

1 Aplicați gelul cu o pensulă, micro-perie sau o buletă de bumbac

2 Spălați ușor zona cu jet de apă și sucțiune.
Placa bacteriană este revelată în trei nuanțe:

- albastru/mov - placă bacteriană veche (mai mult de 48 de ore)
- roșu/roz - placă bacteriană nou formată
- albastru deschis - placă bacteriană cu risc ridicat

Ambalare

004273 40 g Tub (36 ml)



3 După diagnosticare, periați dinții pentru a îndepărta gelul revelator

Pentru a urma o abordare stomatologică preventivă, atât dumneavoastră cât și pacientul dumneavoastră aveți nevoie de cât mai multe instrumente pentru a obține o sănătate orală optimă. GC Tri Plaque ID Gel poate deveni o etapă indispensabilă a programului dumneavoastră de diagnosticare.

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

