



Verjamemo kar vidimo!



Edinstven gel
za razkrivanje oblog v
treh barvnih odtenkih, ki
prikazuje nov, zrel in
kislinsko proizveden biofilm.

**GC Tri Plaque
ID Gel**



Del GC Minimalno
Intervencijskega programa.

GC



Praden ljudje v nekaj verjamejo, morajo običajno prej le to videti

GC Tri Plaque ID Gel **ne le razlikuje med starim in novim plakom** v prvih enostavnih korakih, pač pa ta edinstven gel **natančno poudari mesto največje aktivnosti bakterij** z razkritjem kislega pH. Ta dodatna informacija vam bo v veliko pomoč pri vaši vsakodnevni zobozdravstveni praksi pri motivaciji vaših pacientov, da izboljšajo svojo ustno higieno.

Tri Plaque ID Gel = Moder pigment Rdeč pigment Sukroza

Kislina Kisle bakterije




NOV PLAK

Ko je biofilm plaka redek, se moder pigment enostavno spere, kar za seboj pušča rdeč pigment, ki daje rdeče/roza rezultate.




STAR PLAK (> 48 hr)

Ko biofilm dozori, je njegova struktura gosta, tako se ujamejo modri in rdeči pigmenti in formirajo modro/vijoličen sloj.

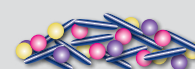

NAJBOLJ RIZIČEN ZOBNI PLAK

Sukroza v GC Tri Plaque ID Gelu se bo metabolizirala z acidogenimi bakterijami zobnega plaka visokega rizika. Kislina, ki je končni produkt, zniža pH oblog (<pH 4,5), kar vodi v izginitje rdečega pigmenta in ostanek svetlo modre barve.

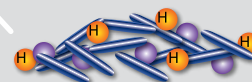

NAJBOLJ RIZIČEN ZOBNI PLAK

Dr. G. Ghani, Velika Britanija

Trije toni, trije enostavni koraki, ki zagotovijo motiviranost pacienta

1 Nanesite gel z aplikatorjem, mikro čopičem ali vatno kroglico.

2 Nežno sperite področje z vodnim sprejem in odsesavajte. Plak je prikazan v treh tonih:

- modro/vijolična - stari plak (več kot 48 ur)
- rdeče/roza - novo formiran plak
- svetlo modra - zelo rizičen plak

Pakiranje

004273 40 g tuba (36 ml)



3 Po diagnostiki, ščetkajte zobe in odstranite barvo od GC Tri Plaque ID Gela

Pri opravljanju preventivnega zobozdravstva tako vi kot tudi in vaše pacienti potrebujete čim več orodij, kot je le mogoče, da bi dosegali optimalno oralno zdravje. GC Tri Plaque ID Gel lahko postane neprecenljiv del vaše dnevne rutinske diagnostike.

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Slovenia
Šlandrov trg 40
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
slovenia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

GC