



Pogledajte i uverite se!



Jedinstveni trobojni
gel za otkrivanje
svežeg, zrelog i
acidogenog plaka.

**GC Tri Plaque
ID Gel**



Deo GC Minimalno
invazivnog programa.

GC



Često prvo treba da nešto vidimo da bismo poverovali

Pomoću GC Tri Plaque ID Gel može se ne **samo razlikovati stari i novi plak** u nekoliko jednostavnih koraka, već se ovim jedinstvenim gelom otkrivanjem kiselog pH može takođe **tačno utvrditi mesto gde su bakterije najaktivnije**. Ova dodatna informacija značajna je pomoć u svakodnevnom radu kao podsticaj pacijentima za poboljšanje oralne higijene.


Tri Plaque ID Gel = Plavi pigment Crveni pigment Saharozu

Kiselina Bakterije




SVEŽ PLAK

Ako je biofilm plaka oskudan, plavi pigment lako se ispira i ostavlja crveni pigment koji pokazuje crveni/roza rezultat.

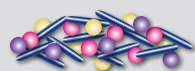


ZRELI PLAK (> 48 h)

Kada biofilm plaka sazre, njegova je struktura gusta, pa su i plavi i crveni pigmenti uključeni, što stvara plavi/ljubičasti sloj.

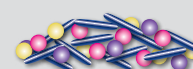

VISOKORIZIČNI PLAK

Acidogene bakterije u biofilmu visokorizičnog plaka metaboliziraju saharozu u GC Tri Plaque ID Gelu. Stvorena kiselina snižava pH plaka (< pH 4.5), usled čega nestaje crveni pigment i ostavlja svetloplavu boju.

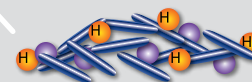

VISOKORIZIČNI PLAK

Dr. G. Ghani, Velika Britanija

Tri boje, tri jednostavna koraka za saradnju pacijenta

1 Gel naneti tupferom, mikro četkicom ili komadićem vate.

2 Područje blago isprati vodenim mlazom.
Plak se pokazuje u tri boje:

- plavo/ljubičasto - zreli plak (više od 48 sati)
- crvena/roza - novostvoreni plak
- svetlo plava - visokorizični plak

Pakovanje

004273 Tuba od 40 g (36 ml)



3 Nakon dijagnoze zube oprati kako bi se odstranila boja gela za otkrivanje plaka.

Primena preventivne stomatologije zahteva što više sredstava za postizanje optimalnog oralnog zdravlja. GC Tri Plaque ID Gel može biti izuzetno vredno sredstvo u svakodnevnom dijagnostičkom postupku.

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Serbia
Cvijičeva 82
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.20.88.033
Fax. +381.11.20.88.033
serbia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

GC