

STEP-BY-STEP KLIININEN KÄYTTÖ

Esimerkkinä käytetty GC UNIFAST TRAD



Potilaan d. 12 vanha metallikeraaminen kruunu tullaan uusimaan



Jäljennöksen ottaminen ennen preparointia



Viimeistelly pilari



Sekoita GC UNIFAST TRAD: ia 10 – 15 sekuntia



Täytä jäljennös sekoitetulla GC UNIFAST TRAD: lla



Aseta suuhun




Poista jäljennös 2'30" sekoituksen aloittamisesta
Materiaalin lämpötila nousee n. 40° C lämpötilaan



Väliaikainen kruunu ennen viimeistelyä



Väliaikaisen kruunun viimeistely 4 minuutin kuluttua sekoituksen aloittamisesta

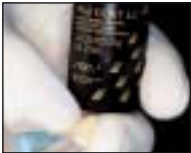

Hohtava pinta saadaan pinnoittamalla työ GC Fuji COAT LC:llä



Kiinnitä GC UNIFAST TRAD -väliaikaistyö turvallisesti käyttämällä GC Freegenol-sementtiä



Lopputulokset

SILMÄYS GC: n VÄLIAIKAISTYÖSKENTELYYN VALMISTAMIIN MATERIAALEIHIN JA APUVÄLINEISIIN

GC PROVITEC

Väliaikainen silta- ja kruunumateriaali, joka perustuu Bis-akryyliyhdistelmämuovi pohjaan



GC FREEGENOL

Eugenoliton väliaikaissementti kruunujen ja siltojen kiinnittämiseen.



GC K.Y. PLIER

Pihdit väliaikaisesti kiinnitettyjen töiden iroittamiseen



PAKKAUKSET

GC UNIFAST TRAD



- TÄYTTÖPAKKAUKSET
100g jauhe, ivory, N.3X, N8
250 g jauhe, ivory, N.3X, N8
1 kg jauhe, ivory, N.3X, N8
100 g neste - 250 g neste

GC UNIFAST LC



- ALOITUSPAKAUS
Jauhe A2, A3, B2, B3, C2, translucent, jokaista 30 g
Neste 2 x 60 g
- TÄYTTÖPAKKAUKSET
50 g jauhe A2, A3, B2, B3, C2, translucent
2 x 15 g neste

z O L F I 2 35 – 07/99

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
E-mail info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Finnish and Baltic States Office
Vanha Hommaksentie 11B
FIN - 02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
E-mail info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

©VITA on rekisteröity tuotemerkki Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany

GC
FIRST IS QUALITY

GC UNIFAST

METYYLIMETAKRYLAATTI-POHJAINEN VÄLIAIKAINEN
KRUUNU- JA SILTAMATERIAALI

GC UNIFAST valokeilassa

- ERITTÄIN TALOUDELLINEN
- ÄLYKÄS KOVETTUMISKÄYTTÄYTYMINEN, JOSSA MUISTIOMINAISSUUS
- NOPEA TAI KONTROLLOITAVISSA (NÄKYVÄ VALO) OLEVA TYÖSKENTELYAIKA

GC UNIFAST

ONGELMASTA RATKAISUUN

Väliaikaisten töiden tekeminen on olennainen osa preparoidun hampaan ja aukkojen hoitoa, kun halutaan tehdä onnistuneita ja tarkasti istuvia proteettisia töitä. Väliaikaisia töitä valmistettaessa tulee myös tarkasti huomioida toiminnalliset, parodontaaliset sekä esteettiset tekijät.

Käytäntö on osoittanut, että yhdellä materiaalilla ei kaikkia näitä vaatimuksia pystytä toteuttamaan.

Tämä johtopäätös sai GC:n kehittämään **GC UNIFAST TRAD**:in ja sille yhdenmukaisen valokovetteisen version **GC UNIFAST LC**:n. Molemmat on kehitetty vastaamaan tarkasti käyttäjien toiveita.

Lyhytaikaisen väliaikaistyön valmistaminen – yleisin käyttöindikaatio- asettaa materiaalille erityisiä vaatimuksia, kuten esimerkiksi

- hoitovaiheen nopeus
- työ tulee voida poistaa helposti kovettumisen jälkeen
- materiaalin oltava taloudellinen käytössä.

GC UNIFAST¹, metyylimetakrylaattipohjainen akryyli, täyttää kaikki nämä vaatimukset täydellisesti. Tämän luokan materiaalien edut täyttävät täysin seuraaville väliaikaistöille asetetut vaatimukset

- inlayt tai onalyt
- yksittäiset kruunut
- ja lyhyet sillat

¹ Seuraavat tiedot koskevat yhtäläisesti molempia tuotteita: **GC UNIFAST TRAD** ja **GC UNIFAST LC**.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Metyylimetakrylaatti on avain **GC UNIFAST** -materiaalien sopivuuteen vastaanottotyöskentelyyn. Erinomaisesti toisiinsa sekoittuvat jauhe ja neste varmistavat homogeenisen ja kuplattoman, helposti työstettävän sekoituksen.

GC UNIFAST:lle tyypillinen kumimainen koostumus varmistaa työn ongelmattoman irrottamisen myös lievistä allemenoista tai muuten vaikeasti saavutettavilta pinnoilta.

Toinen etu on **GC UNIFAST**:in muotoonsa palautuvuus, sitä kutsutaan "muistiefektiksi". Tämä estää tehokkaasti poisotettaessa syntyvien venymien negatiivisen muodonmuutoksen jäämisen pysyväksi, mikä on ongelmallista muilla materiaaleilla.

Jotta voidaan toteuttaa proteettisilta töiltä vaadittavaa esteettisyyttä, molempia **GC UNIFAST** -versioita on saatavissa useina eri väreinä. Hyvä värin istuvuus sekä pitävyyttä täyttää kaikki hampaanvärisille väliaikaistöille asetetut vaatimukset.



Esteettisiä proteettisia töitä



Ongelmaton väliaikaistyön poistaminen

TUOTTEEN EDUT

Erittäin taloudellinen

Metyylimetakrylaateilla on erinomainen kustannushyötysuhde. Käsillä sekoitettava versio ei vaadi kalliita lisätarvikkeita.

GC UNIFAST – käyttäjäystävällinen työskentelyaika

Tämä näkökohta, mikä on taloudellisesti tärkeä ja potilasaikaa säästävä on otettu huomioon **GC UNIFAST TRAD**:ia suunniteltaessa. Jo 2'30" sekoituksen jälkeen väliaikaistyö voidaan poistaa suusta.

GC UNIFAST LC – työskentelyä ilma aikastressiä

Tämä osoittaa erikoismateriaalin edut. Valokovetteisuus antaa hammaslääkärille aikaa tehdä tarvittavat hienosäädöt ja korjaukset. Myös kaikkein monimutkaisimmatkin työt voidaan toteuttaa täydellisesti ilman, että aika rajoittaisi työskentelyä.

2'30"

GC UNIFAST TRAD

Käyttäjäystävällinen työskentelyaika

GC UNIFAST LC

Työskentelyä ilman aikarajoitusta