

# GC UNIFAST

## OD PROBLEMA DO RE'ITVE

Začasni postopek pripravljenega zoba in odprtini je bistven del za uspešno dobro prilegajočo protetično delo, ki mora upoštevati funkcionalne, periodontalne in estetske zahteve.

V praksi vidimo, da en sam zobni material ne more ustrezati vsem tem različnim zahtevam.

To je privedlo GC da razvije **GC UNIFAST TRAD** in svetlobno strjujoč ekvivalent **GC UNIFAST LC**, ki oba natančno izpolnjujeta zahteve uporabnikov.

Kratkotrajni provizoriji, najbolj običajna uporaba, nalaga materialu zelo posebne zahteve kot so:

- Hitrost postopka,
- Enostavno odstranjevanje med fazo strjevanja
- In ekonomičen postopek.

**GC UNIFAST<sup>1</sup>**, na bazi metil metakrilata, vrhunsko izpolnjuje te zahteve. Prednost materiala tega razreda je, da odlično zadovoljuje določene zahteve v zvezi z kratkotrajnimi provizoriji začasnih

- inlejev in onlejev,
- posameznih kron
- in krajših mostičkov.

<sup>1</sup> Naslednja informacija se enakovredno nanaša na proizvoda **GC UNIFAST TRAD** in **GC UNIFAST LC**

## LASTNOSTI PROIZVODOV

Metil metakrilat je ključni element v ustreznosti **GC UNIFAST** v praksi.

Dobra vlažnost prahu in tekočine omogočata enostavno izdelavo homogene mešanice brez mehurčkov.

**GC UNIFAST**-ova tipična gumijasta elastičnost omogoča enostavno odstranjevanje začasnih provizorijev tudi iz preparacij ki so rahlo resorbirane ali na slabše dostopni strani preparacije.

Druga prednost je oživitev **GC UNIFAST**-a znana kot "efekt spomina". To učinkovito preprečuje kakršnokoli trajno poškodbo med odstranjevanjem, kot je to problem pri drugih materialih.

Z namenom izpolnjevanja vseh estetičnih zahtev pri protetičnih obnovitvah, je na voljo mnogo barv v obeh različicah **GC UNIFAST**-a. Dobro barvno ujemanje in barvna stabilnost izpolnjuje potrebe po zobno obarvanih začasnih obnovitvah.



Estetične protetične obnovitve



Enostavno odstranjevanje

## PREDNOSTI PROIZVODA

### Zelo ekonomičen

Metil metakrilat ima dobro razmerje med stroški in prednostmi. Ročno zmešana različica ne zahteva dragega pribora.

### GC UNIFAST TRAD - v prakso usmerjen delovni čas

Ta vidik, ki je pomemben za ekonomično in hitro zdravljenje pacientov, je idealno pokrit z **GC UNIFAST TRAD**-om. Samo 2'30" po mešanju, lahko začasno obnovitev (provizorij) odstranimo iz ust.

### GC UNIFAST LC - delo brez časovne stiske

To kaže prednost posebnega proizvoda. Svetlobno strjevanje daje zdravnikom čas za prilagoditev in izvršitev popravkov. Tudi najbolj zahtevne indikacije so lahko opravljene izvrstno brez časovne stiske.



V prakso usmerjen delovni čas



Delo brez časovne stiske

## KORAK PO KORAK - KLINIČNA UPORABA

Primer GC UNIFAST TRAD



Pacient z kovinsko keramično krono na zobu 12, ki jo je treba zamenjati



Jemanje odtisa pred pripravo.



Končana priprava



Mešamo GC UNIFAST TRAD 10-15 sekund



Odtis napolnimo z zmešanim GC UNIFAST TRAD-om



Namestimo v usta




Odstranimo 2'30" po začetku mešanja. Material doseže temperaturo  $\pm 40^{\circ}\text{C}$



Začasna krona pred finiranjem



Finiranje začasne krono v 4 minutah po začetku mešanja.

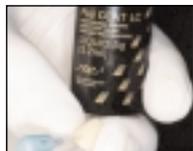

Svetleča površina je dosežena z uporabo GC Fuji COAT LC



Zaščitite začasno krono izdelano iz GC UNIFAST TRAD-a z GC Freegenol-om



Končni rezultat

• Prodent Dental Medical, Jurčkova pot 69, 1000 Ljubljana, Tel. (01) 42 74 356; Fax. (01) 42 77 425 • prodent@siol.net  
• KT-PREZENT, Celovška 136, 1000 Ljubljana, Tel. (01) 515 26 50; Fax. (01) 505 6781

## NA KRATKO O GC PROIZVODIH ZA ZAČASNE OBNOVITVE

### GC PROVITEC

Material na bazi dvo-akrilne kompozitne baze za začasne krono in mostove




### GC FREEGENOL

Cement brez Eugenola za cementiranje začasnih kron in mostičkov



### GC K.Y. PLIER

Klešče za odstranjevanje začasnih protetičnih del

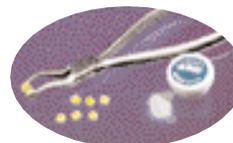

## PAKIRANJE

### GC UNIFAST TRAD



#### • POSAMEZNO

100 g prah, slonokoščena, N.3X, N.8  
250 g prah, slonokoščena, N.3X, N.8  
1 kg prah, slonokoščena, N.3X, N.8  
100 g tekočina  
250 g tekočina

### GC UNIFAST LC



#### • ZAČETNO PAKIRANJE

Prah A2, A3, B2, B3, C2,  
Prosojen, vsak 30 g  
Tekočina 2 x 30 g

#### • POSAMEZNO

50 g prah A2, A3, B2, B3,  
C2, prosojen  
2 x 15 g tekočina

Code z O LF SE 6 35 - 04/00

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Interleuvenlaan 13  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.39.80.50  
Fax + 32.16.40.02.14  
E-mail: info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
East European Office  
Aleja Pomoraca 19  
10020 Zagreb, Croatia  
Tel. +385.1.46.77.251  
Fax +385.1.46.77.251  
E-mail: info@eeo.gceurope.com  
http://eeo.gceurope.com

© Vita je zaščitni znak Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

GC  
FIRST IS QUALITY

## GC UNIFAST

MATERIAL ZA IZDELAVO ZAČASNIH KRON IN MOSTOV NA BAZI METIL METAKRILATA



GC UNIFAST v soju arometov

¥ZELO EKONOMIČEN  
¥INTELEKTNO OBNA„ANJE OB  
STRJEVANJU Z EFEKTOM SPOMINA  
¥HITER DELOVNI ČAS (VLC)  
Z MOJNOSTJO KONTROLE