


## 歯科用機器のメンテナンスに関するお願い



いつもジーシー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。  
自動車と同じように、歯科用医療機器にもメンテナンスが必要です。  
ジーシーでは、製品の性能・品質を長い間維持していただくため、始業前のチェック、定期的な消耗部品の交換と機器の清掃及び点検をお願いしております。

### 歯科用ユニット

#### ハロゲンランプタイプのオペレーティングライト

安全性と性能確保のため、1年に1回ハロゲンランプ交換することを推奨しております。  
詳細はこちら  <http://www.gcdental.co.jp/tekisei/tadasiku/140324.html>

以下の歯科用ユニットはLEDタイプのオペレーティングライトをラインナップしております。LEDライトは、ハロゲンランプと比べて長寿命＆省エネです。切り替えもご検討ください。

対象ユニット：イオム レガロ/イオム レガロ スマート/イオム プラス/  
レフィーノ/フェリーチェ/G コンパクト i シリーズ


※全ての機種が対象ではございません。詳しくは弊社営業担当へお問い合わせください。



#### ハンドピース（タービン・モーター・シリンジ）ホース

始業前に水・エア漏れがないか確認を行ってください。

#### タービン（コントラ/ストレート）ベアリング・チャック

患者さんの治療毎に、専用スプレーによる給油・清掃と滅菌を行なってください。  
詳細はこちら  <http://www.gcdental.co.jp/tekisei/anzen/151112.html>



#### 給水系のフラッシング

毎日の診療開始前に残留水の排出（フラッシング）を行ってください。

### 滅菌器（バキューレーブ31B+ / ユーロレーブ29VS+）

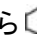
週に一度、ドアシール及びチャンパー内をアルコールで湿らせた、糸くずの出ない柔らかな布またはガーゼを使用して清掃してください。給・排水タンク内はきれいな布またはガーゼを使用して清掃してください。



<正面>

<上面>

詳細はこちら  <http://www.gcdental.co.jp/tekisei/tadasiku/151112.html>

医療法により医療機関においては保守点検が義務付けられています。  
詳細はこちら  <http://www.gcdental.co.jp/tekisei/pdf/kiki.pdf>

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口  0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

