

医療機器 保守点検チェックシート

参考資料

該当品目名：Gスキャン7400/7400s、GスキャンHS、Gスキャン、デジレントコンビX、ダイオラマ

※ 点検・お手入れ方法については添付文書及び使用説明書などを参照ください

医療機関名：		機種名		製造番号：	
点検日：		点検者：		医療機器安全管理責任者：	
点検OK	レ	点検 NG	×	該当なし	—
内容	内容			結果	処置及び対応
P C 関 係	データのバックアップは正常に取れていますか。				
	各PC正面、背面にほこりが溜まっていませんか。				
	PC背面のケーブルの接続部に緩みはありませんか。				
	起動時、および作動時にエラーはありませんか。				
ス キ ャ ナ ー 本 体	装置にがたつきがなく、安定して設置されていますか。				
	カバーはスムーズに開閉しますか。				
	IPホルダーに切れや破れはありませんか。				
	IPの折れ曲がり、傷、汚れはありませんか。				
	IPの保護カバーに切れや破れはありませんか。				
	IPがドラムに確実に装着されますか。				
	スキャンが正常に開始・終了しますか。				
	スキャン中に異常音はしませんか。				
	スキャン画像に異常はありませんか。				
	スキャン画像の濃度は適切ですか。				
	正常にイレーズされますか。				
	作動中にエラーが表示されていませんか。				
	USB及び電源ケーブルは抜けかけていませんか。				
そ の 他 加 筆 事 項					
医療機関名：	機種名		製造番号：		

※消耗品の交換・清掃方法等につきましては、付属されている使用説明書をご参照下さい。

※ご使用の医療機器に合わせて、点検項目を追加の上ご使用ください。