

医療機器保守点検チェックシート

参考資料

該当品目名: ZEISS マイクロスコープ EXTARO300&Pico&PROergo

フロアマウント・ウォールマウント・天井マウント・ユニットマウント(Pico)・フロアスタンド・ポールマウント

※点検・お手入れ方法については添付文書及び使用説明書などを参照ください。

※必要工具 六角レンチ(8ミリ、2.5ミリ、2ミリ等)、ドライバー等必要に応じてご用意ください。

医療機関名:		機種名:		製造番号:		
点検日:		点検者:		医療機器安全管理責任者: 印		
点検OK	レ	点検NG	×	該当なし	—	
項目	内容				結果	処置及び対応
全般	外装に破損・折損はありませんか。					
レンズ部 本体	各接合部、固定ネジにガタ、緩みはありませんか。					
	各関節はスムーズに動作しますか。					
	ズーム機構はスムーズに動作しますか。					
	フォーカス機構はスムーズに動作しますか。					
	瞳孔間距離調整ダイヤルはスムーズに動作しますか。					
	対物レンズに傷や汚れはありませんか。					
	接眼レンズに傷や汚れはありませんか。					
	レンズカバーにガタや緩みはありませんか。(OP 装着時)					
	レンズカバーに傷や汚れはありませんか。(OP 装着時)					
	ハンドグリップにガタや緩みはありませんか。					
接眼レンズ、MORA、対物レンズ等顕微鏡部分を揺らして異音、ガタはありませんか。						
アーム部分 ボックス スラ	レンズ部分とアームとの接合部にガタはありませんか。					
	アームを前後、左右、上下に動作させて任意の位置で静止しますか。					
	アームはスムーズに動作しますか。異音、ガタつきはありませんか。					
	アームとポールの接合部にガタはありませんか。					
	ランプボックスにホコリがのっていませんか。					
	ランプボックスから異音がしませんか。					
本体 接合部	ポール部分、アーム部分、顕微鏡本体を手で揺らして、異音、ガタはありませんか。					
	顕微鏡操作時に、違和感はありませんか。					
	キャスター部分/壁/天井/ユニット/床との固定ボルトが緩んでいませんか。ポール/アーム部が垂直/水平になっていますか。					
その他	キャスターはスムーズに作動し、確実にロックできますか。(フロアスタンド)					
	キセノンライトの交換時期は大丈夫ですか。(500時間) ※キセノン使用の場合					
	予備ランプのストックは大丈夫ですか。					

※消耗品の交換・清掃方法等につきましては、装置に付属されている使用説明書をご参照下さい。

※ご使用の医療機器に合わせて、点検項目を追加の上ご使用ください。