

# 「トルクレンチ Plus」を 正しくお使いいただくために




トルクレンチ Plus のメンテナンスを行う際は、必ずヘッド部を外してください。適切な手順でメンテナンスを行うことによって、患者や医療従事者の感染を予防し、インスツルメントの腐食、変色、機能低下を防止することができます。

## トルクレンチ Plus メンテナンス方法

### 1. ドライバーの取り外し



ドライバーを上部から押し込みトルクレンチ Plus から取り外します。

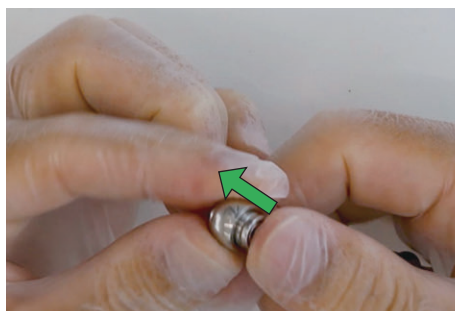

手順動画



### 2. 分解

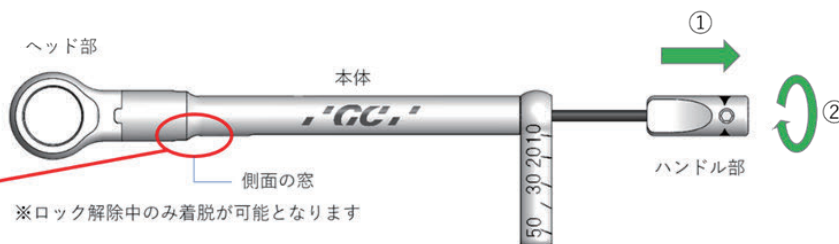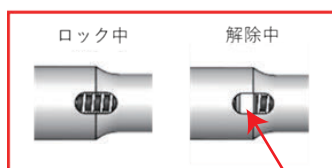

#### ① ロックの解除

ロックを解除すると、側面の窓からスプリングだけでなく、金属の一部が見えるようになります。

#### ② ヘッド部の取り外し

ヘッド部を強い力でまっすぐに引っ張り分解します。

ヘッド部は強く嵌合しているため、周囲に気を付けて取り外してください。




### 3. 予備洗浄

表面に付着している汚れや血液などを洗い流します。その際、本体の内部に汚れが残っていないかを確認してください。汚れがひどい場合は、取扱説明書に従って本体の分解も行ってから洗浄してください。

### 4. 超音波洗浄

分解した状態で超音波洗浄器を用いて 5 ～ 10 分間洗浄します。防錆効果のある超音波洗浄器用の洗浄剤（ハイジーンウォッシュなど）を用いてください。

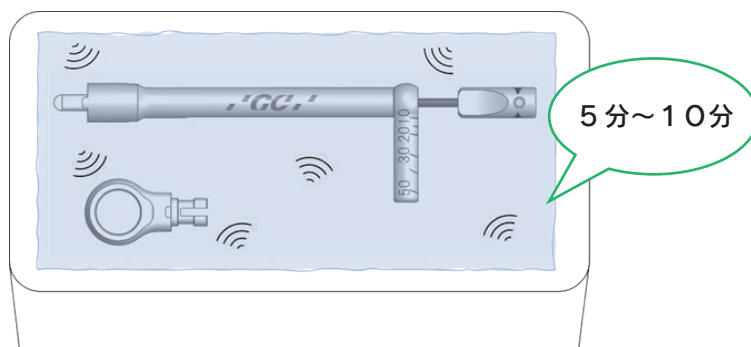

### 5. 乾燥

洗浄後は速やかに乾燥させます。一定の方向に水滴を押し流すように、エアーで水分を吹き飛ばし、十分に乾燥させます。

ラチェットの動きが悪い場合には、スプリングに注油してください。

手順動画


### 6. 組み立て




①ロックが解除されていることを確認します。



②ハンドルを引っ張り、ロックが解除されている状態でハンドル部を押さえます。

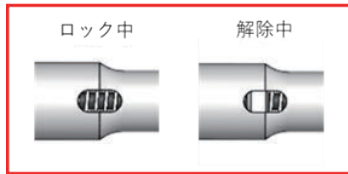

③ハンドル部を押さえた状態で、嵌合部分の凹凸が合うように、カチッとハマるところまで差し込みます。

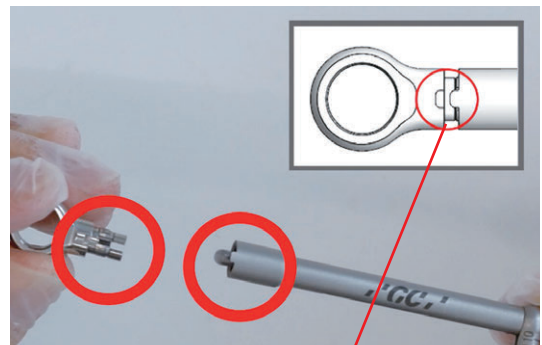

ヘッド部と本体は、一定の方向にのみ噛み合うように嵌合部分に凹凸がありますので、凹凸が合うように組み立てます。

④ロック解除を戻します。



## 7. 滅菌・保管

滅菌後は滅菌バッグやその中身が乾燥していることを必ず確認の上、清潔で乾燥したところに保管します。