

医療機器保守点検チェックシート

参考資料

該当品目名: シロナA1/F1, M1-F, C1, G2, C4

※点検・お手入れ方法については添付文書及び使用説明書などを参照ください。

医療機関名:	ユニット名:	製造番号(チェア):
点検日:	点検者:	医療機器安全管理責任者: 印

点検OK: ◯ 点検NG: × 該当なし: -

項目	内容	結果	処置及び対応	
全般	外装・シートなどに外れ・緩みや破損・折損はありませんか。			
アシスタントユニット	シリンジの水/エアは出ますか、漏れはありませんか。			
	バキューム・エジェクター(排唾管)は吸引しますか。			
	コップの水は出ますか、量は適切ですか。			
	コップの水は温水になりますか。			
	排水トラップにゴミは溜まっていますか。			
	バキューム・エジェクター(排唾管)のフィルターにゴミは溜まっていますか。			
	スピットン洗浄水は出ますか、量は適切ですか。			
	水/エア漏れはありませんか。			
チェアユニット	マニュアルスイッチ及びチェアのフットスイッチでチェア上下/傾起が動きますか。			
	オートスイッチでチェアがメモリーした位置で停止しますか。			
	ヘッドレストの調節はスムーズに動きますか。(上下・角度)			
	ヘッドレスト, バックレスト, 座部シート等にがたつきはありませんか。			
	各安全スイッチは正常に作動しますか。			
無影灯	点灯/消灯できますか。			
	無影灯はスムーズに動きますか。任意の位置で停止しますか。			
	ハロゲンランプは年に1回交換していますか。			
ドクターユニット	ドクターテーブル	スムーズに動き、任意の位置で固定できますか。		
	ドクターアーム	スムーズに動き、任意の位置で固定できますか。		
	全てのホース	水・エア漏れはありませんか。		
	タービン	タービン類の着脱はスムーズに行えますか。		
		規格に合ったバーを使用していますか。		
		回転中異常音はありませんか。		
		芯ぶれやバーが抜けたりしませんか。		
		スプレーは出ていますか。		
		ハンドピースライトは点灯しますか。		
	モーター	コントラ類の着脱はスムーズに行えますか。		
		規格に合ったバーを使用していますか。		
		回転中異常音はありませんか。		
		芯ぶれやバーが抜けたりしませんか。		
		スプレーは出ていますか。		
ハンドピースライトは点灯しますか。				
シリンジ	シリンジの水/エアは出ますか、漏れはありませんか。			
排油溜	清掃されていますか。			

裏面に続く

項目	内容		結果	処置及び対応
オプション関係	フィルムビューワー	点灯/消灯しますか。		
	バーナー	着火/消化しますか。		
		ワックス受けにワックスが溜まっていませんか。		
		ガス漏れはしていませんか。(異臭)		
	スケーラー	スケーラーは発振しますか。		
		水量は適切ですか。		
		チップは専用品を使用していますか。		
		チップは磨耗していませんか。		
		ハンドピースライトは点灯しますか。		
	光重合器	正常に作動しますか。		
その他				

※交換・清掃方法等につきましては、ユニットに付属されている使用説明書・お手入れ下敷きをご参照ください。

項目	期間	内容	結果	処置及び対応
業者に委託する保守点検	1年に1回	装置を作動させる電源電圧はAC95～107Vの範囲内で安定していますか。		
	1年に1回	床と機器とが確実に固定されていますか。		
	1年に1回	機器の連結部にて電気配線の抜けはありませんか。		
	1年に1回	機器の連結部にて固定用ねじに緩みはありませんか。		
	1年に1回	チェアー内部の油圧回路にて漏れはありませんか。		
	1年に1回	アシスタントユニット内部あるいは配管ボックスにて給排水、バキューム、水/エアチューブ配管に漏れや、折れはありませんか。		
	1年に1回	各アーム関節部はスムーズに動きますか。任意の位置で停止しますか。		

GC