

保守点検チェックシート

デンタルエックスレイ GX-D1

装置を使用するにあたっては、1 ヶ月に 1 回、以下の点検を行ってください。

ユーザーによる点検項目		
番号	内容	チェック欄
1	外観に異常な変形や傷はありませんか？	
2	カバーの割れはありませんか？	
3	装置が傾いたりしていませんか？	
4	装置にガタつきなどがなく安定して設置されていますか？	
5	電源プラグが抜けかけたり、周りにホコリがたまっていますか？	
6	ケーブル類に、摩耗、傷、よれや引っ張られている部分はありませんか？	
7	動作範囲内に障害物はありませんか？	
8	可動部は、異音や振動がなく、スムーズに動作・停止しますか？	
9	X 線照射中の表示状態と警告音は、使用説明書の内容通りですか？	
10	X 線管球部からオイル漏れはありませんか？	
11	撮影した X 線写真や画像に異常がみられませんか？	

装置の性能を維持するために、上記の点検の他、専門の技術者による年 1 回の定期点検を実施していただけますようお願いいたします。定期点検にあたっては、お買い求めのディーラー又は弊社支店、営業所へお申し付けください。以下の点検項目に従って、定期点検を実施いたします。

※ご使用いただいている機器により該当しない項目もございます。

業者による点検項目		
分類	項目	内容
撮影装置	設置状態	水平がとれており、固定ネジに緩みがないこと
	電源電圧	規定電圧(100V±10)があること及び不安定でないこと
	ケーブルの取り回し	無理のない取り回しで、一部に負担がかかっていないこと
	ケーブルの状態	各種ケーブルに傷や汚れがないこと
	コネクタの接続	各種ケーブルのコネクタに緩みがないこと
	上下動作	スムーズに動作し、任意の位置できちんと止まること
	左右動作	スムーズに動作し、任意の位置できちんと止まること
	X 線チューブヘッド	各種コネクタに緩みがないこと
		カバーに汚れや損傷がないこと
		スムーズに動作し、任意の位置できちんと止まること
		X 線管球部からオイル漏れがないこと
	チェア部	座面に汚れや損傷がないこと
		正常に上下動作が行えること
		正常にチェアの折りたたみが行えること
		シリンダからオイル漏れがないこと
	コントロールパネル部	ディスプレイが正常に表示されること
		各種ボタンが正常に動作すること
		作動中にエラーが表示されないこと
	照射スイッチ	照射スイッチを押すと警告音が鳴り、ボタンを離すと X 線照射が止まること
最終確認	外観	清掃を行い、各部に汚れや損傷がないこと
	作動確認	各部を作動させ、異常音、ガタつき、スレがないこと
	撮影確認	撮影した X 線写真や画像に異常がみられないこと