

正しくお使いいただくために

アタッチメント、ニードルチップのご使用後は下記の通り洗浄・滅菌してください。

①【分解】

付属のミラー押さえ治具を使用してミラー押さえを回し、ミラーを取り外します。ニードルチップアタッチメントの場合、ニードルチップを取り外します。



ミラー押さえ治具



分解後

④【組立】

アタッチメント、ミラー、ミラー押さえの水滴、油分を除去し、アタッチメントを組み立ててください。

※ミラーには表裏があります。裏面側がキャップ側に面するようにミラーを入れてください。



表



裏

②【予洗】

すぐに洗浄できない場合は、凝固防止スプレーによる乾燥・凝固の防止処理を行ってください。



ハイジーンプレミスト

③【洗浄】

アタッチメント、ミラー、ミラー押さえ、ニードルチップを酵素系洗浄剤にて浸漬洗浄(10分間)を行い、その後すすいでください。すすぎ時にミラーは綿棒等、ミラー以外はブラシ等を使用して汚れを落としてください。

※落ちない汚れに対して超音波洗浄を行った場合は、ガタツキなどの異常がないかご確認ください。

※他社洗浄液をご使用の場合は、アルミ器具に対応しているかご確認ください。

※他の器具に当たって傷付かないように注意してください。



ハイジーンウォッシュ
(酵素系洗浄剤)



超音波洗浄器


！
アルカリ系洗浄剤はアルミが徐々に劣化する可能性がある為、ご使用を控えてください。

⑤【清掃】

ニードルチップのつまりが確認された場合にはエアで飛ばすか、またはチップ清掃用具にて清掃してください。

※必要に応じ蛋白溶解剤を用いて超音波洗浄器にて蛋白を除去し、その後、超音波洗浄器にてよく水洗いしてください。

※ニードルチップ内には金メッキが施されておりますので、内壁を傷付けないように注意してください。

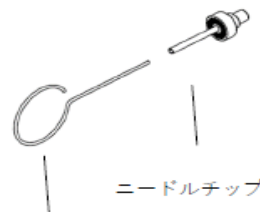

ニードルチップ

チップ清掃用具

⑥【滅菌】

アタッチメント、ニードルチップはオートクレーブ滅菌してください。

※滅菌後はアタッチメント、ニードルチップの水滴、油分を除去し、ハンドピースへの装着、または滅菌パック等に包装したまま保管ください。

