

埋没用石こう

# アドバストーン



義歯埋没用石こうのパイオニア。  
埋没作業が劇的に変わります。

色調 1色 = ライトイエロー  
包装 1缶 = 18kg  
シンプルパック1函 = 3kg



①下蓋埋没：ロウ義歯が完成したら、作業模型を下蓋フラスコにアドバストーンで埋没。



②上蓋埋没：分離材を塗り、床と人工歯部分にアドバストーンをていねいに盛った後、ひきつづき全体を埋没します。



③流口ウ：アドバストーンの硬化を待ち、通法により流口ウ。その後、分割したフラスコの石こう面に分離材を塗布し乾燥ます。



④レジン填入：餅状化させた床用レジン填入して試圧をします。アドバストーンはプレス圧に充分耐え割れたりしません。



⑤重合：乾熱法、または湿熱法で重合。この間にアドバストーンの強度は急激に降下します。



⑥掘り出し：強度のおちたアドバストーンは容易に壊れるため、床を傷つけずに掘り出せます。その後、仕上工程に入ります。

**硬石こう・超硬石こうによる  
コーティングが不要になります。**

アドバストーンは面が滑沢で、強度は焼石こうの約2倍。精度は超硬石こうに匹敵しますからする焼石こうの性能を補う意味で行われていたコーティングは不要となります。(グラフ②)



**焼石こうだけで埋没する場合と  
同じ手軽さで、安全に作業できます。**

焼石こうだけによる簡略な埋没法も一部では行われてきましたがアドバストーンに替えればレジン填入の際のプレス圧にも安心。表面も、より滑沢に仕上がります。(グラフ②)

**操作余裕が長いこと  
保存性が良いことも特長です。**


焼石こうに比べ硬化反応が始めはゆっくり、後では急速に硬化するため、埋没操作を落着いて、ていねいに行えます。また、吸湿性の低さが安定した保存をお約束します。(グラフ①)

**加熱されると強度が激減し  
掘り出しが大変容易になります。**

レジン重合のための加熱により、アドバストーンの強度は急激に落ちます。従って、填入時には強く、掘り出し時には壊しやすのが特長。掘り出し時の床の損傷を防止します。(グラフ③)

**咬合器への模型装着にも  
積極的にご利用ください。**

精度は超硬石こうに匹敵するほど高いので咬合器への模型装着等にも最適な石こうです。しかも焼石こうの代わりに使う埋没用石こうとしてコストも抑えました。

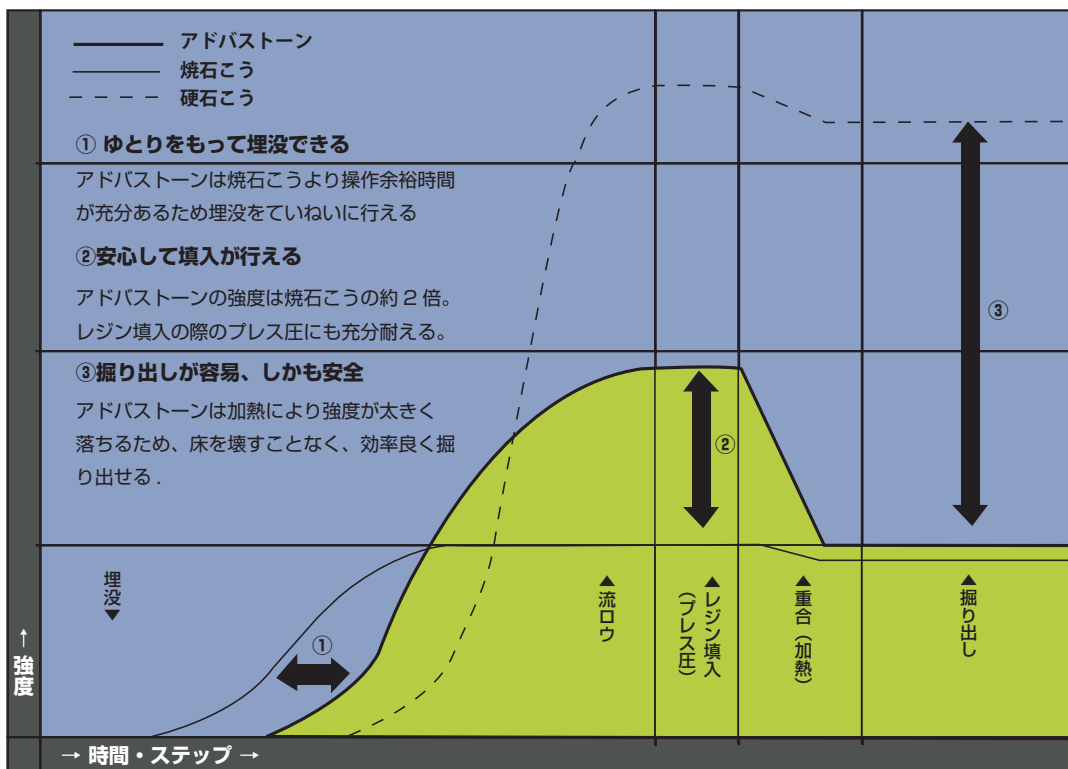

管理医療機器 00000000000000

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実験データは、2010年00月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

**株式会社 ジーシー**

東京都板橋区蓮沼町76-1 〒174-8585

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722

●東北 (022) 283-1751 ●九州 (092) 441-1286