

GC

簡単
剥がす



アローマシリーズの新提案。

トレー清掃わずか1時間。
※アローマファインDFⅢの場合
作業が容易なリキッドタイプです。



そのまま浸漬



1時間でOK



ラクラク剥がせます



ひとかたまりで除去

アルギン酸塩印象材清掃材 (リキッドタイプ)

ジーシーアローマクリーン



清掃作業は簡単・清潔ステップで……。

●アルジネートならなんでもOK。

印象材のトップメーカー、ジーシーならではのオールラウンドクリーナー。除去しづらいといわれる2ペーストタイプも容易に除去できます。

●ひとかたまりでスムーズに除去可能。*1

液が印象材とトレーの隙間に効果的に浸透。印象材を浮かせるので、ひとかたまりで剥がせます。穴などに残った印象材も、指やブラシで軽く擦るだけ。簡単に落とせますのでトレーを傷つける心配もありません。



浸漬前
浸漬1時間後。トレーとの間に隙間ができています。
隙間にスパチュラや指などを入れて引き剥がします。

〈原液使用〉

●溶液が濁らず、効果長持ち。*3

繰り返し使用していただいても溶液の濁りが少なく、清掃効果が長持ちします。



浸漬直後
浸漬1時間後。溶液が濁っていません。

●原液、希釈を使い分け。

アローマクリーンは、希釈することで従来のトレクリーン(粉末タイプ)のように一晩浸け置きも可能(希釈した場合は溶かして除去)。状況により原液使用、希釈使用が行える2WAYタイプです。

*希釈使用の場合は処理工程が異なりますのでご注意ください。

剥がす=原液

印象材タイプ	希釈率	浸漬時間
粉末タイプ	原液	1~3時間
2ペーストタイプ	原液	2~5時間

溶かす=希釈

印象材タイプ	希釈率	浸漬時間
粉末タイプ	5~10倍	5~18時間
2ペーストタイプ	5倍	5~18時間

*1,2,3,4: 原液で使用の場合

発売元:株式会社ジーシー/製造元:大成歯科工業株式会社



アルギン酸塩印象材清掃材
(リキッドタイプ)

ジーシー アローマクリーン

●包装/2L(2.3kg) 1本

●作業が簡単、スピーディ。*2

計量、希釈の手間のないリキッドタイプです。溶かさずかたまりで剥がすので、浸漬前に印象材を削ぎ落とす面倒な作業が不要。トレーごとそのまま処理できます。

●環境にも配慮。

沈澱物が少なく、交換時の廃液処理が容易*4。溶解泥が廃水トラップに貯留することはありません。使用後の空容器はコンパクトにたたんで廃棄できます。



「アローマクリーン」でより効率アップ……アローマシリーズ。



アルジネート印象材
アローマファイン プラス
(ノーマルセット) (ファストセット) (スローセット)

●包装/粉末5kg 1函

アローマファイン プラス<ノーマルセット>
管理医療機器 221AKBZX00075000
アローマファイン プラス<ファストセット>
管理医療機器 221AKBZX00077000
アローマファイン プラス<スローセット>
管理医療機器 221AKBZX00078000



自動練和機専用アルジネート印象材
アローマファインミキサタイプ

●包装/粉末5kg 1

管理医療機器 219AFBZX00193000



寒天印象材(連合印象用)
アローマロイド

●包装

シリンジタイプ1瓶=90本入(5/16インチ)
シリンジタイプ1函=60本入(5/16インチ)
カートリッジタイプ1函=48本入
※ ストレージ温度60℃~63℃
製造元:株式会社オムニコ



インプレッショントレー/
インプレッショントレー<穴あき>

●包装/全顎用セット1函=8個

局部用セット1函=6個
一般医療機器 13B1X00155000043
製造元:スーベリア社

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。

*掲載の価格とジーシー研究所測定の実験データは、2015年10月現在のものです。※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

発売元 株式会社ジーシー / 製造販売元 株式会社ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町7番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286