

BITEEYE BE-I

歯接触分析装置

ジーシー バイトアイ BE-I

ジーシー バイトアイワックス対応 ワックス解析機能追加ソフト

ジーシー バイトアイ BE-I ワックス解析機能追加ソフト

包装●一式: USBメモリ(本体バージョンアップ用) 1個、USBキーボード 1個、バイトアイfor PC ソフトウェアCD-ROM(コンピュータバージョンアップ用) 1枚、使用説明書、クイックガイド(ワックス解析機能用)、バージョンアップマニュアル




咬合接触検査用ワックス「ジーシー バイトアイワックス」にも対応。

咬合接触検査材「ジーシー ブルーシリコン/ローフロー」に加えて「ジーシー バイトアイワックス」を読み込むことで、咬合接触状態を可視化。より手軽に咬合状態の把握やインフォームドコンセントを行いやすくなります。

※専用の咬合接触検査ワックス「ジーシー バイトアイワックス」をご使用ください。それ以外のワックスではご使用になれません。※咬合接触検査材「ジーシー ブルーシリコン/ジーシー ブルーシリコンローフロー」もご使用いただけます。

■ バイトアイ BE-I によるワックス解析画面

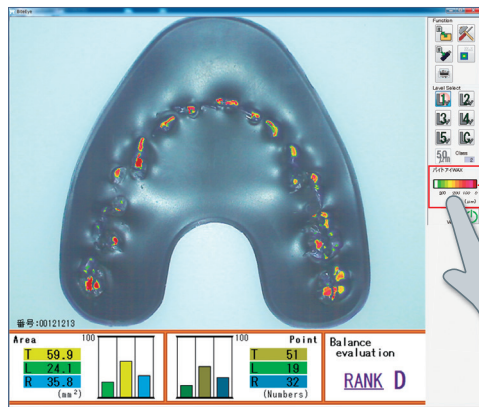

約360μmまでの厚みに対して観察したい厚みの可視化レベルを設定し、咬合接触部位を12段階に色分けして表示、観察することができます。*1

色	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ジーシー バイトアイワックス	330	300	270	240	210	180	150	120	90	60	30	0
厚さ(μm)	360	329	299	269	239	209	179	149	119	89	59	29
ジーシー ブルーシリコン/ ブルーシリコンローフロー	180	150	130	110	90	70	60	50	40	30	20	10
厚さ(μm)	200	179	149	129	109	89	69	59	49	39	29	19
												5
												0
												4


*1:「ジーシー バイトアイワックス」と「ジーシー ブルーシリコン/ジーシー ブルーシリコンローフロー」の厚さは「しきい値」が異なります。

検査材に応じてカラーバーをタッチし解析モードを「バイトアイワックス用/ブルーシリコン用」に切替えて撮影します。

バージョンアップ時に必要なもの

バージョンアップをはじめる前に、必ずインストールマニュアルをお読みください。


《バイトアイBE-I 本体》へは

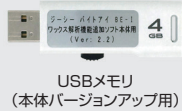

USBメモリ
(本体バージョンアップ用)



キーボード(USBタイプ)

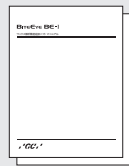

インストールマニュアル

《バイトアイfor PC》をインストール済コンピュータへは

※データ消失を防ぐために、必ずデータのバックアップを取るよう
にしてください。



バイトアイfor PC インストールCD
(インストール済コンピュータの
バージョンアップ用)

●バイトアイfor PC 動作環境
OS:Windows Vista/Windows7/Windows8/Windows8.1(各OS 32/64Bit版)、プログラム:Microsoft.Net Framework 3.5以上必須、CPU:1.6GHz以上のIntel系、メモリー:1GB以上、ディスク:128MB以上のVRAM、表示解像度:800×600以上、USBポート、CD-ROMドライブ、必須
※上記動作環境を満たしていても、全てのコンピュータでの動作を保証するものではありません。

■関連製品

咬合接触検査用ワックス

ジーシー バイトアイワックス



色調●紫色
サイズ●2種=Mサイズ(縦71mm×幅70mm)、Lサイズ(縦71mm×幅80mm)
包装●各1函(40枚)
一般医療機器 27B2X0008000065
製造販売元 大成歯科工業株式会社

※掲載の参考データは、2015年11月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※カタログ中のソフトウェア画面写真は、ハズ込み合成のため実際とは若干異なります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ジーシー バイトアイ BE-I
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000217

ご使用に際しては、必ず製品の使用説明書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286