

セラスマートコート

光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材



● 1本で、厚みを持たせたい部位に使いやすい クリアコートHV※が新登場！

※HV(High Viscosity : 高粘性)

補綴装置のツヤ出しが、これ1本。
クリアコート2種類に加え、厳選された3色のカラーラインナップ。
CAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの仕上げを簡単に行えます。



● 口腔内でも口腔外でも使用できます！

ラボサイド(口腔外)で



チェアサイド(口腔内)で



光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材

ジーシー セラスマートコート

単品

色調 ● 5色=クリアコート、クリアコートHV、インテンシブホワイト、インサイザルグレー、サービカルブラウン

包装 ●

- クリアコート: 1本(5mL)
- クリアコートHV: 1本(5mL)
- インテンシブホワイト: 1本(2.6mL)
- インサイザルグレー: 1本(2.6mL)
- サービカルブラウン: 1本(2.6mL)

高分子系歯冠用着色材料 / 歯科表面滑沢硬化材 / 歯科レジン用接着材料 ジーシー セラスマートコート
管理医療機器 302AKBZX00048000



スターターセット

包装 ●

1箱: クリアコート(5mL) 1本、インテンシブホワイト(2.6mL) 1本、インサイザルグレー(2.6mL) 1本、サービカルブラウン(2.6mL) 1本、ディスポザブルレット3枚、ディスポザブルレット用遮光カバー1個、丸筆No.1B(付替用) 1本、平筆No.1B(付替用) 1本、筆用ハンドル(ホワイト) 1本

補綴装置のツヤ出しが、これ1本。



簡単

CAD/CAM冠やインレーにサッと一塗り
簡単仕上げ。厚みを持たせたい部位用に
クリアコートHVをご用意しました。

シンプル

各部位の表現に各1色。調色不要ですぐ
にお使いいただけます。

色ツヤ長持ち

100nm以下のナノフィラー配合による
優れた耐摩耗性。長期的にツヤが持続し
ます。

《使用ステップ》（セラスマート レイヤーへの使用例）《口腔内でも口腔外でもお使いいただけます。

●チェアサイド(口腔内)



試適



表面処理



キャラクタライズ




光照射
(40秒/G-ライトプリマII Plus)




完成


●ラボサイド(口腔外)

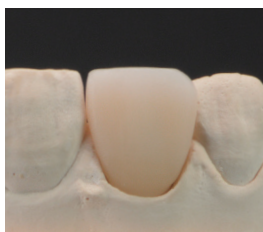

着色前

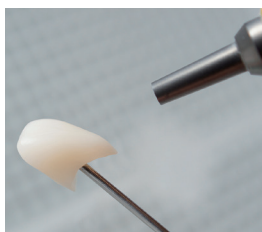

表面処理(粒径25~50μmの
アルミナ、噴射圧0.2MPa以下)

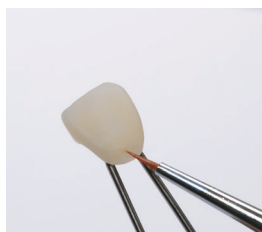

キャラクタライズ



光重合
(90秒/ラボライトDUO)



完成

※フィラー・着色材が沈降していることがありますので、ご使用前にボトルをよく振ってください。
※着色は丸筆No.1B、クリアコート・クリアコートHV塗布は平筆No.1Bの使用をお勧めいたします。
※保険診療の補綴装置に使用する場合、本品の材料料は所定点数に含まれます。
※前歯のCAD/CAM冠には、CAD/CAM冠用材料(IV)を使用した場合のみ、保険請求可能です。

●キャラクタライズ例



セラスマート レイヤー A2 ELの
キャラクタライズ例

**サービカル
ブラウン**
歯頸部、裂溝の
表現

**インテンシブ
ホワイト**
白帯、
ホワイトスポットの
表現

**インサイザル
グレー**
切端部の表現

クリアコート
全体のコート・
ツヤ出し
色調の濃度調整

■歯頸部 サービカルブラウン:クリアコート
=1:1
■切 端 インサイザルグレー
■白 帯 インテンシブホワイト
■仕上げ クリアコート

●最終重合

光照射器	最終重合 照射時間
G-ライトプリマII Plus	40秒
スリムライト	40秒
ラボライトDUO	90秒

※青色LED(450~480nm)のみを光源と
する歯科重合用光照射器または歯科技工
用重合装置は使用できません。
※塗布面にファイバーロッドを充分に近づ
けて、光照射してください。

関連製品

CAD/CAM用高審美性ハイブリッドブロック

セラスマート レイヤー

前歯用 CAD/CAM冠用材料(IV) 保険適用



サイズ●3種=12、14、16(MOIはサイズ14のみ)
色調●
EL5色=A1EL、A2EL、A3EL、A3.5EL、A4EL
MO3色=A2MO、A3MO、A3.5MO
包装●1函:5個入(各色)
サイズ12、サイズ14、サイズ16

歯科切削加工用レジン材料 セラスマート レイヤー
管理医療機器 231AKBZX00004000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2026年9月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東 北(022)785-8040 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store
Google Play
どちらでもこちらのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

