

# ジーシー セラスマートコート

光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

ラボサイド(口腔外)で



チェアサイド(口腔内)で



クリア  
コート

インテンシブ  
ホワイト

インサイザル  
グレー

サービカル  
ブラウン

## 表現 自由自在!

CAD/CAM冠をはじめ  
各種保険診療の補綴装置に  
ひと塗りでワンランク上の表現へ



光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材

## ジーシー セラスマートコート



色調●4色=クリアコート、インテンシブホワイト、インサイザルグレー、サービカルブラウン  
包装●

スターターセット1箱:クリアコート(5mL)1本、インテンシブホワイト(2.6mL)1本、インサイザルグレー(2.6mL)1本、サービカルブラウン(2.6mL)1本、ディスプレイカバー3枚、ディスプレイ用遮光カバー1個、丸筆No.1B(付替用)1本、平筆No.1B(付替用)1本、筆用ハンドル(ホワイト)1本

クリアコート単品:1本(5mL)

インテンシブホワイト単品:1本(2.6mL)

インサイザルグレー単品:1本(2.6mL)

サービカルブラウン単品:1本(2.6mL)

ジーシー セラスマートコート  
高分子系歯冠用着色材料 / 歯科表面滑沢硬化材  
管理医療機器 302AKBZX00048000

# 色合わせの難しい少数歯の症例に

## Simple

各部位の表現に各1色。  
シンプルな4色のラインナップです。

## Easy

色を混ぜなくてもすぐに使える色調。  
お好みに応じて重ね塗りができます。  
またクリアーコートを用い希釈により  
表現を調整いただけます。

## Beauty

100nm以下のナノフィラー配合による優れたツヤ維持性と耐摩耗性。  
長期的に審美性を維持します。

《使用ステップ (セラスマート レイヤーへの使用例)》 口腔内でも口腔外でもお使いいただけます。

### ●チェアサイド(口腔内)



試適



表面処理



キャラクタライズ



光照射  
(40秒/G-ライトプリマII PLUS)



完成

### ●ラボサイド(口腔外)



着色前



表面処理(粒径25~50μmの  
アルミナ、噴射圧0.2MPa以下)



キャラクタライズ




光重合  
(90秒/ラボライトDUO)



完成

※フィラー・着色材が沈降していることがありますので、ご使用前にボトルをよく振ってください。  
※着色は丸筆No.1B、クリアーコート塗布は平筆No.1Bの使用をお勧めいたします。  
※保険診療の補綴装置に使用する場合、本品の材料は所定点数に含まれます。  
※前歯のCAD/CAM冠には、CAD/CAM冠用材料(IV)を使用した場合のみ、保険請求可能です。

### ●キャラクタライズ例

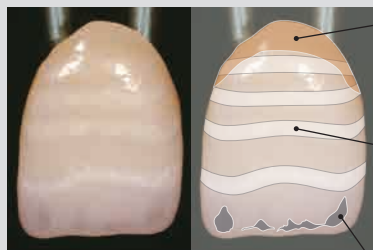

- サービカル  
ブラウン**  
歯頸部、裂溝の  
表現
- インテンシブ  
ホワイト**  
白帯、  
ホワイトスポットの  
表現
- インサイザル  
グレー**  
切端部の表現
- クリアーコート**  
全体のコート・  
艶出し  
色調の濃度調整

セラスマートレイヤー A2 ELの  
キャラクタライズ例

- 歯頸部 サービカルブラウン:クリアーコート  
=1:1
- 切端 インサイザルグレー
- 白帯 インテンシブホワイト
- 仕上げ クリアーコート

### ●最終重合

光照射器	最終重合 照射時間
G-ライトプリマII Plus	40秒
ラボキュアHL	90秒
ラボライトDUO	90秒

※青色LED(450~480nm)のみを光源と  
する可視光線照射器は使用できません。  
※塗布面にファイバーロッドを十分に近づ  
けて、光照射してください。

### 関連製品

CAD/CAM用高審美性ハイブリッドブロック

## セラスマートレイヤー

前歯用 CAD/CAM冠用材料(IV) 保険適用



※写真はAadva CAD/CAM 用

サイズ●2種=12、14、16(MOIは、サイズ14のみ)  
色調●  
EL5色=A1EL、A2EL、A3EL、A3.5EL、A4EL  
MO3色=A2MO、A3MO、A3.5MO  
種類●2種類=Aadva CAD/CAM用、UNIVERSAL用  
包装●1函:5個入(各色)  
サイズ12、サイズ14、サイズ16  
歯科切削加工用レジン材料 セラスマート レイヤー  
管理医療機器 231AKBZX00004000

※掲載情報は、2023年10月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー  
公式アプリ

