





デュラデント白歯リングライズ

待望のリングライズドオクルージョン
専用人工白歯。



(モールドチャート)

29M		31M	
上顎			
犬歯を除く			
29.0	31.0		
3.0	4.0		
前1次臼歯を除く			
3.5	3.0		
下顎			
犬歯を除く			
32.0	34.0		
0.5	3.1		
前1次臼歯を除く			
8.0	7.2		

義歯の安定性が良好で、咀嚼効率も高い リンガライズドオクルージョンを手軽に。


フルバランスドオクルージョンに比べ、短時間で確実に配列、調整が行え、しかも咬合関係に変化が生じても簡単に対応できるリンガライズドオクルージョン。ジーシーではこれを専用の人工臼歯として開発。舌側化咬合の義歯導入を手軽にしました。



デュラデント臼歯
リンガライズド
色調●3色=A3、A3.5、B3
包装●8揃1個 1/1歯=8揃16個


義歯の力学的安定性が抜群

リンガライズドオクルージョンでは、中心咬合位、偏心咬合位とも、上顎の舌側咬頭頂部でのみ下顎と咬合接触します。作業側の咬合圧の方向は下顎歯槽堤の舌側寄りを通す。しかも義歯の推進現象が小さくなり、抜群の安定性を発揮します。

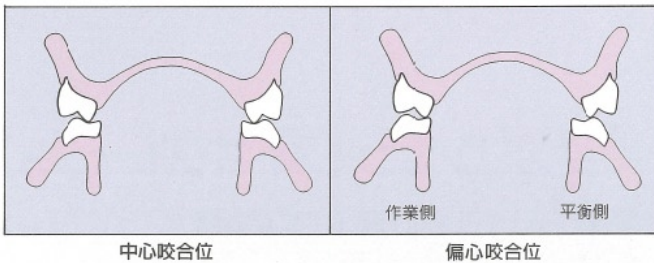

対咬関係が明確で配列が容易

リンガライズドオクルージョンの咬合接触は、1歯対1歯の関係でコンタクトポイントや対咬関係も明確。しかも、片側あたり、わずか5点の咬合接触を付与するだけです。配列、咬合調整が大変容易に行えます。

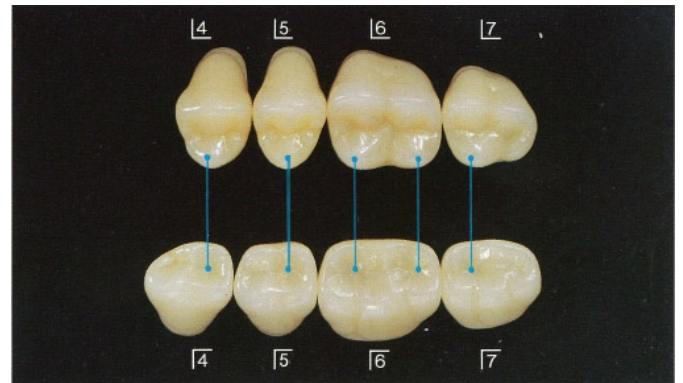

作製が簡単な専用設計

専用設計のため形態修正の手間がありません。歯冠頬側面は前歯部とスムーズに移行し、上下顎の頬側間隔は目立たないように水平被蓋を大きめに設計。審美面への配慮も充分です。

デュラデント前歯に合わせた材質、構造

エナメル層はもちろん、デンチン層にも耐摩耗性を付与。色調は硬質レジン歯デュラデント前歯とマッチするピタシェードです。



リンガライズド臼歯断面

発音・咀嚼が飛躍的に向上

歯列弓を広くとることができ、発音や咀嚼にも好都合です。また単位面積当たりの咬合圧が高く、剪断力の増大によって咀嚼効率が向上します。

デュラデント臼歯 硬質レジン歯 管理医療機器 21100BZZ00140000
※色調は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。 ※製品の使用・外装は、予告なく変更になる場合があります。
※掲載の価格は、2005年11月現在のものです。 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません。)

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日井市烏居松町2丁目285番地

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033
フリーダイヤル ☎0120-416480
受付時間 9:00am~5:00pm (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp/>

支店
●東京 (03) 3813-5751 ●大阪 (06) 4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 283-1751 ●九州 (092) 441-1286