

e s s e n t a

Tips & Tricks for
Shade Selection

シェードガイドを使わずに デンチンペーストとエナメルペーストのシェードを 正しく選択するには

少量のペーストを歯の上に乗せ(ボンディング材は塗布しない)、光照射することで、簡便にシェードを選択することができます。硬化したコンポジットレジンと歯の色の馴染み具合を見て、デンチンペースト、エナメルペーストそれぞれのシェードが一番患者の歯の色に近いかを確認します。



ポイント

それぞれのシェードのペーストを少量歯の上に乗せます。

デンチンペースト：歯頸部

エナメルペースト：切縁部



ポイント

偏光フィルターを装着したカメラで写真を撮ると、より正確にシェードを選択することができます。

エナメルを厚みを 決めるためには

「エッセンシア」の本質は天然歯を再現することです。

そのため、エナメルを厚みを決めるには天然歯のエナメルを厚みを参考にすることが重要です。

※右に示しているのは一般的なエナメルを厚みですが、患者によりエナメルを厚みは異なります。

