

エクザバイトⅢを上手にお使いいただくために

1. より押し出し易くするために(レッドプレートをご存知ですか?)。




カートリッジディスペンサーⅡに同封されています レッドプレートを装着することにより、レバーの間隔が短くなり、手の小さな術者の方でも容易に押し出すことができます。

また、レバーの下端を握ることによって力が入り、より押し出し易くなります。

但し、レッドプレートを装着することにより、1回の押し出し量は少なくなりますのでご注意ください。


2. 左右のペーストをすり切って先端を合わせていますか？

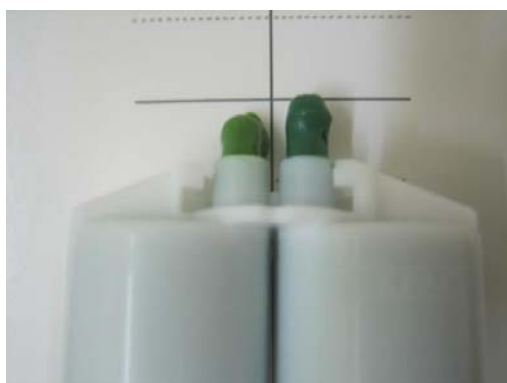

ミキシングチップ装着前に必ず、左右のペーストをすり切って先端を合わせてからご使用ください。

すり切りを行わないと均一に練和されず、**練和物の先端未硬化や、硬化不良の原因となる場合があります。**

3. カートリッジ先端部にペーストが付着していませんか？

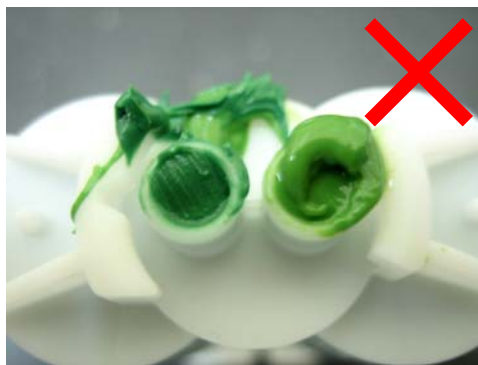

すり切った際、先端部に余分なペーストが付着していないか、ご確認ください。

ペーストが付着した状態でミキシングチップを装着しますと、**ペーストが接触して硬化し、押し出し不良や硬化不良の原因となる場合があります。**


4. 操作時間にご注意ください。



エクザバイトⅢはチェアタイム短縮のため、
口腔内での操作時間(咬合採得可能時間)
は約15秒に設定しております。

また、患者様の負担軽減のために口腔内
保持時間も約30秒となっております。


5. カートリッジ交換を伴う継ぎ足しによる咬合採得はできません。

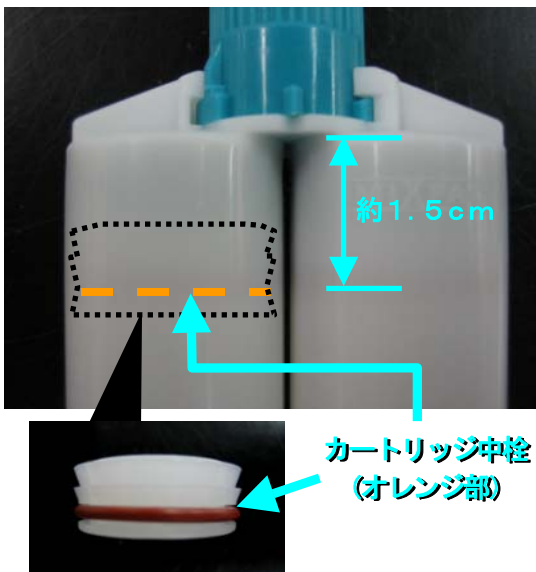

エクザバイトⅢは口腔内での操作時間が
短いため、カートリッジの交換を伴う継ぎ
足しによる咬合採得は行わないでくださ
い。

カートリッジ中栓(オレンジ部)が先端から
約1.5cmの位置が1歯バイトに相当
する残量の目安となります。(すり切り、
ミキシングチップ残量分も含む)

6. 保管はミキシングチップ装着のままで行っていますか？

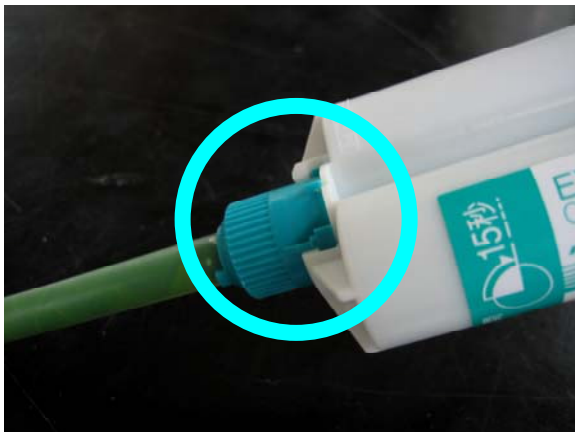

ご使用中のカートリッジを保管する場合、ペーストを押し出したミキシングチップを
装着したまま保管してください。蓋の付け替えを行うと左右のペーストが接触し、
カートリッジ先端部でペーストが硬化する恐れがあります。